

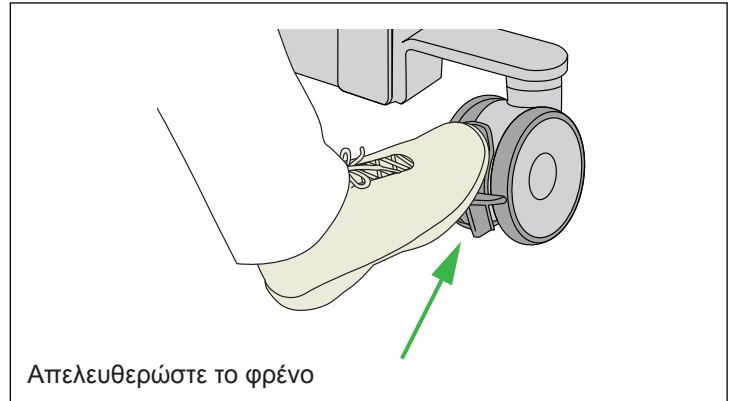
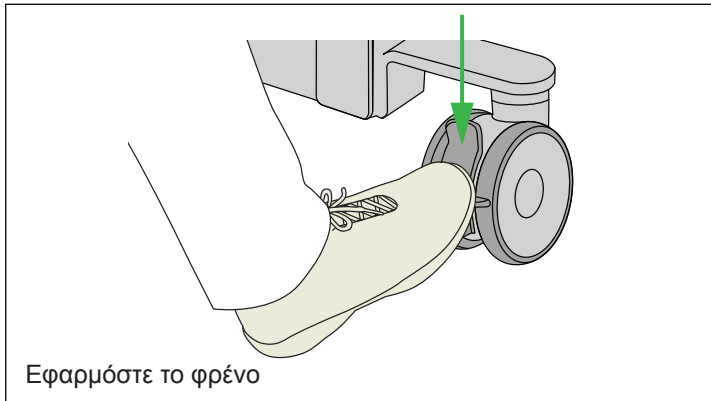



Εφαρμογή και απελευθέρωση φρένου

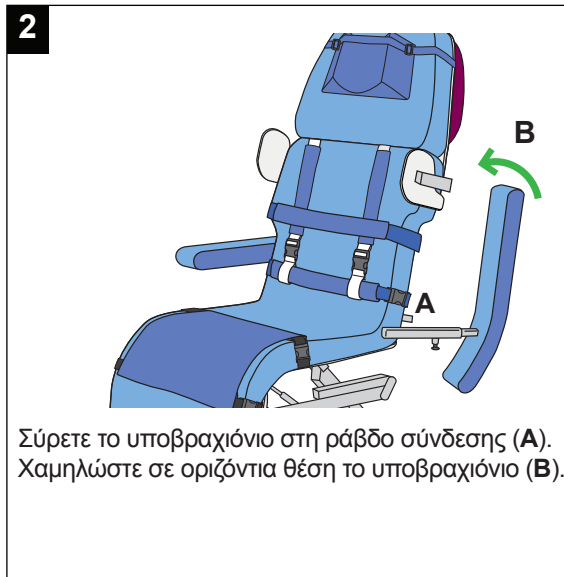


Τοποθέτηση υποβραχιονίου

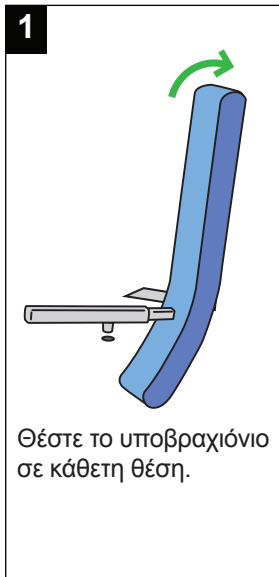


Ρύθμιση ύψους υποβραχιονίου

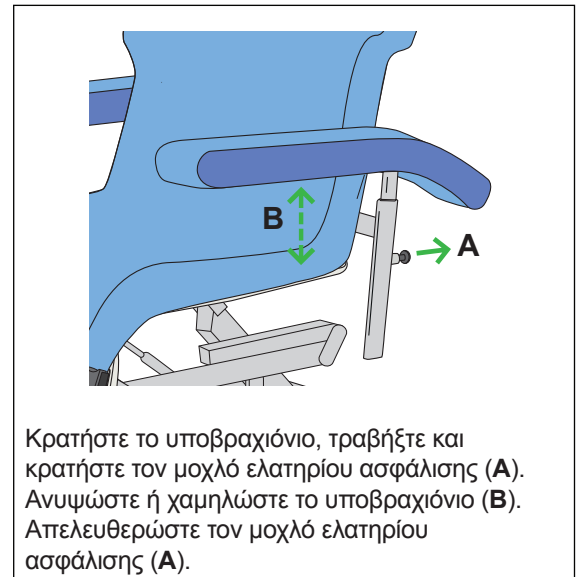


Ρύθμιση πλάτους υποβραχιονίου

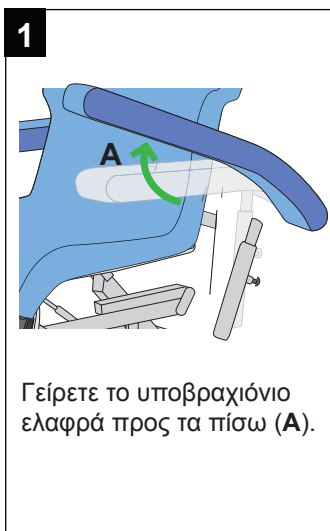

Αφαίρεση υποβραχιονίου

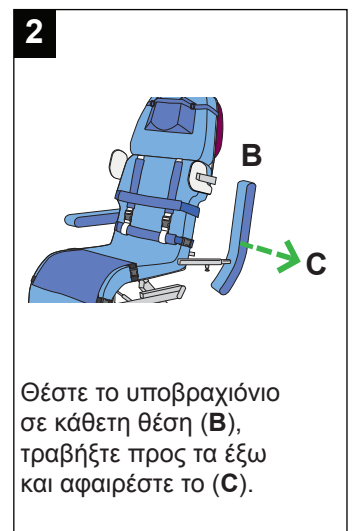


Ρύθμιση μήκους του στηρίγματος ποδιών

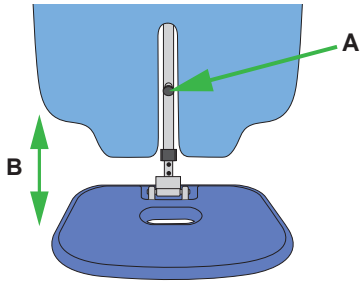


Τραβήξτε προς τα έξω το ελατήριο ασφάλισης (A).
Ανυψώστε ή χαμηλώστε την πλάκα στήριξης ποδιών (B).
Απελευθερώστε το ελατήριο ασφάλισης (A).
Πιέστε και τραβήξτε για να ασφαλίσετε.

Ρύθμιση πρόσθετου μήκους του στηρίγματος ποδιών

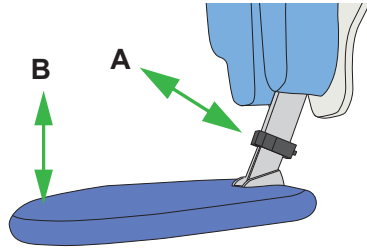


Τραβήξτε την ασφάλεια προς τα εμπρός (A).
Ανυψώστε ή χαμηλώστε την πλάκα στήριξης ποδιών (B).
Απελευθερώστε την ασφάλεια (A).
Πιέστε και τραβήξτε για να ασφαλίσετε.

Αφαίρεση στηρίγματος ποδιών

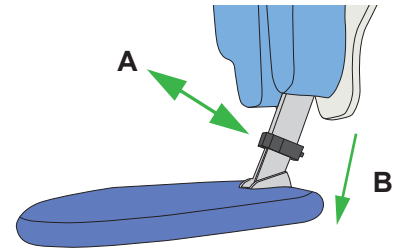


Τραβήξτε την ασφάλεια προς τα εμπρός (A).
Αφαιρέστε την πλάκα στήριξης ποδιών (B).
Απελευθερώστε την ασφάλεια (A).

Ρύθμιση πλάτους στηρίγματος ώμων

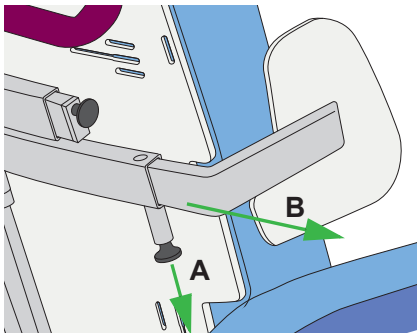


Τραβήξτε προς τα έξω το ελατήριο ασφάλισης (A).
Τοποθετήστε το στήριγμα ώμων (B).
Απελευθερώστε το ελατήριο ασφάλισης (A).
Πιέστε και τραβήξτε για να ασφαλίσετε.

Διπλώστε προς τα κάτω το στήριγμα ώμων

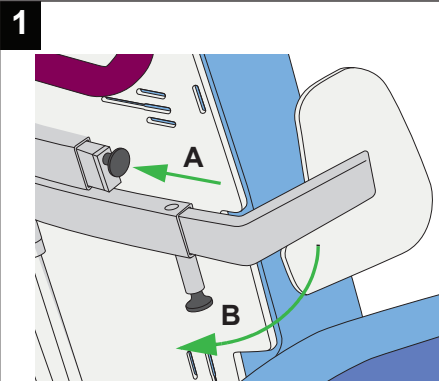


1
Ωθήστε το ελατήριο ασφάλισης στη δεξιά πλευρά (A).
Το στήριγμα ώμων (B) αναδιπλώνεται.

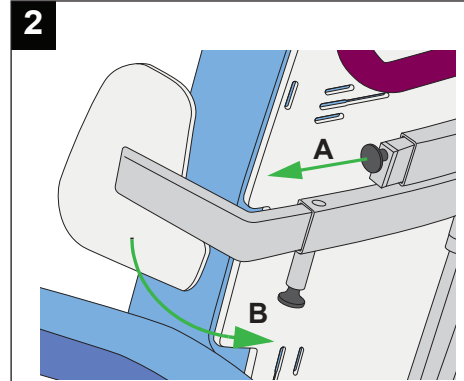


2
Τραβήξτε προς τα έξω το ελατήριο ασφάλισης στη δεξιά πλευρά (A).
Το στήριγμα ώμων (B) αναδιπλώνεται.

Ανάπτυξη στηρίγματος ώμων

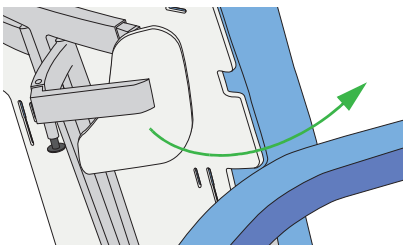


Ανασηκώστε το στήριγμα ώμων μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Πιέστε και τραβήξτε για να ασφαλίσετε.

Μπαταρία

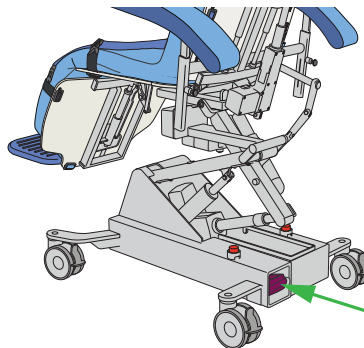


Η μπαταρία βρίσκεται στο πίσω μέρος του Sara Combilizer.

Αφαίρεση μπαταρίας

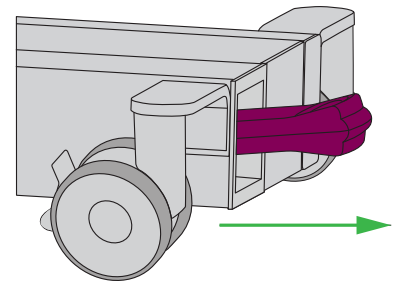


Τραβήξτε τη μπαταρία προς τα έξω.


Στρώματα

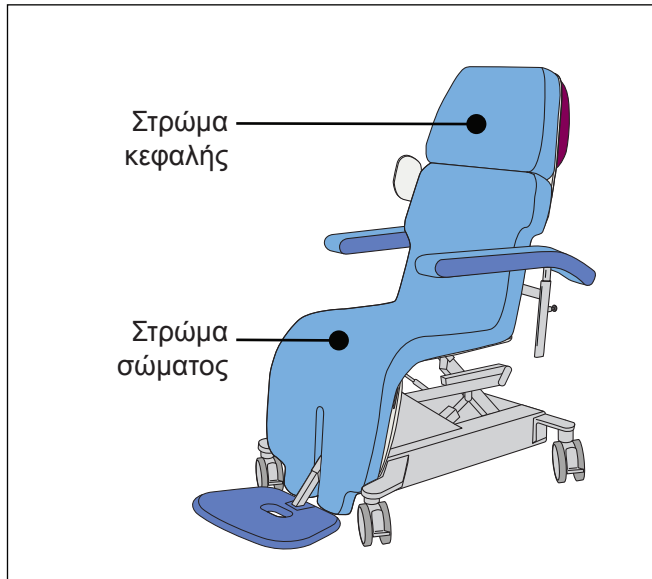


Ιμάντες σύνδεσης στρώματος

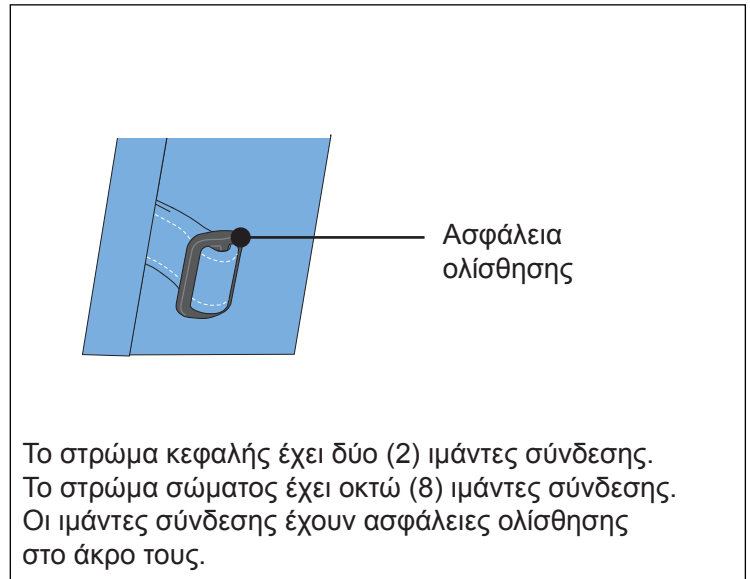

Σημεία σύνδεσης στρώματος

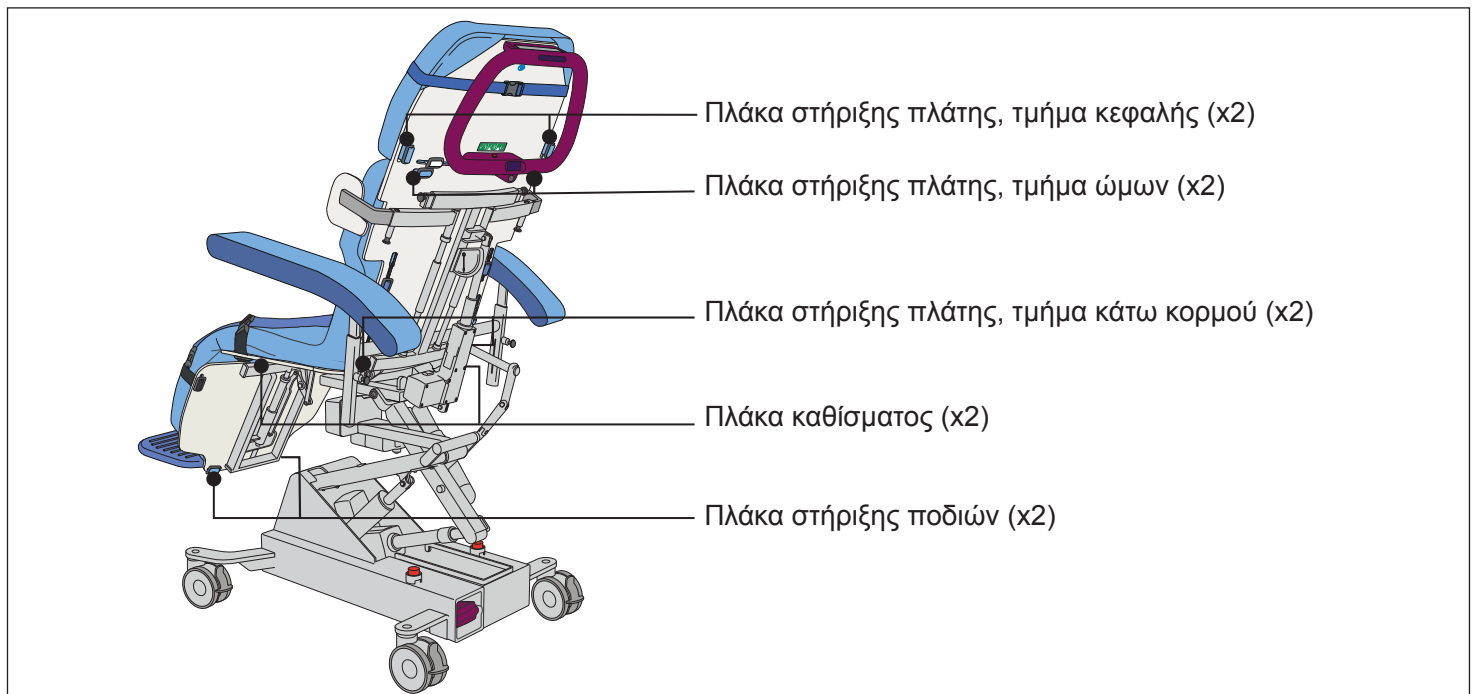

Τοποθέτηση ιμάντα σύνδεσης στρώματος

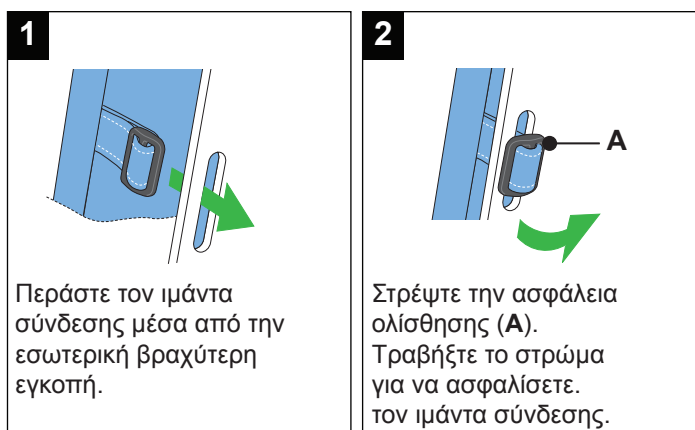

Αφαίρεση ιμάντα σύνδεσης στρώματος

