



경고



눈과 피부 손상을 방지하기 위해 항상 보안경과 장갑을 사용하십시오.

접촉한 경우 충분한 물로 씻어냅니다. 눈이나 피부에 자극이 있으면 의사에게 문의하십시오.

항상 사용 지침 및 소독제 물질 보건 안전 자료를 읽으십시오.

각 환자 사용 간에 세척 및 소독하십시오.

필수 액세서리

- 보호 안경
- 보호 장갑
- 일회용 수건
- 물이 담긴 분무기
- 중성 세제가 들어 있는 분무기
- 승인 받은 소독제가 담긴 분무기
- 보호 플러그
(핸드셋 제어장치 연결 지점)

검증된 세제/소독제

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- 알코올(이소프로판올 70%)
- 하이포아염소산 0,1-0,5%
- 중성 세제

세정

1. Sara Combilizer를 의자 자세(일반 모드)로 배치하십시오.
2. 의자를 인체 공학적인 작업 높이로 조정하십시오.
3. 보호 플러그 또는 핸드셋 제어장치 연결 플러그가 운전 핸들의 연결 지점에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
4. 베개와 모든 안전 벨트를 제거하십시오.
5. 일회용 수건을 물에 적셔 눈에 보이는 얼룩 및 오염물을 제거하십시오.
6. 이동 핸들, 컨트롤 패널 및 핸드셋 제어장치를 포함하여 모든 부품에 세제를 분사하십시오.
7. 베개와 안전 벨트 각각에 세제를 분사하십시오.
8. 새 일회용 수건을 물에 적셔 세제를 모두 제거하십시오.
9. 세제가 제거되지 않는 경우 물을 분사하고 일회용 수건으로 닦아내십시오.
10. 세제가 모두 제거될 때까지 반복하십시오.
11. 모든 부품을 건조시키십시오.

소독

12. 이동 핸들, 컨트롤 패널 및 핸드셋 제어장치를 포함하여 모든 부품에 승인된 소독제를 분사하십시오.
13. 베개와 안전 벨트 각각에 승인된 소독제를 분사하십시오.
14. 병 라벨에 표시된 권장 소독 시간 또는 최소 2분 동안 소독제가 부품에 잔류할 수 있도록 하십시오.
15. 일회용 수건을 사용하여 소독제의 흔적을 모두 닦아내십시오.