



Sara Combilizer

אזהרה



כדי למנוע נזק לעיניים ולעור, השתמש תמיד במשקפי מגן ובכפפות. במקרה של מגע עם העיניים או עם העור, שטוף אותם היטב במים. במקרה של גירויים בעיניים או בעור, פנה לרופא. הקפד לקרוא את ההוראות ואת גיליון בטיחות החומרים של חומר החיטוי.

ניקוי וחיטוי לאחר שימוש בין מטופלים.

חומרי ניקוי/חיטוי מאושרים	אביזרים נחוצים
Arjo Clean •	משקפי מגן •
Arjo General Purpose Disinfectant •	כפפות מגן •
Arjo Disinfectant Cleanser IV •	מטליות חד-פעמיות •
Arjo All Purpose Disinfectant •	בקבוק תרסיס עם מים •
Arjo CenKleen IV •	בקבוק תרסיס עם חומר ניקוי ניטרלי עדין •
אלכוהול (איזופרופנול 70%) •	בקבוק תרסיס עם חומר חיטוי מאושר לשימוש •
נתרן תת-כלורי 0.1-0.5% •	פקק הגנה •
חומר ניקוי ניטרלי עדין •	(עבור נקודת החיבור של השלט הידני)

ניקוי

1. העבר את Sara Combilizer לתנוחת כיסא (מצב רגיל).
2. כוונן את גובה הכיסא לגובה נוח לעבודה.
3. הכנס היטב את פקק ההגנה או פקק המגע של השלט הידני לנקודת החיבור שעל ידית ההובלה.
4. הסר את הכרית ואת כל חגורות הבטיחות.
5. הרטב מטלית חד-פעמית במים והסר כתמים ולכלוך גלויים לעין.
6. רסס חומר ניקוי על כל החלקים כולל ידית ההובלה, לוח הבקרה והשלט הידני.
7. רסס חומר ניקוי על הכרית ועל חגורות הבטיחות בנפרד.
8. הרטב מטלית חד-פעמית חדשה במים ונקה את חומר הניקוי.
9. אם לא ניתן להסיר את חומר הניקוי, רסס במים ונגב במטלית חד-פעמית.
10. חזור על הפעולה עד להסרת חומר הניקוי.
11. הנח לכל החלקים להתייבש.

חיטוי

12. רסס חומר ניקוי מאושר לשימוש על כל החלקים כולל ידית ההובלה, לוח הבקרה והשלט הידני.
13. רסס חומר ניקוי מאושר לשימוש על הכרית ועל חגורות הבטיחות בנפרד.
14. הנח לחומר החיטוי להישאר על החלקים בהתאם לזמן החיטוי המומלץ, כפי שמופיע על הבקבוק, או לפחות 2 דקות.
15. נקה את כל שאריות חומר הניקוי במטלות חד-פעמיות.