

Sara Combilizer



UPOZORENJE



Da biste izbjegli oštećenje očiju i kože, uvijek koristite zaštitne naočale i rukavice.

U slučaju kontakta isperite obilato vodom. U slučaju nadraženosti očju ili kože obratite se liječniku.

Uvijek pročitajte upute za upotrebu i sigurnosno-tehnički list dezinficijensa.

Očistite i dezinficirajte između pacijenata.

Potreban pribor

- Zaštitne naočale
- Zaštitne rukavice
- Ručnici za jednokratnu primjenu
- Raspršivač s vodom
- Boca raspršivala s blagim neutralnim deterdžentom
- Raspršivač s odobrenim dezinficijensom
- Zaštitni jezičac
(za spajanje ručnog upravljača)

Provjereni deterdženti/dezinficijensi

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (izopropanol 70 %)
- Natrijev hipoklorit 0,1 – 0,5 %
- Blagi neutralni deterdžent

Čišćenje

1. Postavite uređaj Sara Combilizer u položaj stolca (normalan način rada).
2. Namjestite visinu stolca na ergonomsku radnu visinu.
3. Umetnите zaštitni jezičac ili kontaktni jezičac ručnog upravljača ispravno u spojnu točku na upravljačkoj ručici.
4. Skinite jastuk i sve sigurnosne pojaseve.
5. Namočite jednokratni ručnik vodom i uklonite sve vidljive mrlje i prljavštinu.
6. Raspršite deterdžent po transportnoj dršci, upravljačkoj ploči i ručnom upravljaču.
7. Raspršite deterdžent zasebno po jastuku i sigurnosnim pojasevima.
8. Namočite novi jednokratni ručnik vodom i uklonite sav deterdžent.
9. Ako deterdžent ne možete ukloniti, pošpricajte vodom i obrišite jednokratnim ručnikom.
10. Ponavljajte dok ne uklonite sav deterdžent.
11. Neka se svi dijelovi posuše.

Dezinfekcija

12. Raspršite odobreni dezinficijens po svim dijelovima, uključujući transportnu dršku, upravljačku ploču i ručni upravljač.
13. Raspršite odobreni dezinficijens zasebno po jastuku i sigurnosnim pojasevima.
14. Ostavite dezinficijens da djeluje na dijelovima prema preporučenom vremenu za dezinfekciju navedenom na bočici ili najmanje 2 minute.
15. Sve tragove dezinficijensa obrišite jednokratnim ručnicima.

