

**VAROVÁNÍ**

Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice.

V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře.

Vždy si přečtěte návod k použití a materiálový bezpečnostní list k dezinfekčnímu prostředku.

Vyčistěte a vydezinfikujte před použitím u dalšího pacienta/klienta.

Potřebné pomůcky

- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice
- Jednorázové utěrky
- Rozprašovací láhev s vodou
- Rozprašovací láhev s jemným neutrálním čisticím prostředkem
- Rozprašovací láhev se schváleným dezinfekčním prostředkem
- Ochranná zátka
(pro připojení ručního ovladače)

Ověřené čisticí/dezinfekční prostředky

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (isopropanol 70%)
- Chlornan sodný 0,1–0,5%
- Jemný neutrální čisticí prostředek

Čištění

1. Zařízení Sara Combilizer přepněte do polohy židle (běžný režim).
2. Výšku židle nastavte na ergonomickou pracovní výšku.
3. Do místa připojení na řídicím madle správně zasuňte buď ochrannou zátku, nebo kryt kontaktu ručního ovladače.
4. Odstraňte polštář a všechny bezpečnostní pásy.
5. Namočte jednorázový ručník do vody a odstraňte viditelné skvrny a nečistotu.
6. Čisticí prostředek nastříkejte na všechny součásti, včetně přepravní rukojeti, ovládacího panelu a ručního ovladače.
7. Nastříkejte čisticí prostředek na polštář a jednotlivé bezpečnostní pásy.
8. Navlhčete novou jednorázovou utěrku vodou a odstraňte veškerý čisticí prostředek.
9. Pokud není možné čisticí prostředek odstranit, postříkejte vodou dotčenou část a otřete ji jednorázovými utěrkami.
10. Postup opakujte, dokud neodstraníte veškerý čisticí prostředek.
11. Nechte všechny díly uschnout.

Dezinfekce

12. Schválený dezinfekční prostředek nastříkejte na všechny součásti, včetně přepravní rukojeti, ovládacího panelu a ručního ovladače.
13. Nastříkejte schválený dezinfekční prostředek na polštář a jednotlivé bezpečnostní pásy.
14. Dezinfekční prostředek nechte působit na částech zařízení podle doporučené doby dezinfekce vyznačené na láhvi, nebo minimálně 2 minuty.
15. Všechny stopy dezinfekčního prostředku setřete jednorázovými utěrkami.

