

Басқару панелі



Тұру режимін белсендіреді.



Қалыпты режимді белсендіреді.



Қалыпты режим - орындықты немесе сырғытқыны жоғарыға жылжытады.

Тұру режимі - сырғытқыны еңкейетін үстел күйіне көтереді.



Қалыпты режим - орындықты немесе сырғытқыны төмен жылжытады.

Тұру режимі - еңкейетін үстелді сырғытқы күйіне түсіреді.



Қалыпты режим - сырғытқыны орындық күйіне өзгертеді.

Тұру режимі - жоқ.



Қалыпты режим - орындық күйінен сырғытқы күйіне өзгертеді.

Тұру режимі - жоқ.



Қалыпты режим - сол жақ көрсеткі - орындықты немесе сырғытқыны көлденең күйге еңкейтеді.

Тұру режимі - жоқ.

Қалыпты режим - оң жақ көрсеткі - орындықты артқа еңкейтеді немесе сырғытқыны Тренделенбург күйіне қайта еңкейтеді.

Тұру режимі - жоқ.



Қалыпты режим - орындықты немесе сырғытқыны солға еңкейтеді.


Тұру режимі - еңкейетін үстелді солға еңкейтеді.




Қалыпты режим - орындықты немесе сырғытқыны оңға еңкейтеді.

Тұру режимі - еңкейетін үстелді оңға еңкейтеді.


Басқару пульті

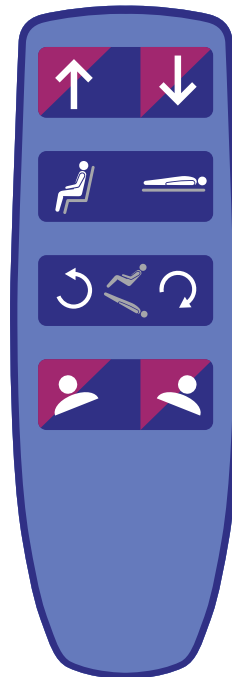


Орындық – жоғары немесе төмен
Сырғытқы – жоғары немесе төмен

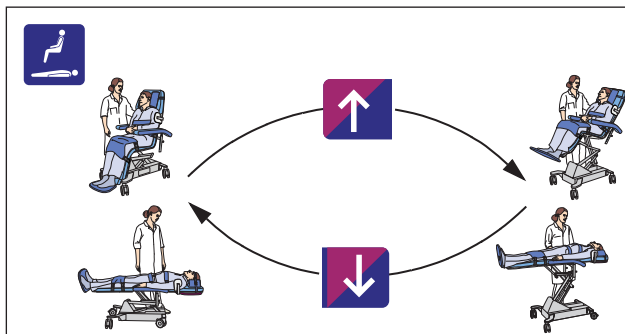


Сырғытқы күйінен еңкейетін үстел күйіне –
Еңкейетін үстел күйінен сырғытқы күйіне

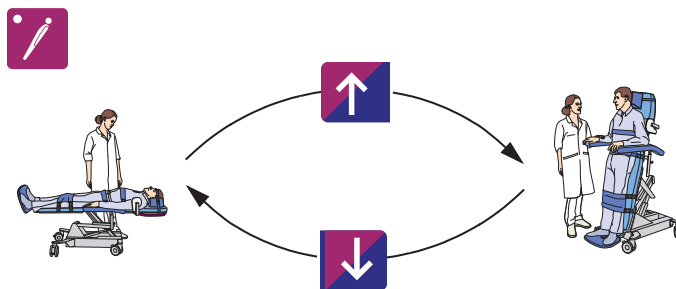


Сырғытқы күйінен орындық күйіне –
Орындық күйінен сырғытқы күйіне

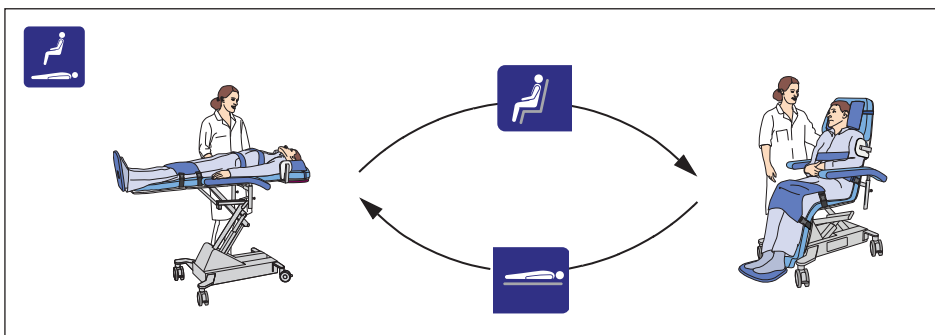

Орындықты артқа еңкейту –
Орындықты жоғары бұру

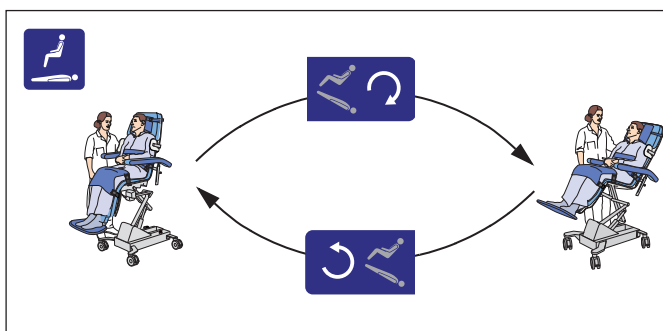

Сырғытқы күйінен Тренделенбург күйіне –
Тренделенбург күйінен сырғытқы күйіне

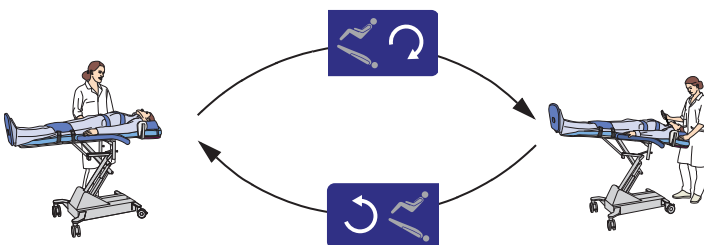

Солға немесе оңға еңкейту

