

Sara Combilizer



Ovládací panel



Aktivuje **režim vestoje**.



Aktivuje **normální režim**.



Normální režim – posouvá židli nebo lehátko nahoru.
Režim vestoje – zvedá lehátko do polohy nakloněného stolu.



Normální režim – posouvá židli nebo lehátko dolů.
Režim vestoje – snižuje nakloněný stůl do polohy lehátka.



Normální režim – přeměna z polohy lehátka do polohy židle.
Režim vestoje – není k dispozici.



Normální režim – přeměna z polohy židle do polohy lehátka.
Režim vestoje – není k dispozici.



Normální režim – levá šipka – naklání židli nebo lehátko nahoru do horizontální polohy.

Režim vestoje – není k dispozici.

Normální režim – pravá šipka – naklání židli dozadu nebo naklání lehátko dozadu do polohy Trendelenburg.

Režim vestoje – není k dispozici.




Normální režim – naklání židli nebo lehátko doleva.
Režim vestoje – naklání nakloněný stůl doleva.




Normální režim – naklání židli nebo lehátko doprava.
Režim vestoje – naklání nakloněný stůl doprava.


Ruční ovladač

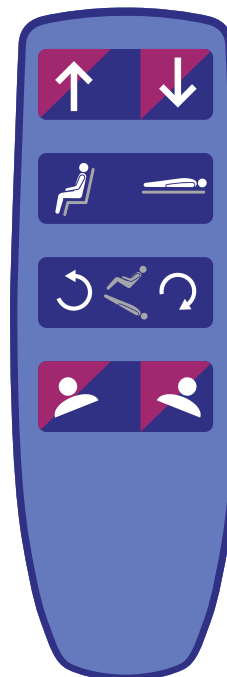


Židle – nahoru nebo dolů
Lehátka – nahoru nebo dolů

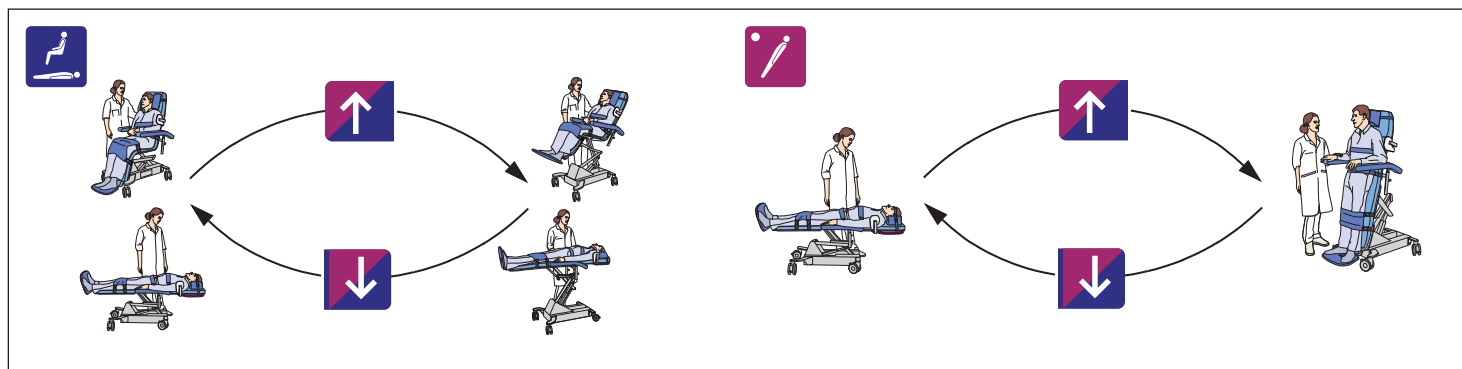

Přeměna lehátka na židli –
Přeměna židle na lehátko

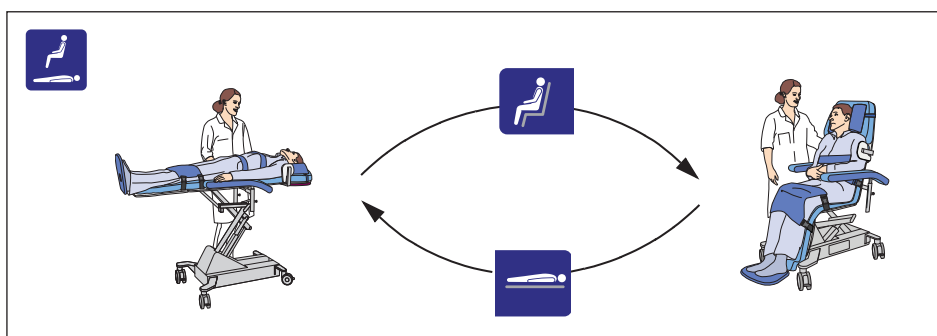

Naklonění židle dozadu –
Vzpřímení židle

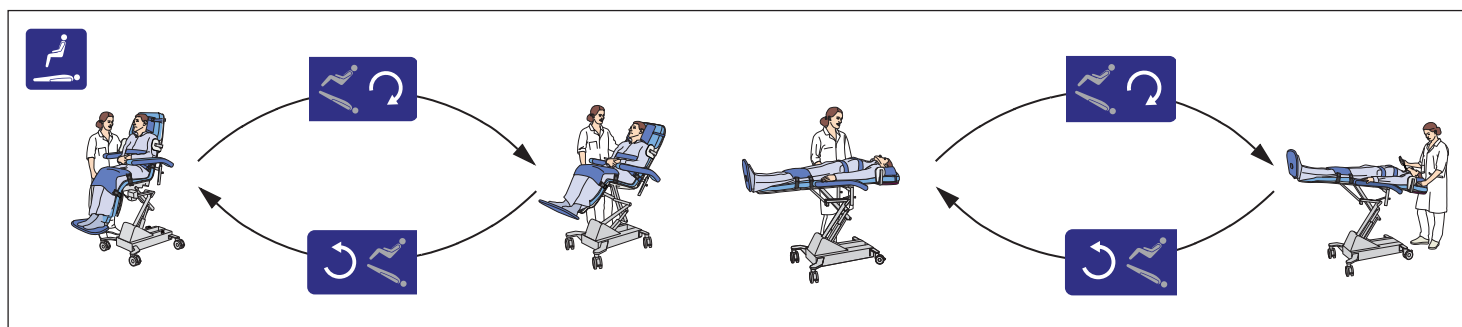

Přeměna lehátka na polohu Trendelenburg –
Přeměna polohy Trendelenburg na lehátko

Naklonění doleva nebo doprava

