


# Sara Combilizer



## コントロールパネル

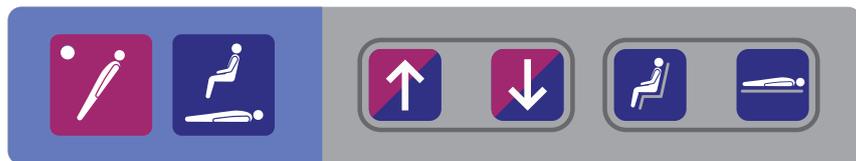

立位モードをアクティブにします。



標準モードをアクティブにします。



標準モード - チェアまたはストレッチャーを上を移動させます。  
立位モード - ストレッチャーをティルトテーブル姿勢まで上昇させます。



標準モード - チェアまたはストレッチャーを下を移動させます。  
立位モード - ティルトテーブルをストレッチャー姿勢まで下降させます。



標準モード - ストレッチャーからチェア姿勢に変更します。  
立位モード - 利用できません。



標準モード - チェアからストレッチャー姿勢に変更します。  
立位モード - 利用できません。



標準モード - 下矢印 - 水平位置までチェアまたはストレッチャーを上方に傾斜させます。  
立位モード - 利用できません。  
標準モード - 右矢印 - チェアを後方に傾斜させるか、ストレッチャーを傾斜させてトレンドレムブルグに戻します。  
立位モード - 利用できません。




標準モード - チェアまたはストレッチャーを左に傾斜させます。  
立位モード - ティルトテーブルを左に傾斜させます。




標準モード - チェアまたはストレッチャーを右に傾斜させます。  
標準モード - ティルトテーブルを右に傾斜させます。

## ハンドコントロール

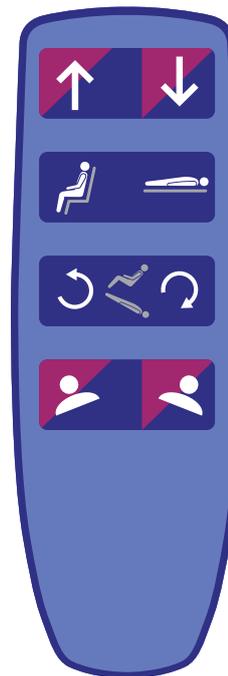


チェア - 上または下  
ストレッチャー - 上または下

ストレッチャーからティルトテーブル -  
ティルトテーブルからストレッチャー

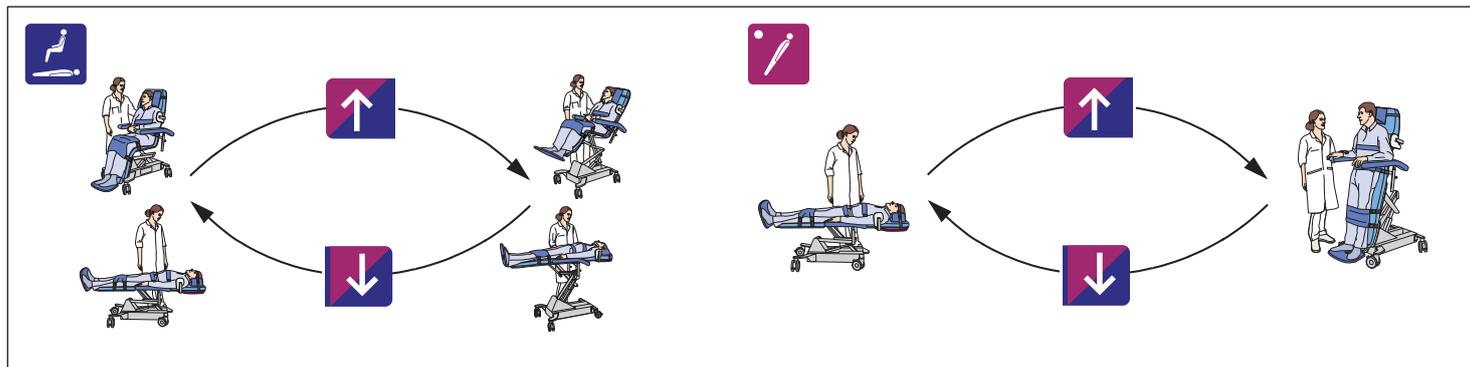


ストレッチャーからチェア -  
チェアからストレッチャー

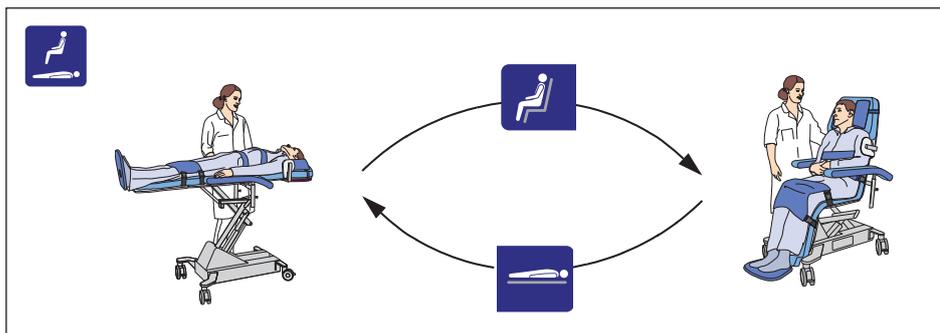

チェアを後方に傾斜 -  
チェアを直立まで傾斜

ストレッチャーからトレンドンブルグ -  
トレンドンブルグからストレッチャー

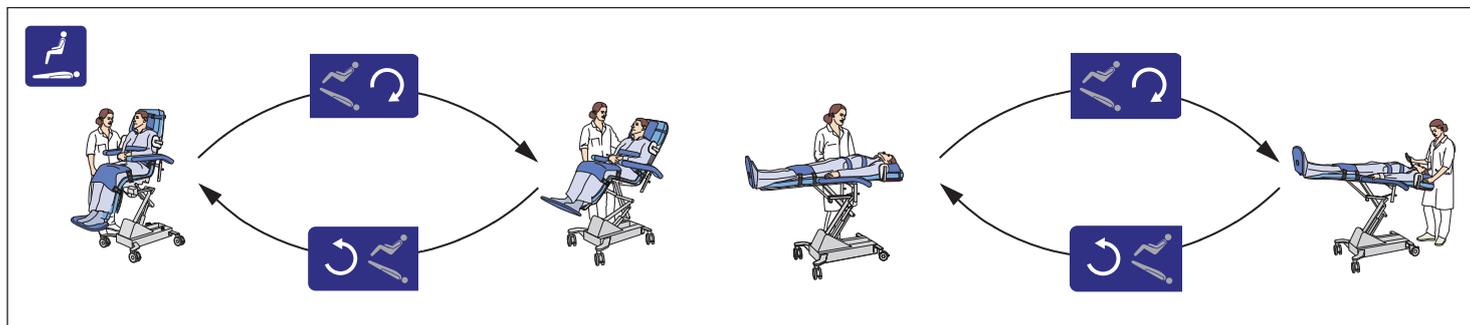

左ティルトまたは右ティルト

