


Miranti


Transfert du patient à partir du lit

1

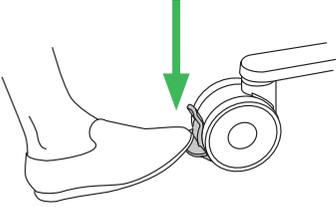


Bloquer les freins du lit, le cas échéant.
Rabattre la barrière de lit du côté du personnel soignant.
Déshabiller le patient.

2

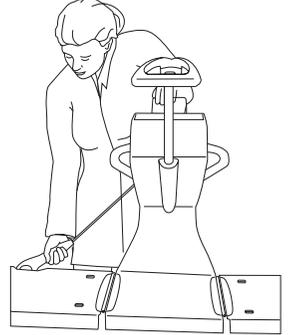


Fixer la corde à crochet sur le côté du brancard élévateur d'hygiène qui servira de dossier.

3

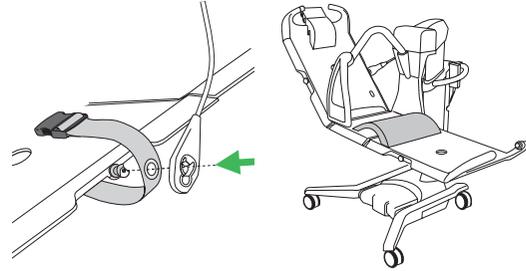

Attacher les sangles de sécurité si nécessaire.
Mettre en place le coussin de cuisses.

4

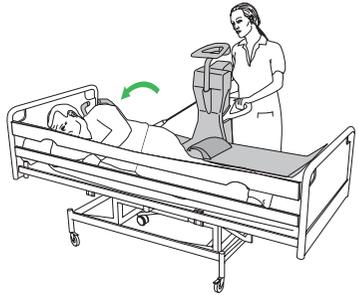


Tourner le patient sur le côté opposé au brancard élévateur d'hygiène.
Déplacer le brancard élévateur d'hygiène sur le lit aussi près que possible du patient.
Abaisser le brancard élévateur d'hygiène sur le lit.

5




Serrer les freins

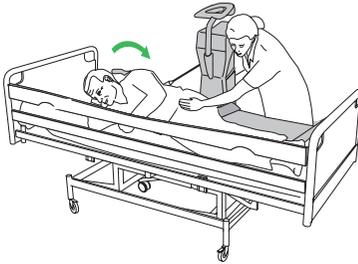

Serrer le frein central sur le brancard élévateur d'hygiène.
Retourner le patient sur le dos sur la civière.

6

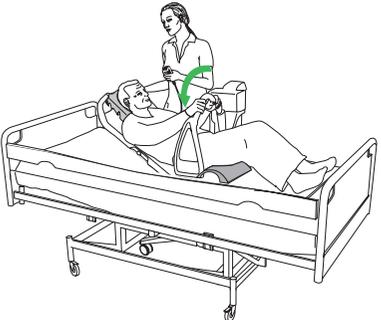


Abaisser la poignée de sécurité du patient et la protection latérale.
Mettre en place l'appui-tête.
Ajuster le dossier dans une position confortable pour le patient.

7




Relâcher les freins

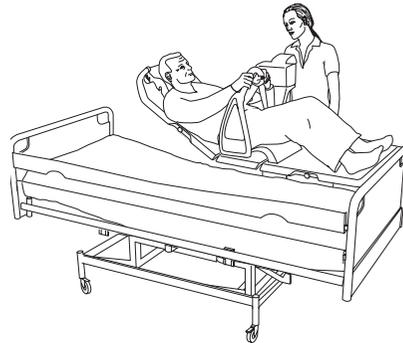

Relâcher le frein central sur le brancard élévateur d'hygiène.
Relever le brancard élévateur d'hygiène et le retirer du lit.


Transfert du patient vers le lit

1

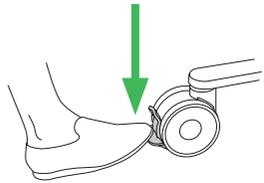

Bloquer les freins du lit, le cas échéant.
Rabattre la barrière de lit du côté du personnel soignant.

2

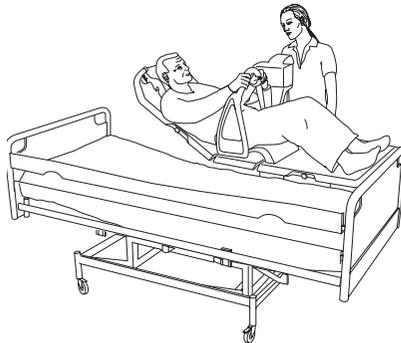


Régler la hauteur du brancard élévateur d'hygiène et le déplacer le plus loin possible sur le lit.

3




Serrer les freins

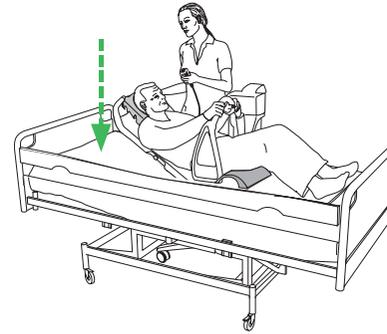

Serrer le frein central sur le brancard élévateur d'hygiène.
Abaisser le brancard élévateur d'hygiène sur le lit.
Abaisser le dossier jusqu'à ce que la civière soit horizontale.

4

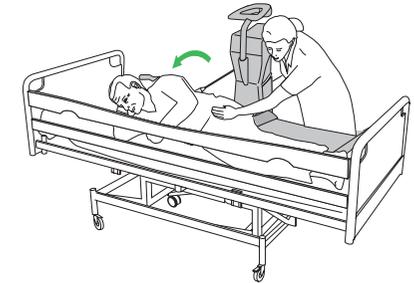


Remonter la poignée de sécurité du patient et la protection latérale.
Retirer les sangles de sécurité.
Tourner le patient sur le côté opposé au brancard élévateur d'hygiène.

5



Relâcher les freins

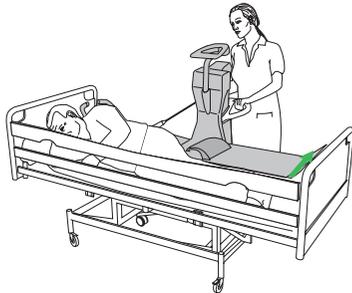

Relever la civière du lit.
Relâcher le frein central sur le brancard élévateur d'hygiène.
Éloigner le brancard élévateur d'hygiène du lit.

Donner le bain au patient



Lire les instructions séparées de l'équipement de bain.

