



Μεταφορά ασθενούς από την κλίνη

1

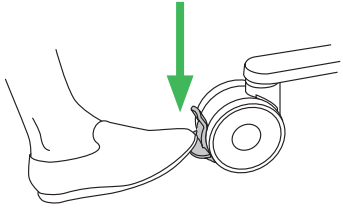


Εφαρμόστε τα φρένα στην κλίνη, εφόσον απαιτείται.
Διπλώστε προς τα κάτω το κιγκλίδωμα της κλίνης στην πλευρά του φροντιστή. Ξεντύστε τον ασθενή.

2

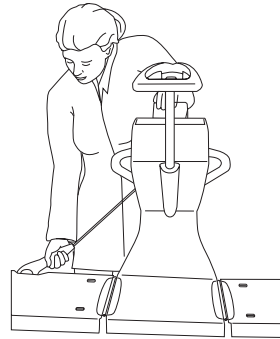


Συνδέστε το σχοινί με άγκιστρο στο πλάι του ανυψούμενου τροχήλατου φορείου μπάνιου που θα λειτουργήσει ως πλάτη.

3

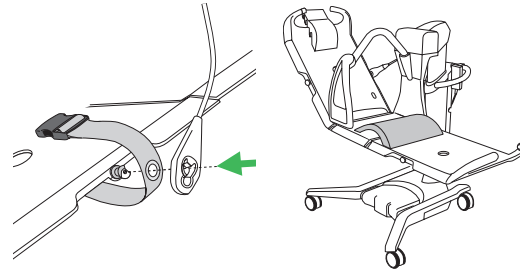

Συνδέστε τις ζώνες ασφαλείας, εφόσον απαιτείται. Τοποθετήστε το μαξιλάρι υποστήριξης μηρών στη θέση του.

4

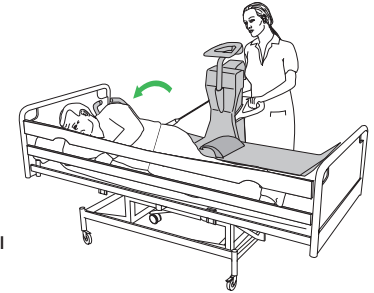


Στρέψτε τον ασθενή ώστε να ακουμπάει στο πλάι και να κοιτάει από την αντίθετη κατεύθυνση του ανυψούμενου τροχήλατου φορείου μπάνιου. Μετακινήστε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου πάνω από την κλίνη όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασθενή. Χαμηλώστε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου στην κλίνη.

5




Εφαρμόστε τα φρένα

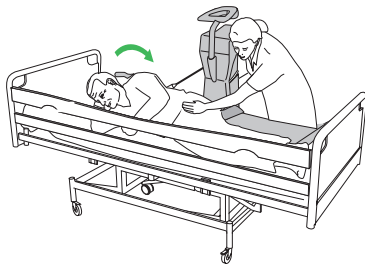

Εφαρμόστε το κεντρικό φρένο στο ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου. Στρέψτε τον ασθενή ώστε να ακουμπάει με την πλάτη του στο φορείο.

6

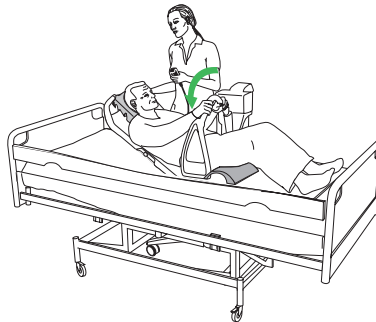


Χαμηλώστε τη λαβή ασφαλείας ασθενούς και το πλευρικό προστατευτικό. Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής στη θέση του. Προσαρμόστε την πλάτη σε άνετη θέση για τον ασθενή.

7




Απελευθερώστε τα φρένα

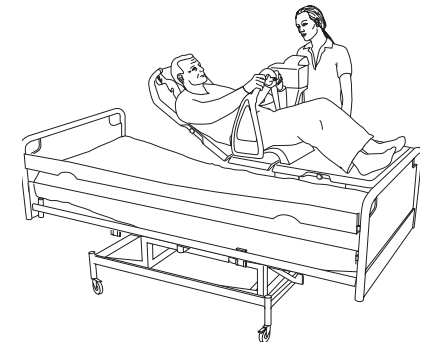

Απελευθερώστε το κεντρικό φρένο στο ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου. Ανυψώστε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου και τραβήξτε το μακριά από την κλίνη.


Μεταφορά ασθενούς από την κλίνη

1

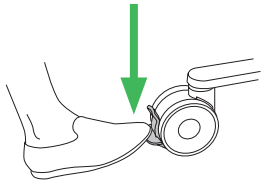

Εφαρμόστε τα φρένα στην κλίνη, εφόσον απαιτείται. Διπλώστε προς τα κάτω το κιγκλίδωμα της κλίνης στην πλευρά του φροντιστή.

2

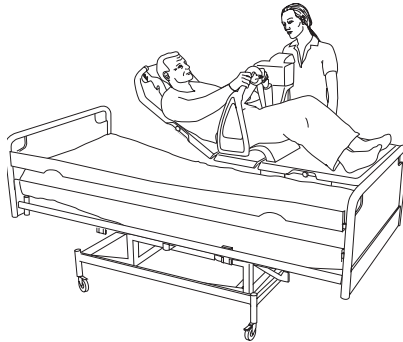


Προσαρμόστε το ύψος του ανυψούμενου τροχήλατου φορέου μπάνιου και μετακινήστε το όσο περισσότερο γίνεται πάνω από την κλίνη.

3




Εφαρμόστε τα φρένα

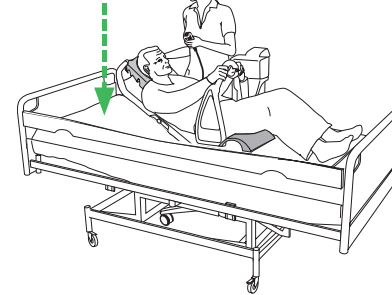

Εφαρμόστε το κεντρικό φρένο στο ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου. Χαμηλώστε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου στην κλίνη. Χαμηλώστε το στήριγμα πλάτης μέχρι το φορείο να είναι επίπεδο.

4

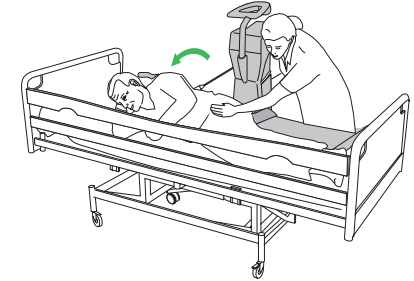


Ανυψώστε τη λαβή ασφαλείας ασθενούς και το πλευρικό προστατευτικό. Αφαιρέστε τις ζώνες ασφαλείας. Στρέψτε τον ασθενή ώστε να ακουμπάει στο πλάι και να κοιτάει από την αντίθετη κατεύθυνση του ανυψούμενου τροχήλατου φορέου μπάνιου.

5



Απελευθερώστε τα φρένα

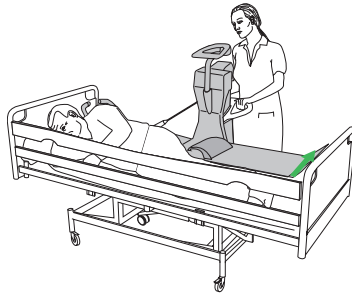

Ανυψώστε το φορείο και απομακρυνέτε το από την κλίνη. Απελευθερώστε το κεντρικό φρένο στο ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου. Τραβήξτε το ανυψούμενο φορείο μπάνιου μακριά από την κλίνη.

Μπάνιο ασθενούς



Διαβάστε τις ξεχωριστές οδηγίες για τον εξοπλισμό μπάνιου.


1




Ανυψώστε το φορείο ώστε να απομακρυνθεί από την άκρη της μπανιέρας.

2

Χειροκίνητη μετάδοση κίνησης

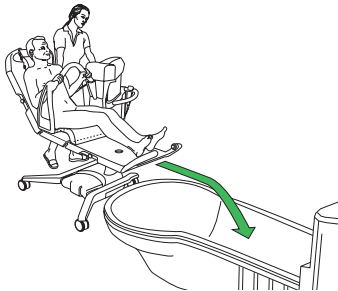

Διάταξη μετάδοσης ισχύος

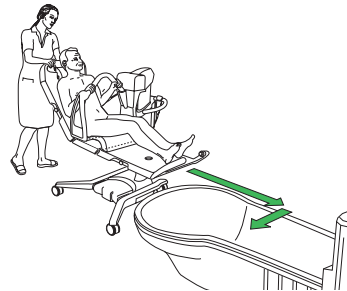

Με χειροκίνητη μετάδοση κίνησης: Μετακινήστε τον ασθενή επάνω από την μπανιέρα. Με ηλεκτρική μετάδοση κίνησης: Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική μετάδοση κίνησης και μετακινήστε τον ασθενή κατά μήκος της μπανιέρας. Σπρώξτε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου προς τα πλάγια πάνω από την μπανιέρα.

3




Εάν είναι εφικτό, προσαρμόστε το ύψος της μπανιέρας ώστε να διασφαλίσετε την εργονομική θέση του ασθενούς. Προσαρμόστε το ύψος του φορείου και την πλάτη. Το φορείο πρέπει να ακουμπά στο κάτω μέρος της μπανιέρας.

4




Κάντε τον ασθενή μπάνιο.

5

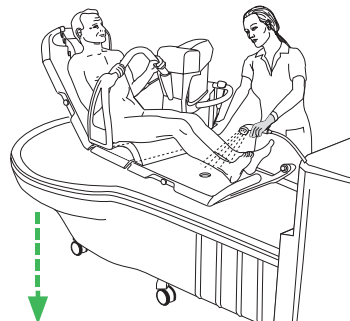

Ανοίξτε την αποστράγγιση. Ανυψώστε την πλάτη. Χαμηλώστε την μπανιέρα. Κάντε ντους στον ασθενή.

6

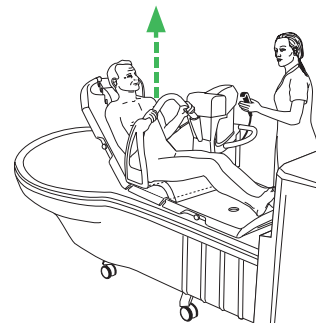

Στεγνώστε τον ασθενή και το κάτω μέρος του φορείου. Ανυψώστε το φορείο ώστε να απομακρυνθεί από την άκρη της μπανιέρας.

7



Τραβήξτε το ανυψούμενο τροχήλατο φορείο μπάνιου μακριά από την μπανιέρα.

