



## Trasferimento del paziente dal letto

1

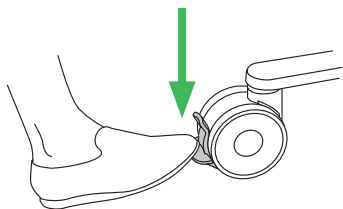


Inserire i freni del letto, se applicabile.  
Abbassare la spondina del letto sul lato dell'assistente.  
Svestire il paziente.

2

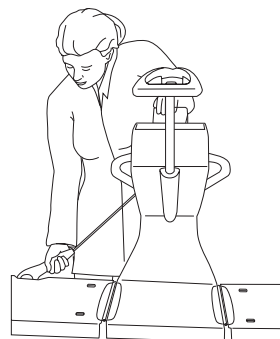


Fissare la fune di sollevamento al lato del sollevapazienti igienico a barella che fungerà da schienale.

3

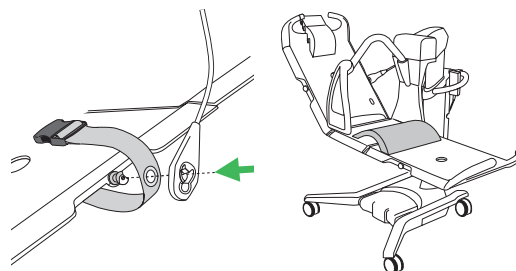

Fissare le cinture di sicurezza, se necessario.  
Posizionare il cuscino di supporto per le gambe.

4

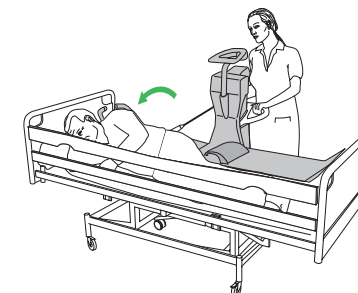


Ruotare il paziente sul fianco, in modo da rivolgerlo verso il lato opposto al sollevapazienti igienico a barella. Posizionare il sollevapazienti igienico a barella sul letto, il più vicino possibile al paziente. Abbassare il sollevapazienti igienico a barella sul letto.

5




Inserire i freni

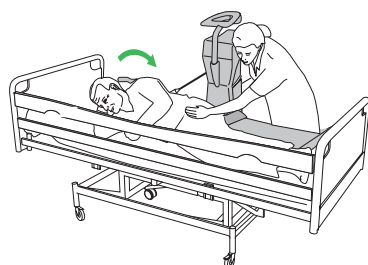

Inserire il freno centrale sul sollevapazienti igienico a barella.  
Ruotare il paziente sulla schiena sulla barella.

6

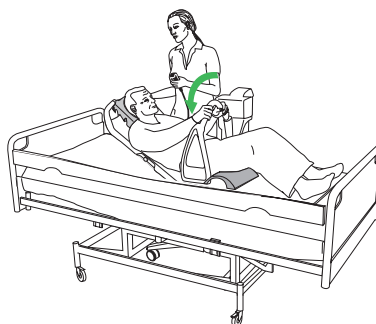


Abbassare l'impugnatura di sicurezza per il paziente e la spondina.  
Posizionare il poggiatesta.  
Regolare lo schienale a un'altezza confortevole per il paziente.

7




Disinserire i freni

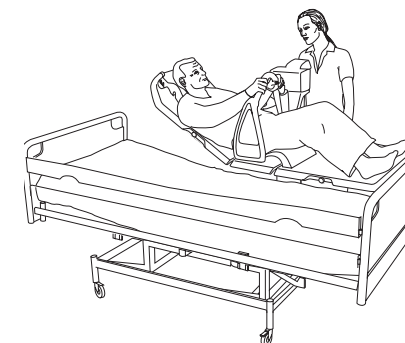

Disinserire il freno centrale sul sollevapazienti igienico a barella.  
Sollevare il sollevapazienti igienico a barella e allontanarlo dal letto.


## Trasferimento del paziente al letto

1

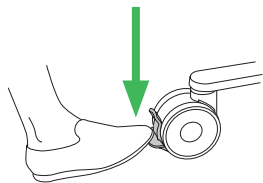

Inserire i freni del letto, se applicabile.  
Abbassare la spondina del letto sul lato dell'assistente.

2

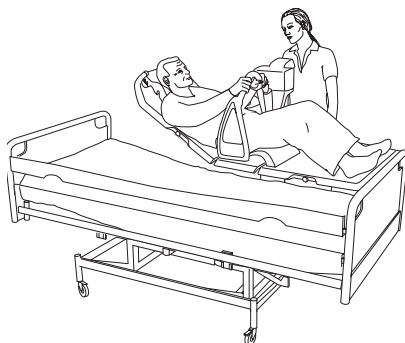


Regolare l'altezza del sollevapazienti igienico a barella e spostarlo il più possibile sopra il letto.

3




Inserire i freni

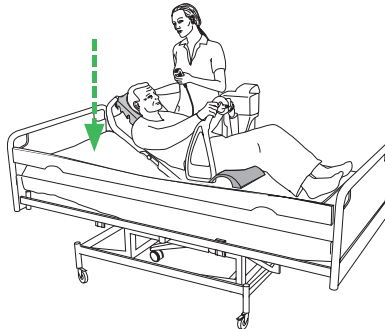

Inserire il freno centrale sul sollevapazienti igienico a barella.  
Abbassare il sollevapazienti igienico a barella sul letto.  
Abbassare lo schienale fino a che la barella non è orizzontale.

4

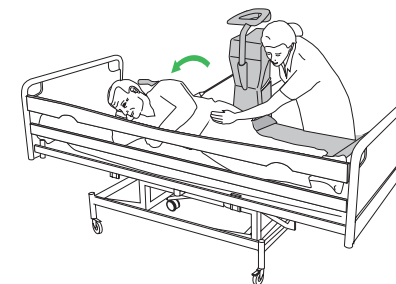


Alzare l'impugnatura di sicurezza per il paziente e la spondina.  
Rimuovere le cinture di sicurezza.  
Ruotare il paziente sul fianco, in modo da rivolgerlo verso il lato opposto al sollevapazienti igienico a barella.

5



Disinserire i freni

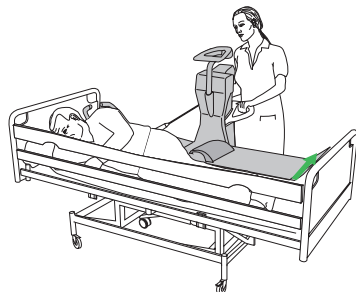

Rimuovere la barella dal letto.  
Disinserire il freno centrale sul sollevapazienti igienico a barella.  
Allontanare il sollevapazienti igienico a barella dal letto.

## Effettuare il bagno al paziente



Leggere le istruzioni separate per l'apparecchiatura per il bagno.

1




Sollevare la barella oltre il bordo della vasca da bagno.

2

Guida manuale



Power Drive

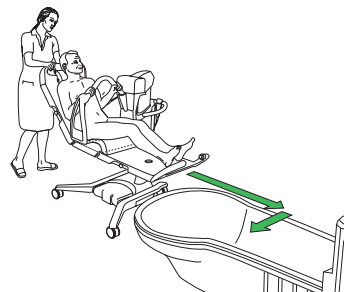

Con la guida manuale: spostare il paziente sopra la vasca da bagno.  
Con Power Drive: attivare Power Drive e spostare il paziente lungo il lato della vasca da bagno. Spingere il sollevapazienti igienico a barella sopra la vasca.

3




Se possibile, regolare l'altezza della vasca per garantire una postura ergonomica.  
Se necessario regolare l'altezza e lo schienale della barella. La barella deve essere appoggiata sul fondo della vasca.

4




Effettuare il bagno al paziente.

5

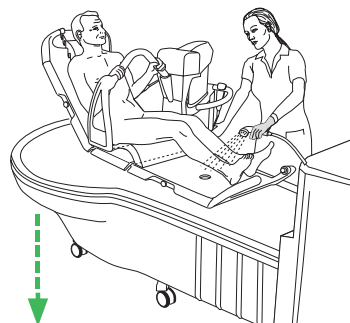

Aprire lo scarico.  
Sollevare lo schienale.  
Abbassare la vasca.  
Fare la doccia al paziente

6

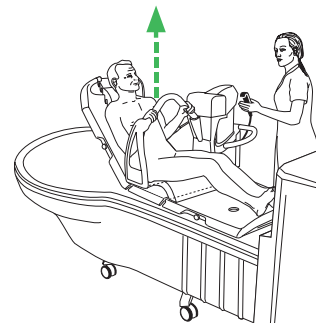

Asciugare il paziente e la parte inferiore della barella.  
Sollevare la barella oltre il bordo della vasca da bagno

7



Allontanare il sollevapazienti igienico a barella dalla vasca da bagno.

