


# Miranti


## Hastanın yataktan transferi

1

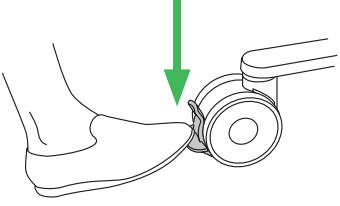


Varsa yatağın frenlerini etkinleştirin.  
Drenaj askısını sağlık personelinin  
durduğu tarafa katlayın.  
Hastanın giysilerini çıkarın.

2

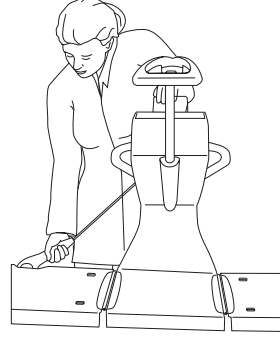


Kancalı halatı, lifli banyo sedyesinin  
sırt desteği görevi görecekt tarafına  
takın.

3

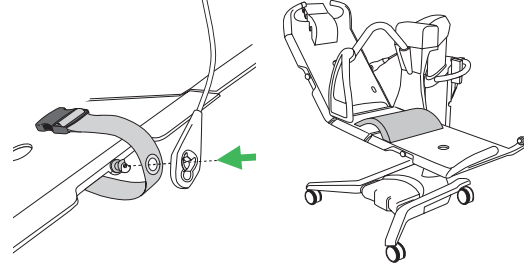

Gerekirse güvenlik kemerlerini takın.  
Bacak destek yastığını yerine koyun.

4

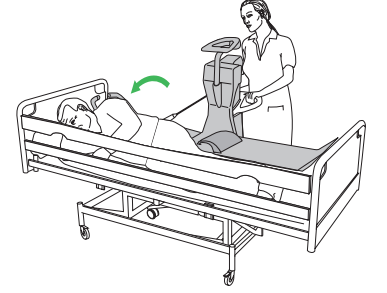


Hastayı, sırtı lifli banyo sedyesine dönük  
olacak şekilde yan yatırın.  
Lifli banyo sedyesini hastaya mümkün  
olduğunca yakın bir şekilde yatağın  
üzerine getirin.  
Lifli banyo sedyesini yatağın üzerine alçaltın.

5




Frenleri  
etkinleştirin

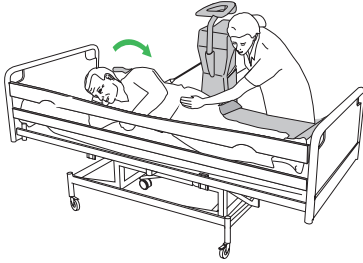

Lifli banyo sedyesindeki merkez freni etkinleştirin.  
Hastayı, sedyede sırtüstü yatırın.

6

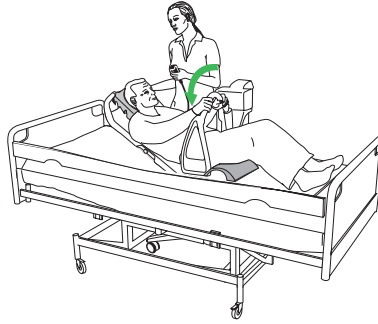


Hasta güvenlik kolunu ve yan korkuluğu indirin.  
Baş desteğini yerine takın.  
Sırt desteğini hasta için rahat bir pozisyona alçaltın.

7




Frenleri devre  
dışı bırakın

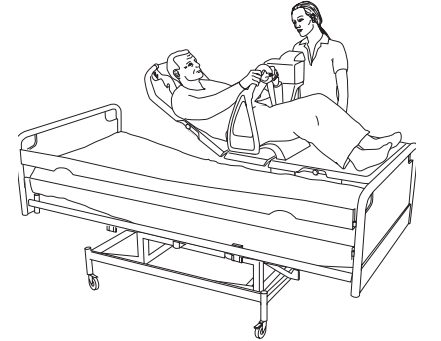

Lifli banyo sedyesindeki merkez freni devre dışı bırakın.  
Lifli banyo sedyesini yükseltin ve yataktan uzağa çekin.


## Hastanın yatağa transferi

1

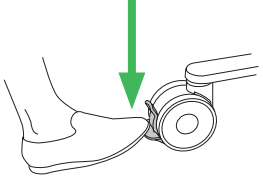

Varsa yatağın frenlerini etkinleştirin. Drenaj askısını sağlık personelinin durduğu tarafa katlayın.

2

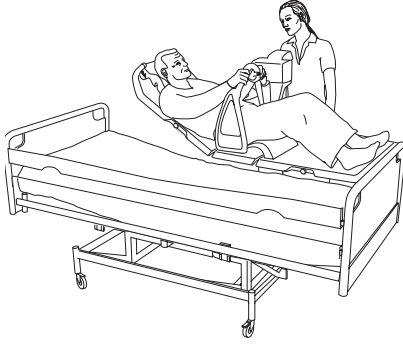


Liftli banyo sedyesinin yüksekliğini ayarlayın ve sedyeyi yatağın üzerinde mümkün olan en yüksek konuma getirin.

3




Frenleri etkinleştirin

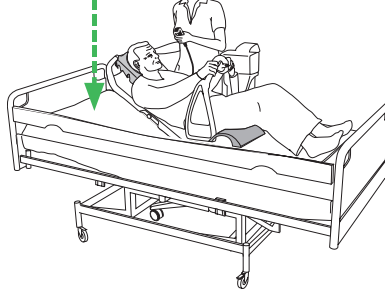

Liftli banyo sedyesindeki merkez freni etkinleştirin. Liftli banyo sedyesini yatağın üzerine alçaltın. Sedyeye düz olana kadar sırt desteğini alçaltın.

4

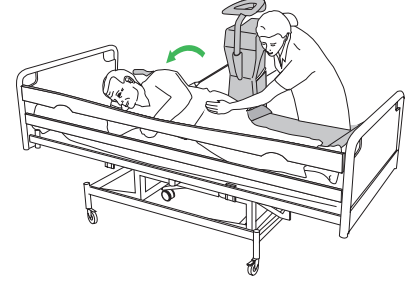


Hasta güvenlik kolunu ve yan korkuluğu kaldırın. Güvenlik kemerlerini çıkarın. Hastayı, sırtı liftli banyo sedyesine dönük olacak şekilde yan yatırın.

5



Frenleri devre dışı bırakın

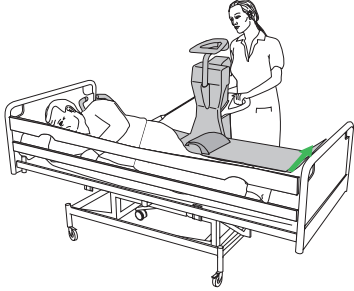

Sedyeyi yataktan yukarı kaldırın. Liftli banyo sedyesindeki merkez freni devre dışı bırakın. Liftli banyo sedyesini yataktan uzağa çekin.

## Hastaya banyo yaptırma



Banyo ekipmanınızın talimatlarını okuyun.


1




Sedeyi yükselterek küvetin kenarından kurtarın.

2

Manuel sürüş

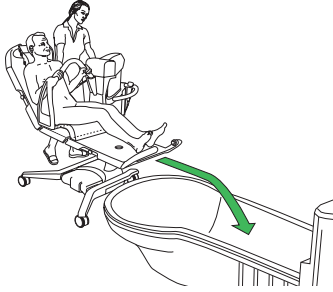

Elektrikli sürüş

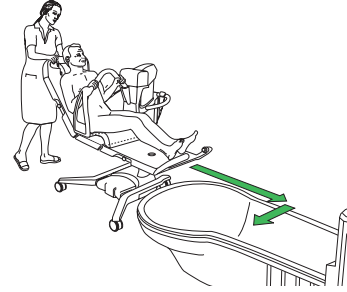

Manuel sürüş ile: Hastayı banyonun üzerine getirin.  
Elektrikli sürüş ile: Elektrikli sürüşü devreye alın ve hastayı banyonun kenarına getirin. Liftli banyo sedyesini küvet üzerinde yana itin.

3




Mümkünse, küvet yüksekliğini ergonomik duruş sağlayacak şekilde ayarlayın. Sedye ve sırt desteği yüksekliğini ayarlayın. Sedye küvet tabanına dayanmalıdır.

4




Hastayı yıkayın.

5

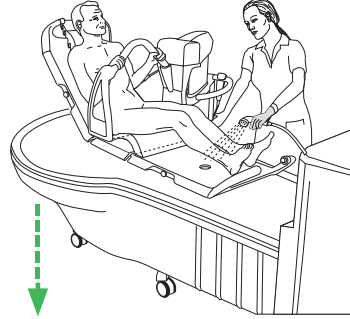


Drenajı açın.  
Sırt desteğini yükseltin.  
Küveti alçaltın.  
Hastaya duş aldırın.

6

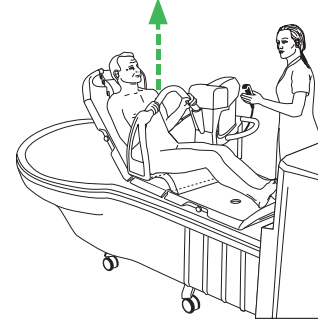

Hastayı ve sedyenin alt tarafını kurulayın.  
Sedeyi yükselterek küvetin kenarından kurtarın.

7

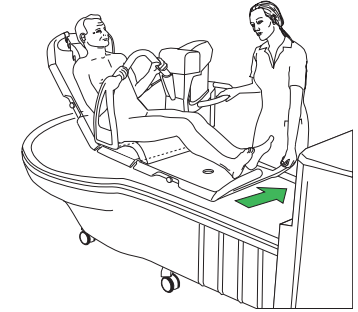

Liftli banyo sedyesini banyodan uzağa çekin.



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsengatan 10  
211 20 Malmö, Sweden  
www.arjo.com