

Maxi 500

Zvednutí z polohy vsedě




1



Umístěte vak okolo pacienta/klienta tak, aby základna vaku byla mírně pod kostrčí.

U vaku s opěrkou hlavy ji natáhněte až k temeni hlavy pacienta/klienta.

2

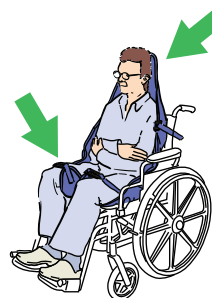

Oba stehenní popruhy vaku podsuňte pod stehno pacienta/klienta tak, aby dosahovaly na vnitřní části stehen.
Vak položte naplocho na nohu pacienta/klienta tak, aby nebyl překroucený ani shrnutý.

Přistupte se zvedákem k pacientovi/klientovi.

Závěsné rameno umístěte do polohy pro sed.


Závěsné rameno umístěte do úrovně ramen nebo o trochu níže.

Závěsné rameno umístěte dostatečně blízko pro připojení ramenních popruhů.

3




Klipový vak

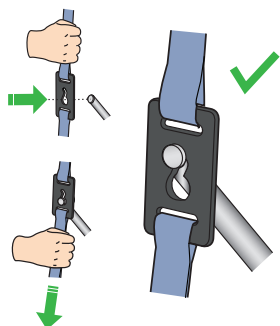

Připojte klip a zajistěte kolíkem před zvedáním pacienta/klienta.




Poutkový vak

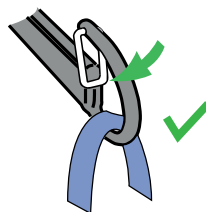

Na hák zavěste připojovací poutko.
Všechny bezpečnostní západky musí být zajištěné a popruh vaku musí být celý uvnitř háku.

4

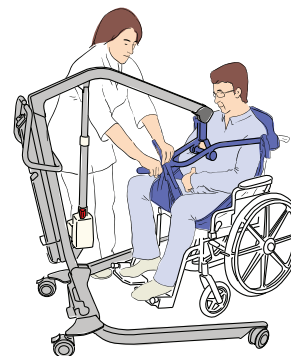

Poutka nebo klipy vaku připojte k závěsnému ramenu. Nejprve připněte ramenní popruhy a poté nožní.

Při použití závěsného ramena s DPS a klipového vaku závěsné rameno nakloňte, aby bylo možné připnout nožní klipy.

Zvedněte pacienta/klienta a poté jej u místě do částečně zakloněné polohy vhodné pro přesun. Pokračujte přesunem pacienta/klienta.

Spustíte pacienta/klienta na nové místo. Jakmile má tělesná váha pacienta/klienta plnou oporu, odpojte poutka nebo klipy.

Zvednutí z lůžka

1



Převalte pacienta/klienta na bok. Vak přehněte napůl a položte na lůžko podél zad pacienta/klienta.

U vaku s opěrkou hlavy ji natáhněte až k temeni hlavy pacienta/klienta.

2



Přetočte pacienta/klienta na vak a poté jej přetočte do opačného směru, abyste mohli natáhnout složenou část vaku.

Přistupte se zvedákem k pacientovi/klientovi.


Závěsné rameno umístěte do zakloněné polohy.

Závěsné rameno umístěte dostatečně blízko pro připojení ramenních popruhů.

3




Klipový vak

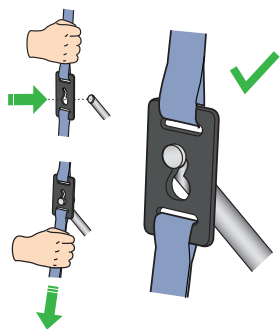

Připojte klip a zajistěte kolíkem před zvedáním pacienta/klienta.



Poutkový vak

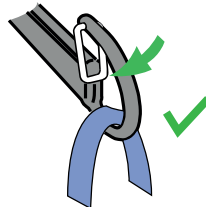

Na hák zavěste připojovací poutko. Všechny bezpečnostní západky musí být zajištěné a popruh vaku musí být celý uvnitř háku.

4



Poutka nebo klipy vaku připněte k závěsnému ramenu. Nejprve připněte ramenní popruhy a poté nožní.

Zvedněte pacienta/klienta do částečně zakloněné polohy vhodné pro přesun. Pokračujte přesunem pacienta/klienta.

Spusťte pacienta/klienta na nové místo. Jakmile má tělesná váha pacienta/klienta plnou oporu, odpojte poutka nebo klipy.

Zvednutí z podlahy

1



Převalte pacienta/klienta na bok. Vak přehněte napůl a položte na podlahu podél zad pacienta/klienta.

U vaku s opěrkou hlavy ji natáhněte až k temeni hlavy pacienta/klienta.

2



Přetočte pacienta/klienta na vak a poté jej přetočte do opačného směru, abyste mohli natáhnout složenou část vaku.


Přisuňte zvedák k pacientovi/klientovi otevřenou částí podvozku.

Závěsné rameno umístěte dostatečně blízko pro připojení ramenních popruhů.

3




Klipový vak

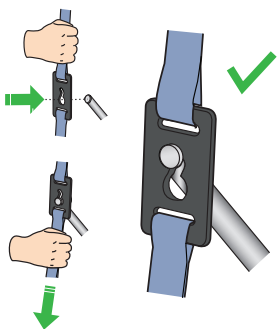

Připojte klip a zajistěte kolíkem před zvedáním pacienta/klienta.




Poutkový vak

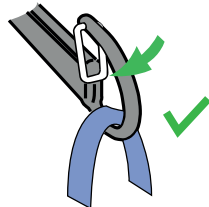

Na hák zavěste připojovací poutko. Všechny bezpečnostní západky musí být zajištěné a popruh vaku musí být celý uvnitř háku.

4

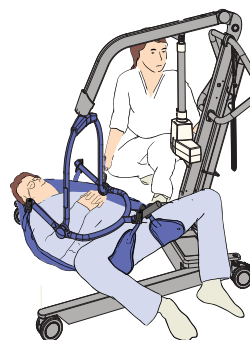

Poutka nebo klipy vaku připněte k závěsnému ramenu. Nejprve připněte ramenní popruhy a s otevřenou částí vaku a podpurným rámem nakloněnými dolů k ramenům připojte klipy nebo poutka stehenních popruhů.

Zvedněte pacienta/klienta do částečně zakloněné polohy vhodné pro přesun. Pokračujte přesunem pacienta/klienta.

Spust'te pacienta/klienta na nové místo. Jakmile má tělesná váha pacienta/klienta plnou oporu, odpojte poutka nebo klipy.

