



Maxi 500

رفع المريض من وضعية الجلوس

اسحب كل حزام من حزامي الساق أسفل الفخذ بحيث يبرز عند الجزء الداخلي من الفخذ. ضع الحمالة بشكل مسطح أمام ساق المريض دون طيها أو رفعها.

اقتراب من المريض بالرافعة.

ضع عارضة المباعدة في وضع الجلوس.

ضع عارضة المباعدة عند مستوى الكتف أو أدنى منه قليلاً.

ضع عارضة المباعدة بحيث تكون قريبة بما يكفي لإتاحة توصيل أحزمة الكتف.



٢

ضع الحمالة حول المريض بحيث تستقر قاعدة الحمالة أسفل عظمة الذنب قليلاً.

بالنسبة إلى الحمالة المزودة بدعامة للرأس، قم بتمديدها حتى الجزء العلوي من رأس المريض.



١

قم بتوصيل حلقات الحمالة أو المشابك بعارضة المباعدة. اربط أحزمة الكتف ثم أحزمة الساق.

بالنسبة إلى عارضة المباعدة بنظام الوضع الديناميكي (DPS) والحمالة المزودة بمشبك، يتعين إمالة عارضة المباعدة لربط مشابك الساق.

ارفع المريض وضعه في وضع شبه مائل لنقله. تابع عملية النقل.


قم بخفض المريض فوق الموضع الجديد. عندما يكون وزن الجسم مدوماً بالكامل، افصل المشابك أو الحلقات.

قم بربط المشبك وإحكام إغلاقه في العروة قبل رفع المريض.




٤

الحمالة المزودة بحلقة

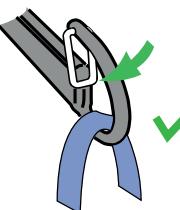

ضع حلقة التوصيل على الخطاف. تأكد من أن مزاجي الأمان مغلقة وأن الحزام داخل الخطاف بشكل كامل.

الحمالة المزودة بمشبك

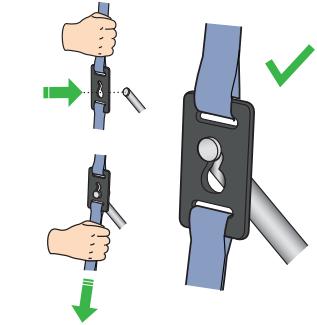

قم بربط المشبك وإحكام إغلاقه في العروة قبل رفع المريض.

٣

قم بدحرجة المريض إلى الحمالة ثم قم بلفه قليلاً في الاتجاه المعاكس بحيث يمكن فرد الجزء الذي تم طيه من الحمالة.

اقرب من المريض بالرافعة.

ضع عارضة المباعدة في وضع مائل.

ضع عارضة المباعدة بحيث تكون قريبة بما يكفي لإتاحة توصيل أحزمة الكتف.



٢

قم بدحرجة المريض على جانبه. قم بطي الحمالة من المنتصف ووضعها على السرير بمحاذاة ظهر المريض.

بالنسبة إلى الحمالة المزودة بدعامة للرأس، قم بتمديدها حتى الجزء العلوي من رأس المريض.



١

قم بتوصيل حلقات الحمالة أو المشابك بعارضة المباعدة. اربط أحزمة الكتف ثم أحزمة الساق.


ارفع المريض في وضع شبه مائل لنقله. تابع عملية النقل.

قم بخفض المريض فوق الموقع الجديد. عندما يكون وزن الجسم مدعوماً بالكامل، افصل المشابك أو الحلقات.




٤

الحمالة المزودة بحلقة !

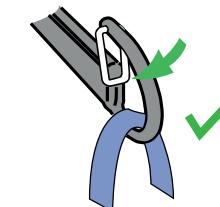

ضع حلقة التوصيل على الخطاف. تأكد من أن مزاليج الأمان مغلقة وأن الحزام داخل الخطاف بشكل كامل.

الحمالة المزودة بمشبك !

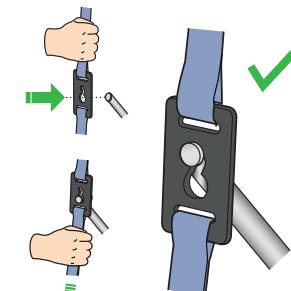

قم بربط المشبك وإحكام إغلاقه في العروة قبل رفع المريض.

قم بدحرجة المريض إلى الحمالة ثم قم بلفه قليلاً في الاتجاه المعاكس بحيث يمكن فرد الجزء الذي تم طيه من الحمالة.

اقرب من المريض بالرافعة بحيث يكون الجانب المفتوح في اتجاه المريض.

ضع عارضة المباعدة بحيث تكون قريبة بما يكفي لإتاحة توصيل أحزمة الكتف.



٢

قم بدحرجة المريض على جانبه. قم بطyi الحمالة من المنتصف وضعها على الأرض بمحاذاة ظهر المريض.

بالنسبة إلى الحمالة المزودة بدعامة للرأس، قم بتمدیدها حتى الجزء العلوي من رأس المريض.



١

قم بتوصيل حلقات الحمالة أو المشابك بعارضة المباعدة. وصل أحزمة الكتف، وعند توجيه الجزء المفتوح من الحمالة وإطار الدعم لأسفل باتجاه الكتفين، وصل مشابك أو حلقات حزام الساق.


ارفع المريض في وضع شبه مائل لنقله.
تابع عملية النقل.

قم بخفض المريض فوق الموقع الجديد.
عندما يكون وزن الجسم مدعوماً بالكامل، افصل المشابك أو الحلقات.




٤

الحمالة المزودة بحلقة !

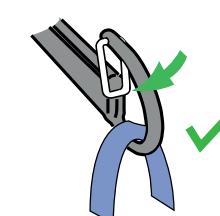

ضع حلقة التوصيل على الخطاف.
تأكد من أن مزاليج الأمان مغلقة وأن الحزام داخل الخطاف بشكل كامل.

الحمالة المزودة بمشبك !

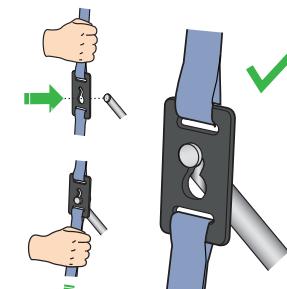

قم بربط المشبك وإحكام إغلاقه في العروة
قبل رفع المريض.