

# Maxi 500



## Sollevamento dalla posizione seduta

1



Posizionare il corsetto attorno al paziente affinché la base del corsetto si trovi leggermente sotto il coccige.

Se si tratta di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2



Far passare ogni cinghia per le gambe sotto le cosce del paziente affinché fuoriesca dal lato interno. Posizionare il corsetto piatto contro la gamba del paziente, avendo cura di non attorcigliarlo o arricciarlo.


Avvicinare il paziente al sollevapazienti.

Collocare la barra di sollevamento in posizione seduta.


Posizionare la barra di sollevamento all'altezza o subito sotto il livello delle spalle.

Posizionare la barra di sollevamento in modo che sia sufficientemente vicina per poter fissare le cinghie delle spalle.

3

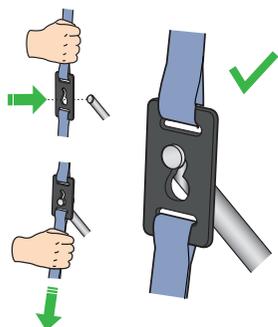

Fissare e assicurare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.

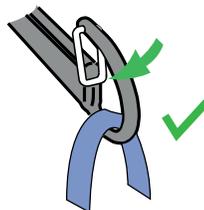

Inserire l'asola di fissaggio nel gancio. Assicurarsi che le chiusure di sicurezza siano chiuse e che la cinghia del corsetto sia completamente all'interno del gancio.

4



Agganciare le asole o le clip del corsetto alla barra di sollevamento. Fissare prima le cinghie delle spalle, poi quelle delle gambe.

Se la barra di sollevamento è dotata di Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS) e corsetto a clip, inclinarla per fissare le clip delle gambe.

Sollevare il paziente in posizione semi-reclinata per iniziare il trasferimento. Procedere al trasferimento.

Raggiunto il punto di arrivo, abbassare il paziente. Quando il peso del corpo è completamente sostenuto, staccare le asole o le clip.

## Sollevamento dal letto

1



Ruotare il paziente su un fianco. Piegarlo il corsetto a metà e collocarlo sul letto parallelamente alla schiena del paziente.

Se si tratta di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2



Riportare il paziente in posizione supina sul corsetto e girarlo sul fianco opposto in modo da raddrizzare la parte piegata del corsetto.

Avvicinare il paziente al sollevapazienti.


Collocare la barra di sollevamento in posizione reclinata.

Posizionare la barra di sollevamento in modo che sia sufficientemente vicina per poter fissare le cinghie delle spalle.

3




Corsetto a clip

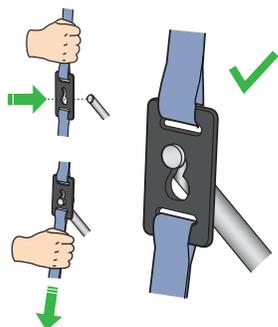

Fissare e assicurare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.



Corsetto ad asola

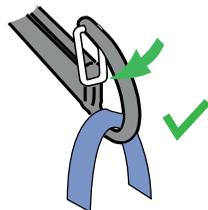

Inserire l'asola di fissaggio nel gancio. Assicurarsi che le chiusure di sicurezza siano chiuse e che la cinghia del corsetto sia completamente all'interno del gancio.

4



Fissare le asole o le clip del corsetto alla barra di sollevamento. Fissare prima le cinghie delle spalle, poi quelle delle gambe.

Sollevare il paziente in posizione semi-reclinata per iniziare il trasferimento. Procedere al trasferimento.

Raggiunto il punto di arrivo, abbassare il paziente. Quando il peso del corpo è completamente sostenuto, staccare le asole o le clip.

## Sollevamento dal pavimento

1



Ruotare il paziente su un fianco. Piegare il corsetto a metà e collocarlo sul pavimento parallelamente alla schiena del paziente.

Se si tratta di un corsetto con supporto per la testa, assicurarsi che arrivi oltre la testa del paziente.

2



Riportare il paziente in posizione supina sul corsetto e girarlo sul fianco opposto in modo da raddrizzare la parte piegata del corsetto.


Avvicinarsi al paziente con il sollevapazienti, con la parte aperta dello chassis.

Posizionare la barra di sollevamento in modo che sia sufficientemente vicina per poter fissare le cinghie delle spalle.

3




Corsetto a clip

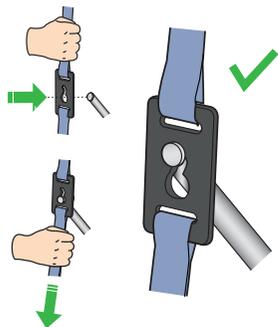

Fissare e assicurare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.



Corsetto ad asola

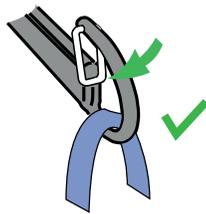

Inserire l'asola di fissaggio nel gancio. Assicurarsi che le chiusure di sicurezza siano chiuse e che la cinghia del corsetto sia completamente all'interno del gancio.

4



Fissare le asole o le clip del corsetto alla barra di sollevamento. Fissare le cinghie delle spalle con la parte aperta del corsetto, facendo in modo che il telaio di supporto sia rivolto in basso verso le spalle, quindi agganciare le clip o le asole delle cinghie delle gambe.

Sollevare il paziente in posizione semi-reclinata per iniziare il trasferimento. Procedere al trasferimento.

Raggiunto il punto di arrivo, abbassare il paziente. Quando il peso del corpo è completamente sostenuto, staccare le asole o le clip.

