

MaxxAir ETS



Instalación del sistema de colchón de reposición

1

Nivele la cama y active los frenos.
Retire el colchón existente.

2

Retire las correas de almacenamiento.
Coloque las correas de almacenamiento en la bolsa y guárdelas en la zona del fuelle de rotación.

3

Coloque el colchón en la estructura de cama con el juego de mangueras en el piecero de la cama.

4

Asegure el colchón a la estructura de cama utilizando correas.


5

Coloque la funda del colchón y asegúrese de que:

- la funda del colchón no esté arrugada;
- los cierres situados en el lado izquierdo de la cabeza del paciente y el lado derecho del piecero de la funda están bien conectados debajo del colchón.


Si las conexiones de las mangueras están conectadas, no es necesario desconectarlas.

6

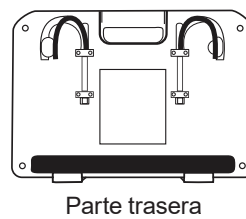


Asegure la unidad de terapia al piecero de la cama extendiendo los brazos.

7

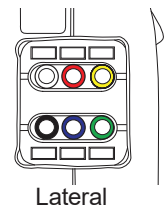


Acople los conectores de las mangueras a la unidad de terapia. Conecte las mangueras a las tomas de manera que coincidan los colores.

8

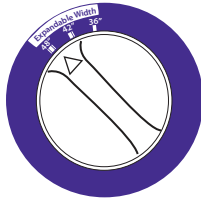

Ajuste la anchura del colchón con el mando de expansión.
Ajuste a 36 pulgadas: sin expansión.
Ajuste a 42 pulgadas: la superficie del lado izquierdo del paciente se expande.
Ajuste a 48 pulgadas: la superficie de los dos lados del paciente se expande.

9

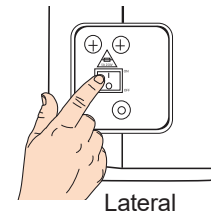

Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación con conexión a tierra.

Pase el cable por debajo de la estructura de cama.

Encienda el dispositivo, el LED de «AIR OFF» (aire desactivado) situado en el panel frontal también se enciende.

Preparación para el traslado de pacientes *no ambulatorios*


1



En el panel frontal:

Pulse el botón «AIR ON» (aire activado). El LED de «AIR ON» se vuelve verde y la unidad de terapia se pone en marcha.

2

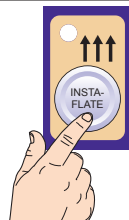

Pulse el botón de INSTAFLATE para que el inflado sea más rápido.
Espere entre cuatro y cinco minutos para que el colchón se infle por completo.


3

Espere hasta que la superficie se haya inflado totalmente.

Compruebe que todos los frenos estén activados.

Ajuste la altura de la cama para la transferencia o la colocación del paciente.

4

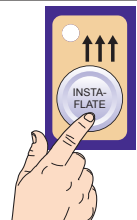

Pulse el botón de INSTAFLATE para que el inflado sea más rápido.

Levante y bloquee las barandillas laterales y asegúrese de que los accesorios de colocación estén bien colocados.



Ajuste la altura de la cama al nivel más bajo.

Preparación para el traslado de pacientes *ambulatorios*

Suba o baje a los pacientes ambulatorios cuando la unidad esté desinflada.

- Compruebe que todos los frenos estén activados.
- Ajuste la altura de la cama al nivel más bajo.
- Con la ayuda de un cuidador, debe colocar al paciente ambulatorio en la posición correcta para subirlo por un lado de la cama.

RCP
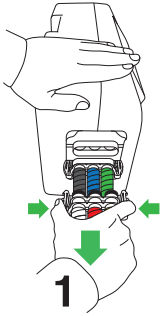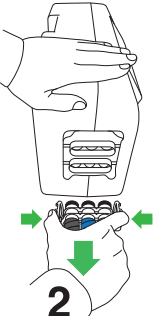
<div data-bbox="65 456 103 510">1</div>  <div data-bbox="359 456 397 510">2</div>  <p>Coloque la mano con firmeza sobre la unidad de terapia y desconecte los dos juegos de mangueras.</p>	<div data-bbox="804 456 842 510">2</div> <p>Inicie la RCP. El peso del cuerpo del paciente y el proceso de la RCP desinflan el colchón.</p>	<div data-bbox="1176 456 1214 510">3</div> <p>Después de realizar una RCP y una vez que el paciente esté clínicamente estable, vuelva a conectar el juego de mangueras y restablezca la configuración original del control de comodidad. Suba las barandillas laterales.</p>
--	--	---