

Si raccomanda di pulire e disinfettare *Maxi 500* e gli accessori prima utilizzarli su un altro paziente e con una frequenza minima di almeno una volta al giorno.

Prestare particolare attenzione alle parti con maggior probabilità di essere toccate, quali:

- Pulsantiera di controllo
- Scatola di controllo
- Gruppo batterie
- Impugnatura del sollevapazienti
- Barra di sollevamento

Istruzioni per la pulizia

1. Utilizzare un panno umido imbibito con una soluzione di acqua calda e detergente.

ATTENZIONE

Non usare mai un panno bagnato sulla scatola di controllo, sul supporto della batteria o il gruppo batterie: questa azione potrebbe causare problemi di corrosione dei componenti elettrici.

Se si asciuga il sollevapazienti con un getto d'aria calda, la temperatura non deve superare gli 80 °C (176 °F). Non usare solventi a base di petrolio o simili: questi prodotti potrebbero danneggiare le parti in plastica.

Istruzioni per la disinfezione

2. Utilizzare un panno umido imbibito con una soluzione di acqua calda e disinfettante.

