

ขอแนะนำว่าควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Maxi 500 และอุปกรณ์เสริมระหว่างการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละราย หรืออย่างน้อยวันละครั้ง

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับชิ้นส่วนที่มีแนวโน้มถูกสัมผัสมากที่สุด เช่น

- ตัวควบคุมที่ด้ามจับ
- กล้องควบคุม
- ชุดแบตเตอรี่
- ด้ามจับลิฟต์ยก
- คานยึด

การทำความสะอาด

1. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นที่เติมน้ำยาทำความสะอาดแล้วบิดหมาด

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ผ้าเปียกบนกล้องควบคุม ฐานรองแบตเตอรี่ หรือชุดแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าเกิดความร้อน หากใช้เครื่องเป่าลมร้อนเพื่อเป่าลิฟต์ยกให้แห้ง ต้องไม่ให้อุณหภูมิเกิน 80°C (176°F) อย่าใช้ตัวทำละลายที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียมหรือสิ่งที่คล้ายกัน เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย

ฆ่าเชื้อ

2. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นที่เติมสารฆ่าเชื้อแล้วบิดหมาด