


Suihku- ja desinfiointipaneeli

Suihkuta potilas

1




Kytke jarrut.

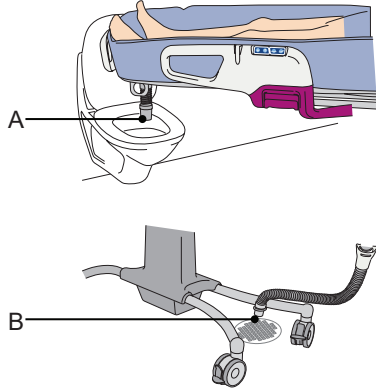

Siirrä potilas suihku- ja desinfiointipaneelin luokse.
(A) - Aseta tyhjennysaukko WC:n tai kaatoaltaan päälle, tai
(B) - Aseta tyhjennysputken pää lattiakaivon päälle.
Kytke jarrut.

2

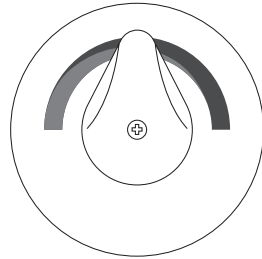

Aseta tarvittava lämpötila.

3




Palovammojen vaara.



Nosta suihkukahva ja suuntaa se potilaasta poispäin. Tunnustele veden lämpötilaa paljaalla kädellä. Säädä virtausta painamalla suihkukahvaa.

4

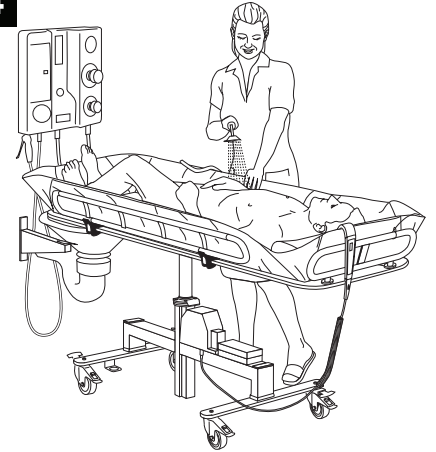

Suihkuta potilas.


Suihkutuolin tai -vaunun puhdistus ja desinfiointi

1



Pue päällesi suojakäsineet ja -lasit.


2

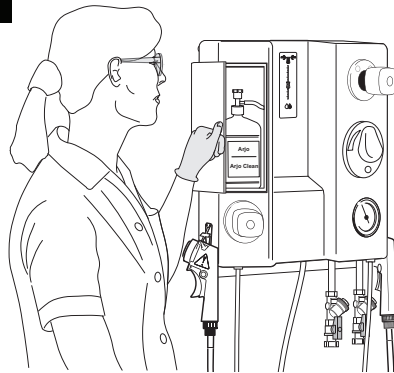

Avaa paneelin ovi ja tarkista desinfiointiaineen määrä pullossa.


3

⚠ Älä desinfioi potilaan lähellä.

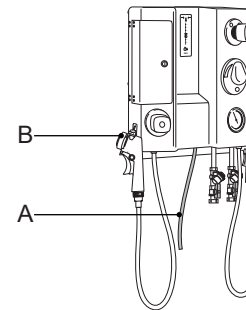


Tarkista, että letku (A) on liitetty imuun. Irrota desinfiointisuihkukahva (B) kourusta.

4

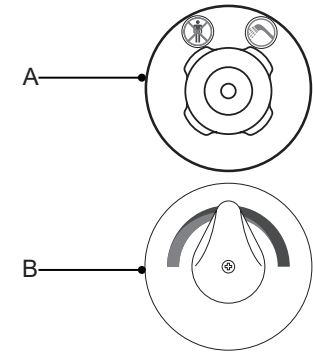


Avaa desinfiointivirtaus suurimpaan asetukseen (A). Aseta lämpötila mahdollisimman pieneksi (B).

5

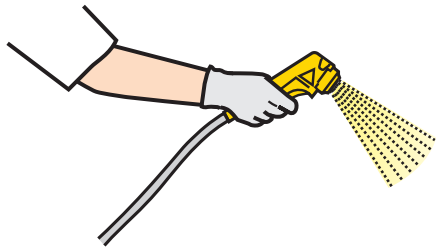


Suihkuta desinfiointiainetta suihkutulin tai -vaunun päälle.

6

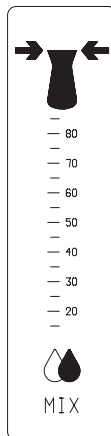

Tarkista desinfiointiaineen sekoitussuhde virtausmittarista ja säädä tarvittaessa (katso käyttöohje).

7

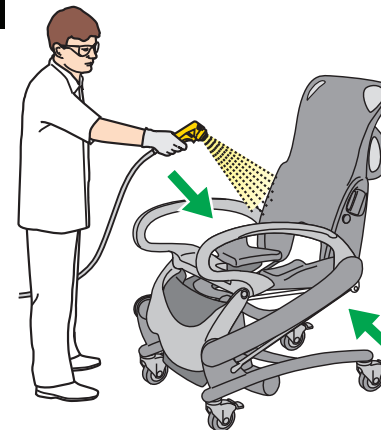

Desinfioi suihkutuli tai -vaunu.

