


# Zuhany és fertőtlenítő panel

## Zuhanyozza le a beteget

1




Kapcsolja be a fékeket.

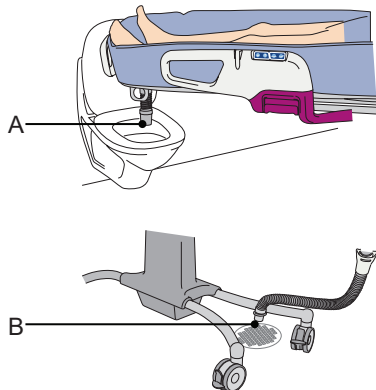

Vigye a beteget a zuhany- és fertőtlenítőpanel mellé.  
(A) – Helyezze a vízelvezetőt a toalettre vagy a mosdókagylóra, vagy  
(B) – Helyezze a vízelvezetőt a padló lefolyójára.  
Kapcsolja be a fékeket.

2

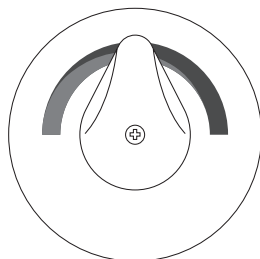


Állítsa be a szükséges hőmérsékletet.

3




Fennáll a forrázás veszélye.

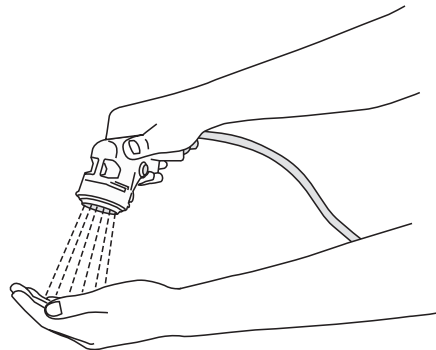

Húzza ki a zuhanykezelőt, és fordítsa el a betegtől. Ellenőrizze a víz hőmérsékletét pusztá kézzel. Nyomja meg a zuhanykezelőt, és állítsa be az áramlást.


4

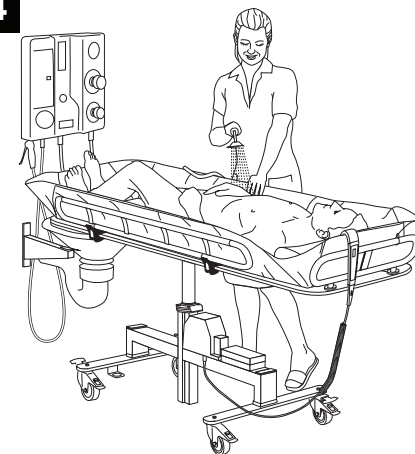

Zuhanyozza le a beteget.


## A zuhanyszék vagy -kocsi tisztítása és fertőtlenítése

1

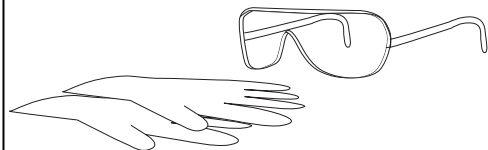

Vegye fel a védőkesztyűt és a védőszemüveget.

2

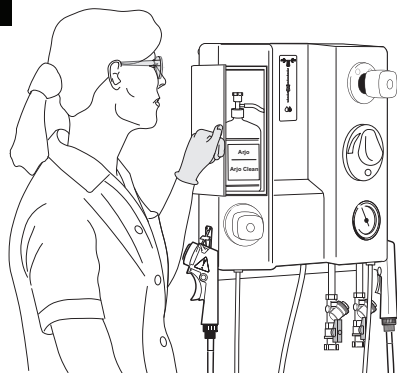


Nyissa ki a panel ajtaját és ellenőrizze, hogy a palackban van-e fertőtlenítőszer.

3




Ne fertőtlenítsen a beteg közelében.

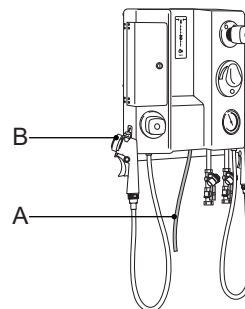

Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a tömlő (A) a szívórészhez. Vegye le a fertőtlenítő szórófejet (B) az akasztóról.

4

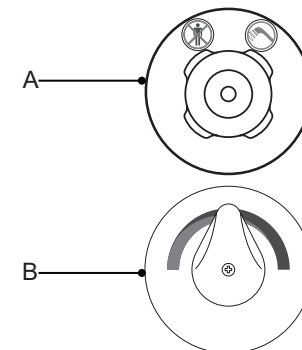


Nyissa meg a fertőtlenítő áramlását max. (A) értékre. Állítsa a hőmérsékletet a lehető legalacsonyabb lehetőségre (B).

5




Permetezzen fertőtlenítőt a zuhanyszékre vagy -kocsira.

6

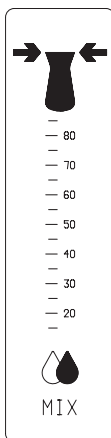

Ellenőrizze a fertőtlenítőszer keverékének arányát az áramlásmérőn, szükség esetén állítsa be (lásd a használati útmutatót).

7

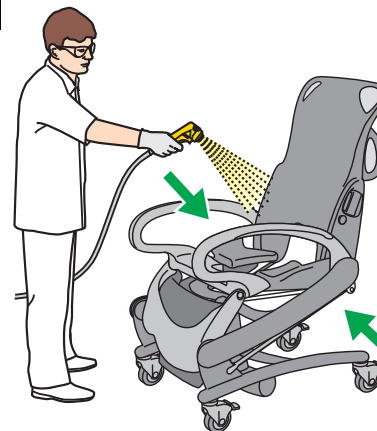

Fertőtlenítsen a zuhanyszéket-vagy -kocsit.

