


# Painel de Chuveiro e Desinfecção

## Lavar o paciente

1




Acione os travões.

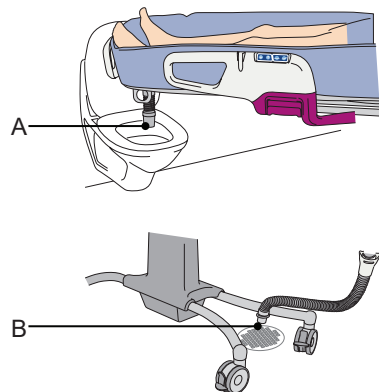

Movimente o paciente para o Painel de chuveiro e desinfecção.

(A) - Posicione o ralo de descarga por cima da sanita ou pia ou  
(B) - Posicione a saída de descarga sobre o ralo de esgoto no chão.  
Acione os travões.

2

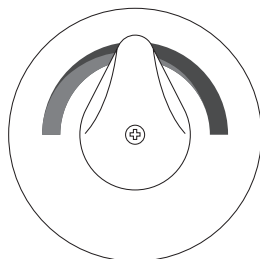


Regule a temperatura necessária.

3




Risco de escaldão.

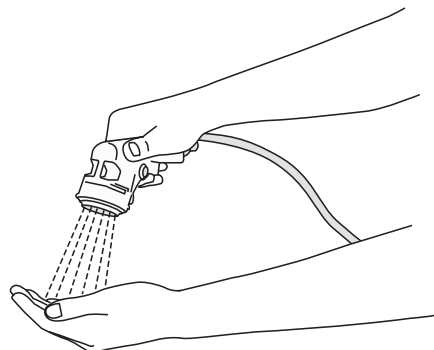

Levante o manípulo do chuveiro e afaste-o do paciente.  
Sinta a água com as mãos nuas.  
Pressione o acionador do manípulo de chuveiro e regule o fluxo.


4

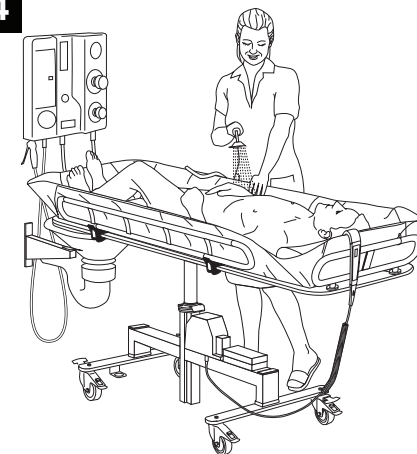

Lave o paciente.


## Limpeza e desinfecção da cadeira ou maca de chuveiro

1

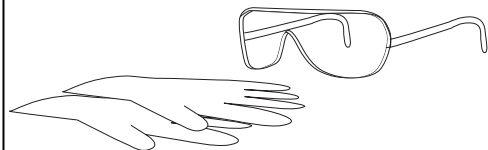

Coloque as luvas e os óculos de proteção.

2

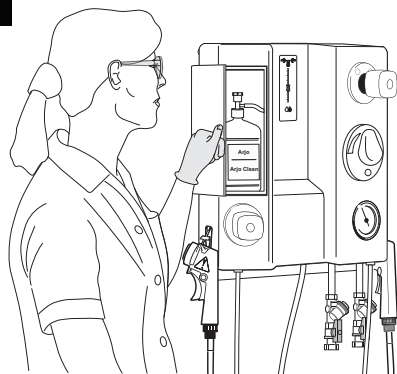


Abra a porta do painel e verifique o fornecimento de desinfetante na garrafa.

3




Não desinfetar perto do paciente.

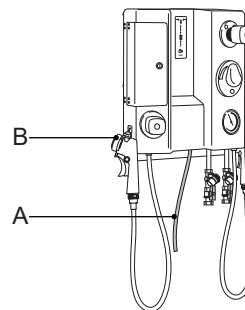


Verifique se o tubo (A) está ligado à sucção. Separe o manipulador aspersor de desinfetante (B) do gancho.

4

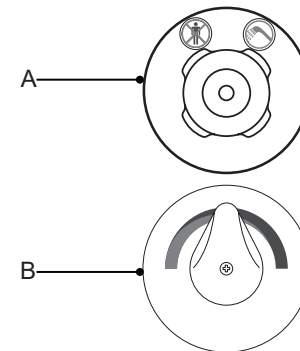


Abra o fluxo de desinfecção para o nível máximo (A). Regule a temperatura para o valor mais baixo possível (B).

5

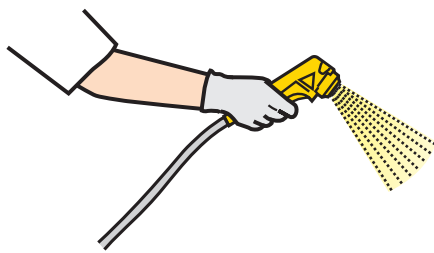


Pulverize desinfetante sobre a cadeira ou maca de duche.

6

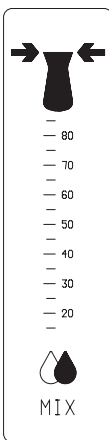

Verifique o rácio de mistura de desinfetante no fluxómetro e ajuste conforme necessário (consulte as IU).

7

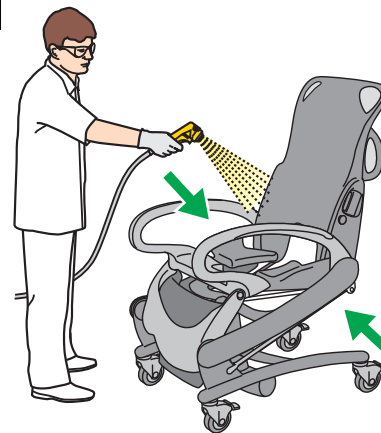

Desinfete a cadeira ou maca de duche.

