


# Sprchový a dezinfekčný panel

## Sprchovanie pacienta/klienta

1




Zaistite brzdy.

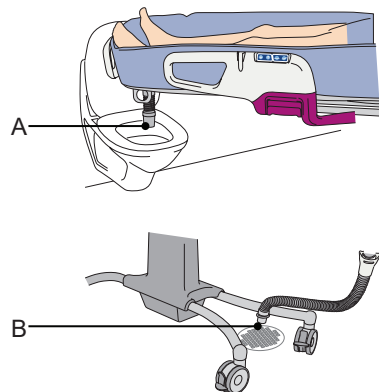

Pacienta/klienta presuňte do priestoru so sprchovým a dezinfekčným panelom. (A) – odtokový otvor umiestnite ponad toaletu alebo oplachovacie umývadlo alebo (B) – odtokový otvor umiestnite ponad odtok v podlahe. Zaistite brzdy.

2

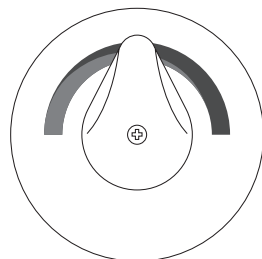


Nastavte požadovanú teplotu.

3




Riziko obarenia.

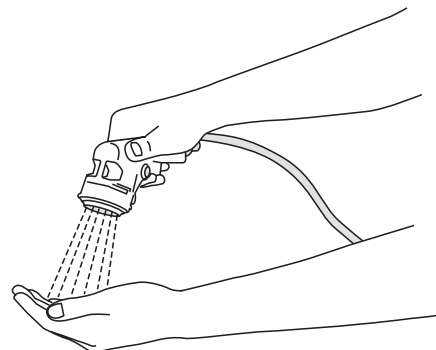

Zdvihnite rukoväť sprchy a nasmerujte ju preč od pacienta/klienta. Rukou skontrolujte teplotu vody. Stlačte spúšť na rukoväti sprchy a nastavte prietok.

4

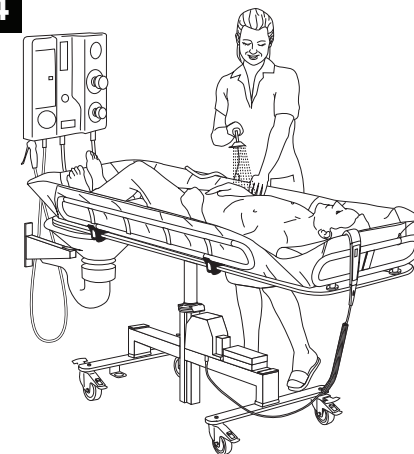

Pacienta/klienta osprchujte


## Čistenie a dezinfekcia sprchovacej stoličky alebo vozíka

1



Nasadte si ochranné rukavice a okuliare.

2

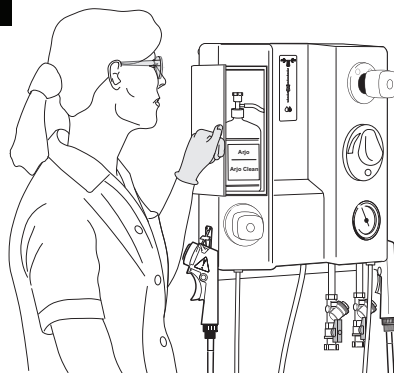


Otvorte dvierka panela a skontrolujte množstvo dezinfekčného prostriedku vo fľaši.

3




Nedezinfikujte v blízkosti pacienta/klienta.

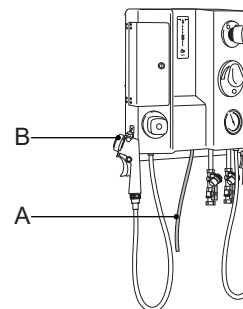

Skontrolujte, či je hadica (A) pripojená k odsávaniu. Z háčika odpojte rukoväť rozprašovača dezinfekčného prostriedku (B).

4

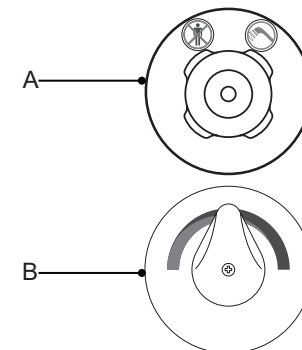


Prietok dezinfekčného prostriedku úplne otvorte (A). Teplotu nastavte na čo najnižšiu hodnotu (B).

5




Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na sprchovaciu stoličku alebo vozík.

6

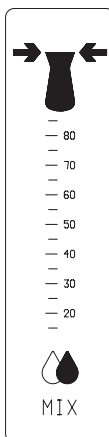

Na prietokomere skontrolujte zmiešavací pomer dezinfekčného prostriedku a v prípade potreby ho upravte (pozrite si NnP).

7

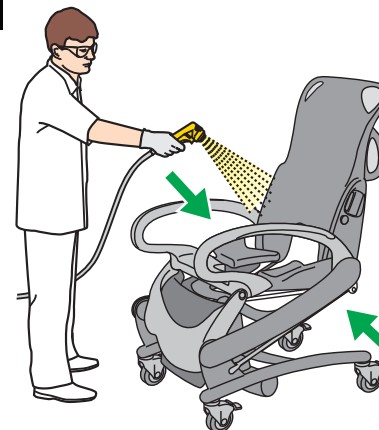

Vydezinfikujte sprchovaciu stoličku alebo vozík.

