


Konzola za tuširanje in razkuževanje

Prhanje oskrbovanca

1




Aktivirajte zavore.

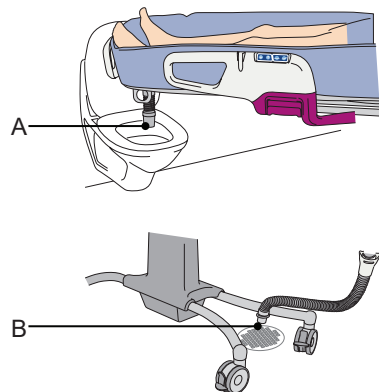

Premaknite oskrbovanca h konzoli za prhanje in razkuževanje.
(A) – drenažno odprtino namestite nad straniščno školjko/splakovalni izlivnik; ali
(B) – drenažni odvod namestite nad odtočni kanal.
Aktivirajte zavore.

2

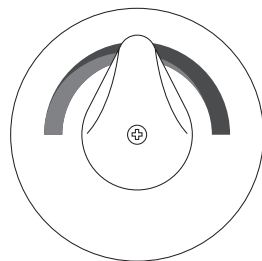


Nastavite ustrezno temperaturo.

3




Nevarnost oparjenja.

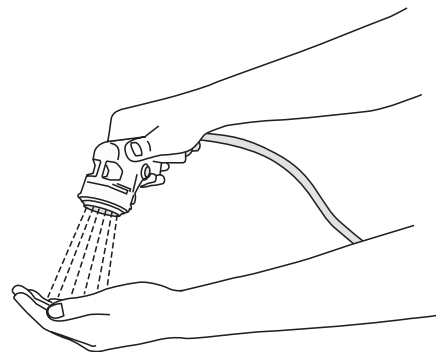

Dvignite ročico prhe in jo usmerite stran od oskrbovanca. Z roko preverite temperaturo vode. Pritisnite sprožilec na ročici prhe in prilagodite pretok.

4

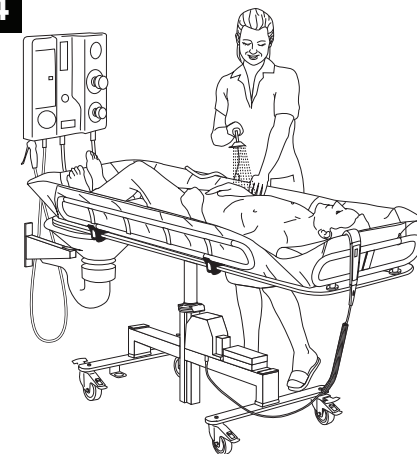

Oprhajte oskrbovanca.


Čiščenje in razkuževanje stola ali vozička za prhanje

1



Nadenite si zaščitne rokavice in očala.

2

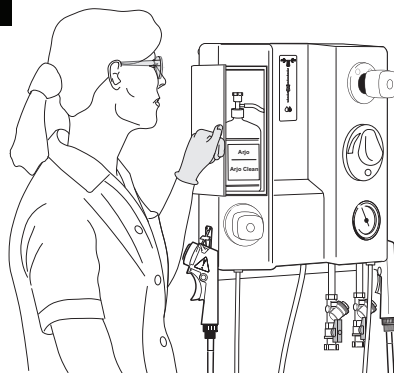


Odprite vrata konzole in preverite količino razkužila v posodi.

3




Ne razkužujte v bližini oskrbovanca.

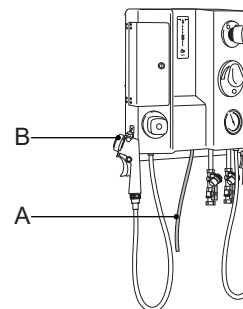

Prepričajte se, da je cevka (A) povezana z nastavkom za sesanje. Snemite ročico razpršila za razkuževanje (B) s kljuke.

4

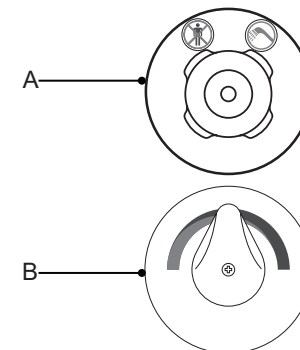


Do konca odprite pretok razkužila (A). Nastavite najnižjo mogočo temperaturo (B).

5



Stol ali voziček za prhanje poškopite z razkužilom.

6

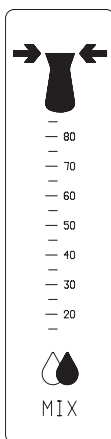

Na merilniku pretoka preverite razmerje mešanice za razkuževanje in ga po potrebi prilagodite (glejte navodila za uporabo).

7



Razkužite stol ali voziček za prhanje.

