


Wellness Nordic Relax® Chair

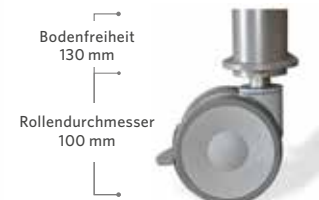

Menschen mit kognitiven Störungen kann durch spezielle, beruhigende Musik und taktile Stimulation geholfen werden, sich besser zu entspannen. Das Wohlbefinden wird so positiv beeinflusst, und die Lebensqualität wird tatsächlich verbessert.


Der vollautomatische Wellness Nordic Relax Chair vereint diese Funktionen mit einer Schaukelbewegung und bietet so ein einzigartiges und beruhigendes multisensorisches Erlebnis.

- Eingebautes Audiosystem mit MusiCure®-Musik
- Drei voreingestellte automatische Programme bieten multisensorische Stimulation
- Einfach zu reinigendes, weiches Kunstleder
- Ausschwenkbare Armstützen
- Abnehmbarer Inkontinenzbezug
- Untergestell mit Rädern für eine problemlose Integration mit Liftersystemen von Arjo
- Optional: Schwere Decke und U-förmiges Kissen


Farben und Optionen

Der **Wellness Nordic Relax Chair** ist in zwei Hauptfarben (Schwarz oder Weiß) mit den Akzentfarben (Armstützen und Inkontinenzbezug) Weiß, Rot oder Schwarz erhältlich. Ab März 2020 auch in Akzentfarbe hellgrün sowie hell- und dunkelbraun erhältlich.

Hauptfarben

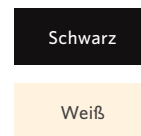

Akzentfarben

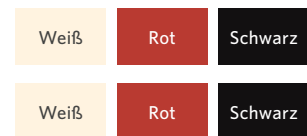

TECHNISCHE ANGABEN

| | |
|------------------|-------------------|
| Stromversorgung | AC 230 V/50 Hz |
| Stromverbrauch | 90 W |
| Betriebsumgebung | 0 bis 40 °C |
| Brandschutz | EN1021-1 & 1021-2 |

MUSIK UND VIBRATION

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Typ | 1-Wege, 1-Lautsprechersystem |
| Impedanz | 8 Ω |
| Lautsprechermembrangröße | Volle Reichweite, 700 mm × 22 |
| Verstärker | 14 W (7 W + 7 W), 1 kHz |
| Vibrationsverstärker | 14 W, 70 Hz |
| Abgeschirmtes Design | Nein |
| Externe Eingangsklemme | Stereo-Minibuchse, 3,5 mm |

FERNBEDIENUNG

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Funktionsreichweite | ca. 1000 mm |
| IR-Empfänger | Beide Seiten des Stuhls |
| Batterie | 2 x AAA |

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

3 PROGRAMME: RELAX, REFRESH UND COMFORT

Relax

- Dauer 20 Min.**
- Rückenlehne wird bei Programmstart auf die halb liegende Position eingestellt
 - Die halb liegende Position wird für die Dauer des Programms beibehalten
 - Am Ende des Programms bleibt die Liegefläche in ihrer Position
 - Automatische Musicure-Entspannungsmusik
 - Taktile Stimulation am Rücken

Refresh

- Dauer 20 Min.**
- Die Rückenlehne wird in fünf Schritten abgesenkt
 - Am Ende des Programms wird die sitzende Position wieder eingestellt
 - Variierende Schaukelgeschwindigkeit
 - Automatische Musicure-Stimulationsmusik
 - Taktile Stimulation am Rücken

Comfort

- Dauer 120 Min.**
- Die Rückenlehne bleibt für die gesamte Dauer des Programms aufrecht
 - Gleichbleibende Schaukelgeschwindigkeit
 - Keine Musik

GESAMTABMESSUNGEN (EINSCHLIEßLICH UNTERGESTELL)

| | |
|--|------------------------|
| Länge, aufrechte Position | 1435 mm |
| Höhe, aufrechte Position | 1225 mm |
| Länge, komplette Liegeposition | 1830 mm |
| Höhe, bis OK-Armstützen | 835 mm |
| Max. Breite (Untergestell) | 850 mm |
| Länge, Rückenlehne | 850 mm |
| Länge, Sitzfläche | 530 mm |
| Länge, Beinstütze | 500 mm |
| Breite, Sitzfläche | 665 mm |
| Sitzhöhe | 530 mm |
| Sitzhöhe, vorderes Ende | 585 mm |
| Produktgewicht, einschl. Untergestell | 74,4 kg |
| Produktgewicht, nur Stuhl (einschl. Matratze, Kissen, Fernbedienung) | 46 kg |
| Lenkrollentyp | Frei drehend, bremsbar |
| Lenkrollengröße | 100 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Sichere Arbeitslast | 130 kg |

MATERIAL

| | |
|--------------------------------|---|
| Beschichtetes Gewebe | Polyvinylchlorid-Leder (Kunstleder) |
| Polstermaterial | Schaumstoff |
| Armstütze und Inkontinenzbezug | Stamskin TOP®, mit Sanitized® PL 2432 (PES) gegen Bakterien, Geruch und Pilze behandelt |

OPTIONALES ZUBEHÖR

ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖßEN UND GEWICHTEN

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Schwere Faserdecke | 3,7 kg, 1250 mm x 1000 mm |
| Bezug für Faserdecke | 1250 mm x 1000 m |
| U-förmiges Kissen | Erhältlich in rot |

Februar 2018 Alle Produkte haben eine CE-Kennzeichnung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2018

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hągendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

