



CAMA ARTICULADA AVANZADA

Total Lift Bed

Colocación en posición erguida en la cama para pacientes sumamente dependientes

Posición erguida progresiva simplemente pulsando un botón

El reposo en cama y la inmovilidad prolongados de pacientes en estado crítico pueden ocasionar un deterioro grave del estado físico, una pérdida considerable de la masa muscular y un aumento de la debilidad muscular que, a su vez, pueden prolongar el tiempo que los pacientes pasan en la UCI y en el hospital.¹ El reconocimiento de las consecuencias físicas

y psicológicas a largo plazo de la inmovilidad prolongada ha dado lugar a que se recomiende la movilización temprana de los pacientes de la UCI.²

Aunque la bipedestación y la carga de peso tempranas son un objetivo deseable, lograrlo de manera regular con pacientes en estado crítico puede suponer un desafío para los cuidadores.



Sistema patentado de control de la carga de peso

Mientras la cama se inclina, el cambio en la carga de peso alcanzado por el paciente aparece en el piecero Foot Lifter. Esta información visual ayuda a los cuidadores a llevar un seguimiento del progreso, registrar los logros y compararlos con los objetivos de rehabilitación y movilidad.

Colocación flexible

Además de la verticalización y la carga de peso progresivas, Total Lift Bed ofrece una colocación flexible del paciente para ayudar durante los procedimientos de atención sanitaria y movilización. También permite colocar al paciente en la posición de Trendelenburg, con la cabeza hacia abajo, para realizar determinados procedimientos de atención sanitaria.

Protección de la piel

La superficie de redistribución de presión integrada, con cinco zonas, permite a los cuidadores elegir entre las técnicas de baja pérdida de aire o presión alterna, para ayudar a prevenir y tratar las lesiones por presión. La firmeza del colchón se puede modificar mediante los controles de confort.

Posición de silla en la cama

La función de silla en la cama ayuda a colocar al paciente en una posición más erguida con las piernas en horizontal entre las sesiones de inclinación total. La posición del piecero puede ajustarse desde el mando a distancia para satisfacer las distintas necesidades de los pacientes.



Con solo uno o dos cuidadores, Total Lift Bed™ puede mover progresivamente a los pacientes para que se pongan de pie y soporten su peso, a fin de ayudar a la rehabilitación temprana durante la fase aguda de una enfermedad grave.

Cumplir con los protocolos de movilidad temprana

Los pacientes que necesitan una transición gradual desde el reposo en la cama hasta que soportan todo su peso corporal pueden avanzar progresivamente hasta la posición erguida sin salir de la cama.

Picero Foot Lifter™ patentado

Cuando la función de inclinación está activada, el sistema patentado Foot Lifter se mueve hacia los pies del paciente.

Al entrar en contacto con estos, la cama empieza a inclinarse con suavidad hasta el ángulo o la tasa de carga de peso deseados, mientras mantiene al paciente en su posición para evitar la necesidad de recolocarlos. Foot Lifter se ajustará automáticamente para ponerse al nivel del suelo y que el paciente pueda salir de la cama, si procede.

Seguridad durante el movimiento y en posición erguida


Un sistema de correas flexible ayuda a sujetar al paciente en su posición durante el movimiento hasta la posición erguida.



Sinergia: Total Lift Bed y Sara Combilizer®


La inclinación en la cama y bipedestación tempranas pueden mejorarse a través de sesiones diarias de inclinación fuera de la cama, bipedestación y posición de silla con la Sara Combilizer.

Sacar a los pacientes de la cama ayuda a generar muchos beneficios psicológicos positivos a medida que ellos y sus familias van notando los avances hacia la vida fuera de la UCI.

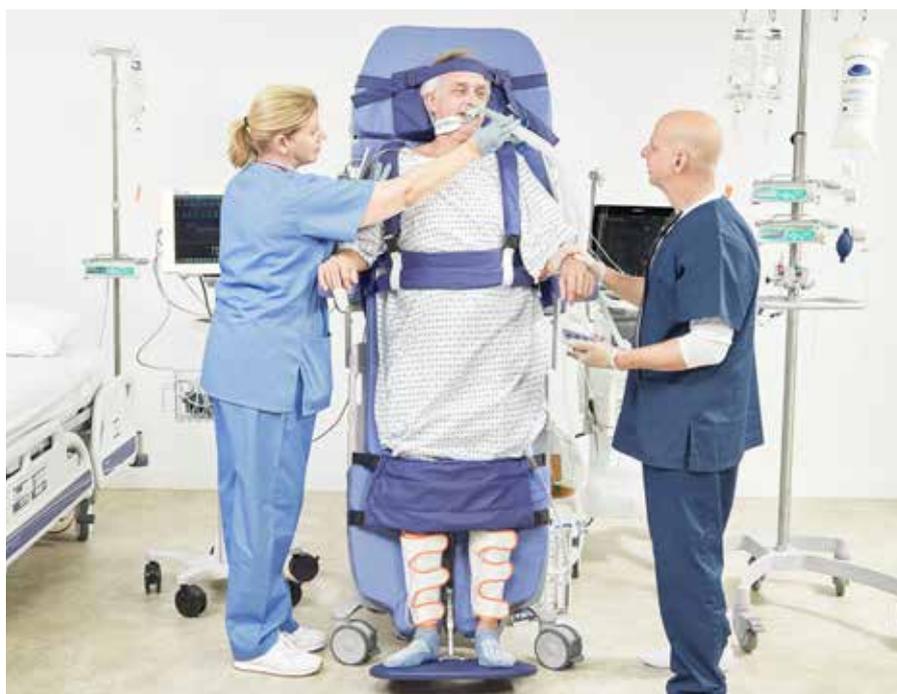

Sara Combilizer de Arjo

Posición erguida progresiva

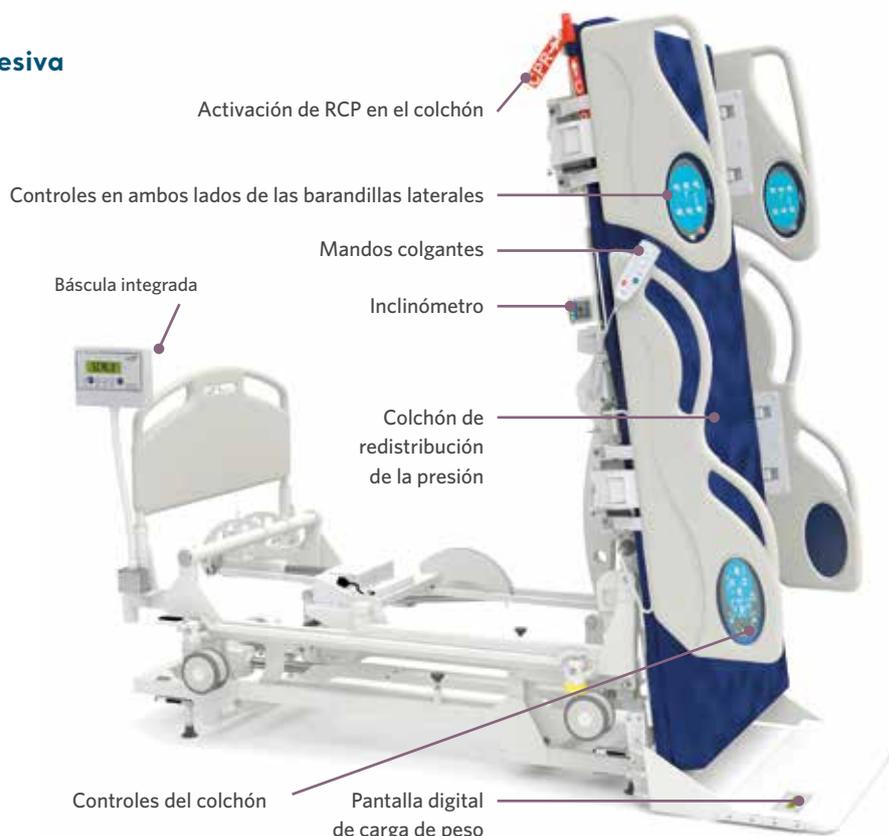

Especificaciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

Longitud

Longitud total (en posición normal)	218 cm
Longitud total, completamente extendida (con Foot Lifter extraído)	228 cm

Anchura

Anchura total, con barandillas laterales	104 cm
--	--------

Altura

Posición baja, de la plataforma al suelo	52,5 cm
Posición alta, de la plataforma al suelo	75,5 cm
De la parte superior de la cama al suelo (posición de bipedestación)	204 cm

Espacio libre

Desde la cara inferior de la estructura hasta el suelo	3,5 cm
Diámetro de las ruedas	12,7 cm

FOOT LIFTER

Se desplaza sobre el colchón 20 cm hacia el reposacabezas

Se desplaza hacia fuera de la cama, 10 cm

Se desplaza hacia arriba en la posición de silla hasta entrar en contacto con los pies o, como máximo, 20 cm

Carga de trabajo segura de 280 kg

Capacidad de peso máximo del paciente de 193 kg

Normas

CE conforme a la MDD 93/42 CEE, IEC 60601-1 3.^a Ed. IEC 60601-2-52, IEC 606-1-6, IEC 62366, Registro de la FDA (CFR21 Part 820).

Referencias:

1. Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit from pathophysiology to clinical trials. *Critical Care Medicine*. 2009;13:216.
2. Morris PE, Goad A, Thompson C, et al: Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure. *Crit Care Med*. 2008;36(8):2238-2243.

Los modelos que se indican aquí están fabricados por VitalGo Systems, Inc. y son distribuidos por Arjo AB mediante contrato. El embalaje, el etiquetado y la documentación suministrada con el producto así lo reflejarán. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. Total Lift Bed™ y Foot Lifter™ son marcas registradas de VitalGo Systems, Inc. Todos los demás ® y ™ son marcas registradas pertenecientes a Arjo AB.

Octubre de 2019 En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deberán usarse piezas diseñadas por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo.

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.es