

Steuerkasten



Nach-oben-Taste – Drücken, um den Patienten/Bewohner anzuheben


Nach-unten-Taste – Drücken, um den Patienten/Bewohner abzusenken



Not-Aus-Schalter – Drücken, um die Einheit auszuschalten

Ein-/Ausschalter – Drücken, um den Not-Aus-Schalter zurückzusetzen

Handbedienung

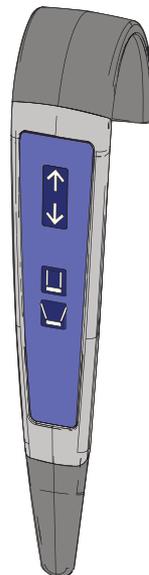

Nach-oben-Taste – Drücken, um den Patienten/Bewohner anzuheben




Nach-unten-Taste – Drücken, um den Patienten/Bewohner abzusenken



Fahrgestell schließen



Fahrgestell öffnen

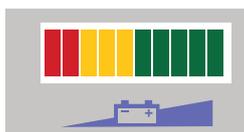

Akkuladezustandsanzeige –

Die Akkuladezustandsanzeige ist eine Balkenanzeige, die sich auf der Rückseite des Akkupackhalters befindet.

Ein akustischer Signalton ertönt, wenn der Akkuladestand den kritischen Bereich erreicht.

Grün – Normaler Betrieb

Gelb – Niedriger Akkustand


Rot – Kritisch

Not-Aus-Schalter

1

Not-Aus-Schalter


Taste
Akkusperre

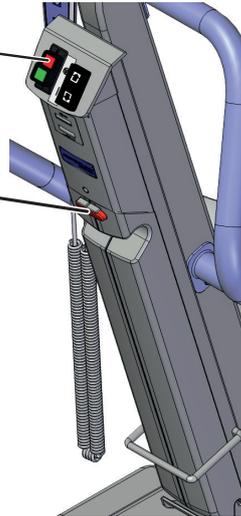

Zum Abschalten die rote Notfalltaste oder die rote Akkulösetaste drücken, während der Akku nach hinten gezogen wird, um ihn herauszunehmen.

2


Ein-/Ausschalter

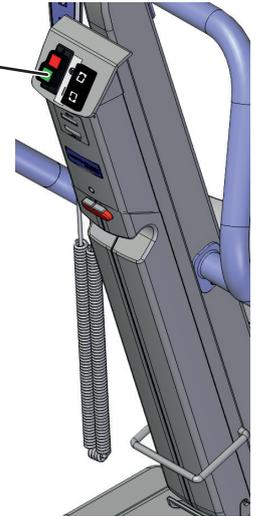

Zum Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters den grünen Ein-/Ausschalter drücken oder den Akku austauschen.

Bremsen

1

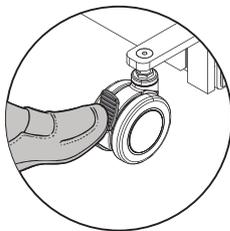


Verriegelt



Zum Feststellen der Bremse drücken Sie den Hebel mit dem Fuß herunter.

2

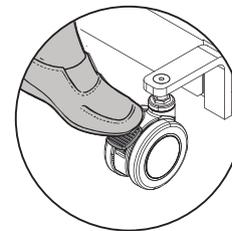


Entriegelt



Zum Lösen der Bremse drücken Sie auf den oberen Teil des Bremschuhs.

Notabsenkung

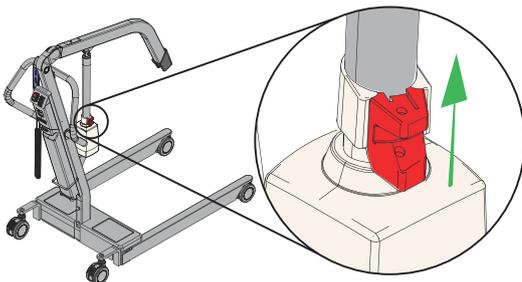

Für den Fall eines Ausfalls der Handbedienung oder eines Fehlers am Steuergerät befindet sich am Stellantrieb ein roter Hebel.

Ziehen Sie den roten Hebel schrittweise nach oben und halten Sie ihn, bis der Stellantrieb auf das gewünschte Niveau abgesenkt ist.

Eine Last muss auf den Ausleger angewendet werden, wobei die zum Ziehen des roten Hebels aufgewendete Kraft und das Gewicht des Pflegebedürftigen die Absenkgeschwindigkeit beeinflussen.

Der Griff ist federbelastet und kehrt in die Normalposition zurück und stoppt den Absenkvorgang, wenn er losgelassen wird.