



# Maxi 500

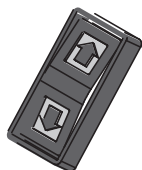


## Vezérlőpanel

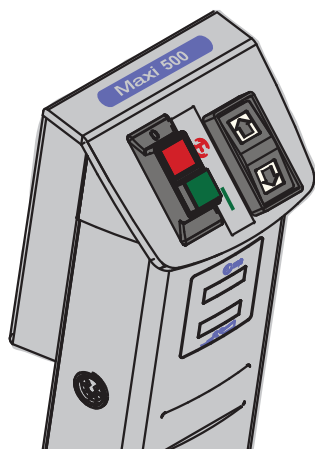

**Fel gomb** – nyomja meg a beteg emeléséhez


**Le gomb** – nyomja meg a beteg leeresztéséhez

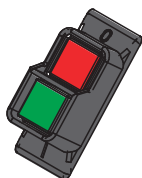

**Vészleállító gomb** – nyomja meg az áramellátás kikapcsolásához

**Bekapcsológomb** – nyomja meg a vészleállítás visszaállításához

## Kézivezérlő

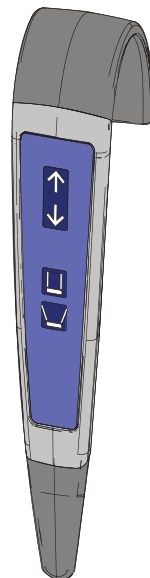

**Fel gomb** – nyomja meg a beteg emeléséhez




**Le gomb** – nyomja meg a beteg leeresztéséhez



**Lábak összezárása**



**Lábak szétnyitása**

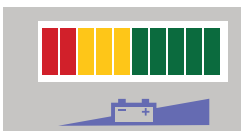

### Töltöttségjelző –

a töltöttségjelző az akkumulátortartón található sávdigramos kijelző.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kritikus tartományba ér, erre az eszköz sípolással figyelmeztet.

Zöld – normál működés

Sárga – alacsony töltöttség


Piros – kritikus töltöttség

## Vészleállítás

1

Vészleállító  
gomb


Akkumulátorkioldó  
gomb

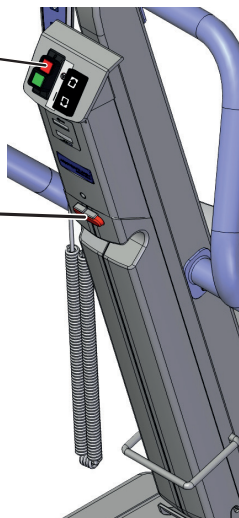

Az áramellátás kikapcsolásához nyomja meg a piros vészleállító gombot, vagy nyomja meg az akkumulátor piros kioldógombját, közben hátrafelé húzva az akkumulátort, hogy eltávolítsa.

2

Főkapcsoló  
gomb

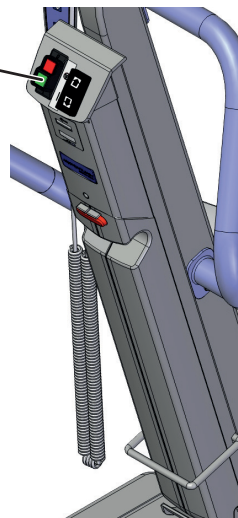


A vészleállítás funkció visszaállításához nyomja meg a zöld bekapcsológombot, vagy helyezze vissza az akkumulátort.

## Fékek

1


Lefékezve

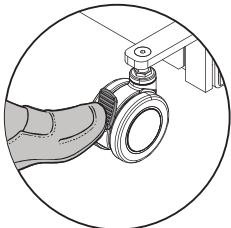

A fék bekapcsolásához lépjen a lemez hátsó részére.


2

Kioldva

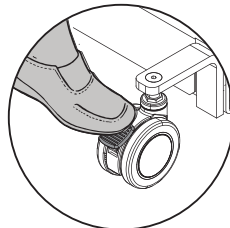

A fék kiengedéséhez nyomja előre a lemez felső részét.

## Vészhelyzeti leeresztés

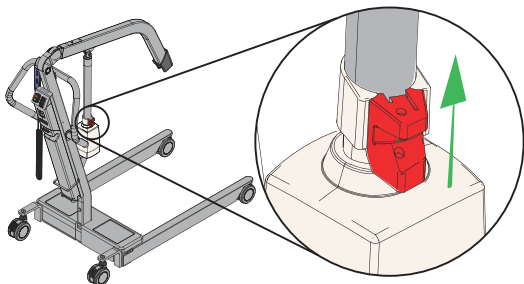

Ha a kézívezrlő vagy a vezrlődoboz nem működik, keresse meg a piros vészhelyzeti leeresztőt az aktivátor felett. Fokozatosan húzza fel, és tartsa, amíg az aktivátor a kívánt szintre nem ereszkedik.

A gémet meg kell terhelni, a leereszkedés sebessége a vészhelyzeti leeresztőre kifejtett erőtl és a beteg testsúlyától függ.

Az elengedett vészhelyzeti leeresztőt a rugója visszaállítja normál helyzetbe, és a leeresztés leáll.

