



Maxi 500

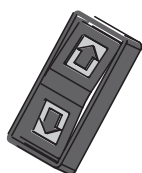


Kontrolna kutija

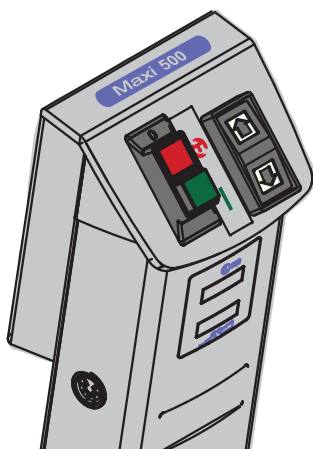

Gumb za gore - pritisnite za podizanje pacijenta


Gumb za dolje - pritisnite za spuštanje pacijenta

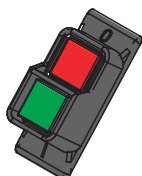

Gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju - pritisnite da biste isključili napajanje

Gumb za napajanje - pritisnite za zaustavljanje u hitnom slučaju

Ručni upravljač

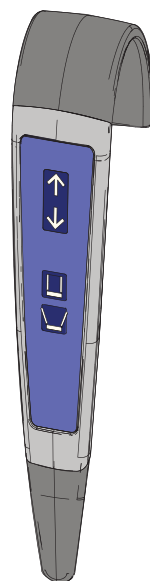

Gumb za gore - pritisnite za podizanje pacijenta



Gumb za dolje - pritisnite za spuštanje pacijenta



Zatvorite noge



Otvorite noge



Indikator napunjenosti baterije -

Indikator napunjenosti baterije je prikaz stupčastog dijagrama koji se nalazi na držaču baterije.

Kad napunjenost baterije dostigne kritičnu razinu, oglasit će se zvučni signal.

Zeleno - normalan rad

Žuto - niska razina napunjenosti baterije


Crveno - kritična razina

Zaustavljanje u hitnom slučaju

1

Gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju


Gumb za otpuštanje baterije

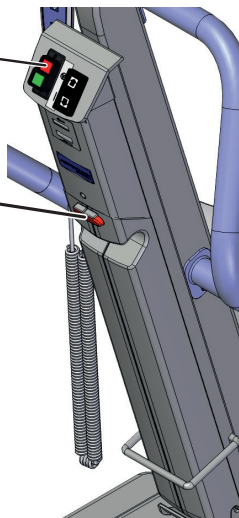

Za isključivanje napajanja pritisnite crveni gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju ili pritisnite crveni gumb za otpuštanje baterije dok povlačite bateriju prema natrag da biste je uklonili.

2


Gumb za napajanje

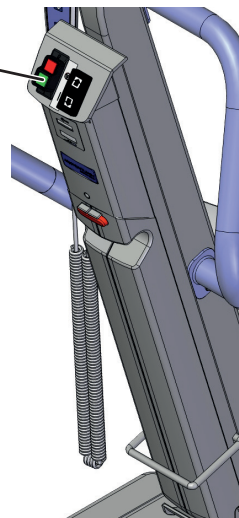

Resetirajte funkciju za zaustavljanje u hitnom slučaju pritiskom na zeleni gumb za napajanje ili zamjenom baterije.

Kočnice


1

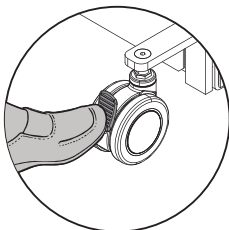

Zaključano

Da biste zakočili, pritisnite nogom stražnji dio pločice.


2

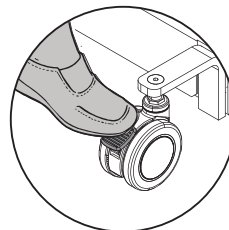

Otključano

Da biste otpustili kočnice, pritisnite gornji dio pločice prema naprijed.

Spuštanje u hitnom slučaju

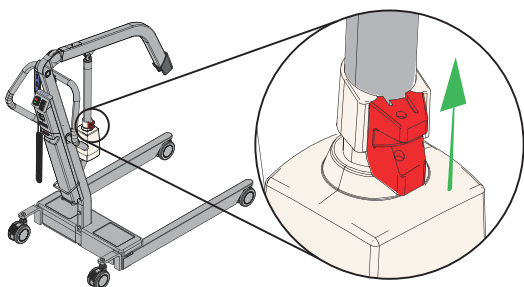

U slučaju kvara ručnog upravljača ili kontrolne kutije pronađite crvenu ručku iznad aktuatora.

Postupno povucite ručku prema gore i držite je dok se aktuator ne spusti na željenu visinu.

Dizalicu treba pritisnuti; sila kojom se pritišće ručka i težina bolesnika utječu na brzinu spuštanja.

Ručka je opremljena oprugom te će se nakon otpuštanja vratiti u uobičajeni položaj i zaustaviti postupak spuštanja.

