



Maxi 500

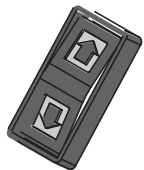


Hộp Điều khiển

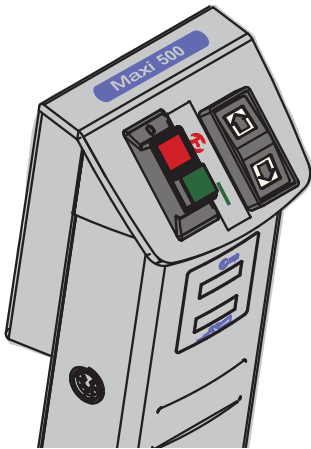

Nút Lên - nhấn để nâng bệnh nhân


Nút Xuống - nhấn để hạ bệnh nhân xuống

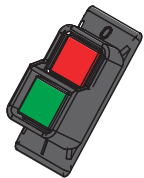

Nút dừng khẩn cấp - nhấn để tắt nguồn

Nút nguồn - nhấn để cài đặt lại chức năng dừng khẩn cấp

Điều khiển bằng tay

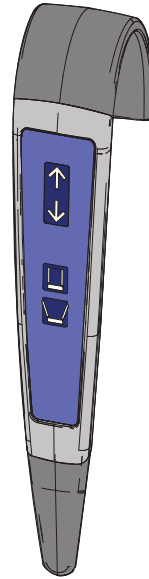

Nút Lên - nhấn để nâng bệnh nhân




Nút Xuống - nhấn để hạ bệnh nhân xuống



Đóng Chân



Mở Chân

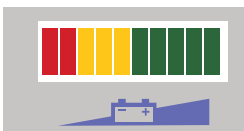

Chỉ báo Sạc Pin -

Chỉ báo sạc pin là màn hình hiển thị biểu đồ dạng thanh, nằm trên ngăn chứa pin.

Thiết bị cảnh báo bằng âm thanh sẽ phát ra tiếng bíp khi mức pin đạt ngưỡng tới hạn.

Màu xanh lá cây - Hoạt động bình thường

Vàng - Pin yếu


Màu đỏ - Tới hạn

Dừng khẩn cấp

1

Nút dừng khẩn cấp


Nút tháo pin

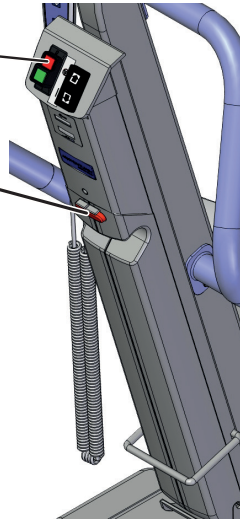

Để tắt nguồn, nhấn nút khẩn cấp màu đỏ hoặc nhấn nút tháo pin màu đỏ, đồng thời kéo pin về phía sau để tháo pin.

2


Nút nguồn

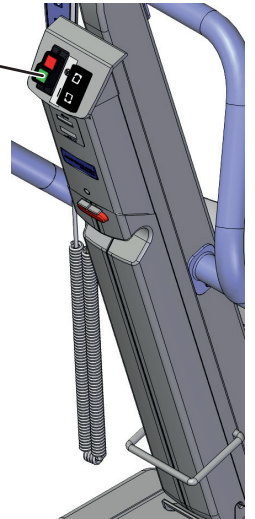

Để cài đặt lại chức năng dừng khẩn cấp, nhấn vào nút nguồn màu xanh lá cây hoặc bằng cách thay pin.

Phanh

1

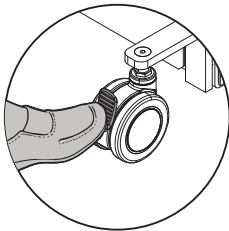


Đã khóa



Để dùng phanh, đặt chân lên phần phía sau của miếng đệm.

2

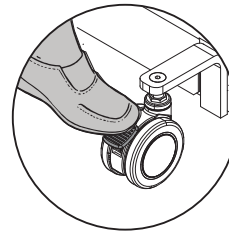


Mở khóa



Để thả phanh, đẩy phần trên của miếng đệm lên trước.

Hạ khẩn cấp

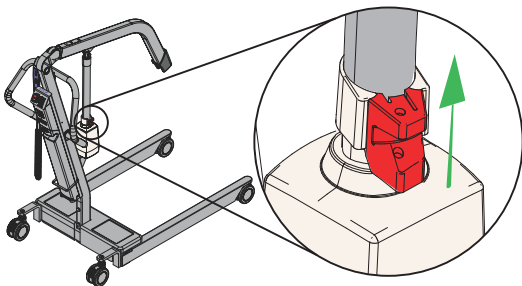

Trong trường hợp điều khiển bằng tay hoặc hộp điều khiển bị lỗi, hãy xác định vị trí tay cầm màu đỏ phía trên bộ truyền động.

Dần dần kéo tay cầm lên và giữ cho đến khi bộ truyền động được hạ xuống mức mong muốn.

Tải trọng phải tác động để phòng lên, lực tác dụng lên tay cầm và trọng lượng bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hạ xuống.

Tay cầm được trang bị lò xo và sẽ trở về vị trí bình thường và dừng quá trình hạ xuống khi được thả ra.