



Maxi 500

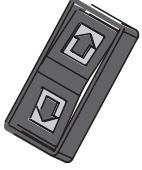


Kontrol kutusu

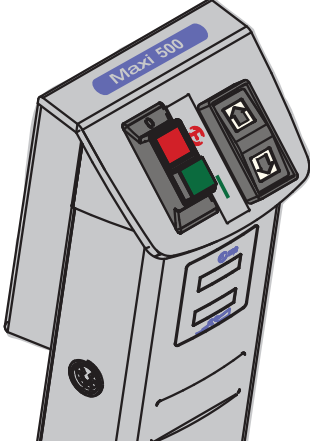

Yukarı düğmesi - Hastayı yükseltmek için basın


Aşağı düğmesi - Hastayı alçaltmak için basın

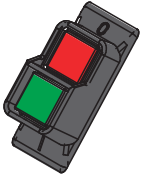

Acil durdurma düğmesi - Gücü kapatmak için basın

Güç düğmesi - Acil durdurmayı sıfırlamak için basın

El kontrolü

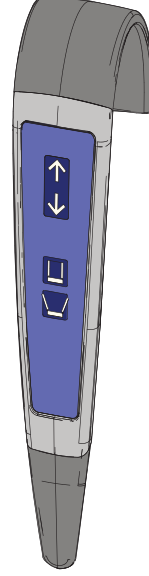

Yukarı düğmesi - Hastayı yükseltmek için basın




Aşağı düğmesi - Hastayı alçaltmak için basın



Ayakları kapatın



Ayakları açın

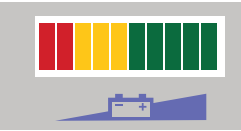

Batarya Şarj Göstergesi -

Batarya şarj göstergesi bir çubuk grafik ekranıdır ve batarya modülü tutucusunda bulunur. Bir sesli uyarı cihazı, batarya seviyesi kritik aralığa ulaştığında sesli uyarı verir.

Yeşil - Normal çalışma

Sarı - Batarya zayıf


Kırmızı - Kritik

Acil durdurma

1

Acil durdurma
düğmesi


Batarya çıkarma
düğmesi

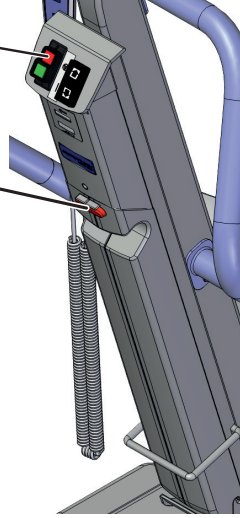

Gücü kapatmak için kırmızı acil durum düğmesine basın veya bataryayı çıkarmak için arkaya doğru çekerken kırmızı batarya serbest bırakma düğmesine basın.

2


Güç düğmesi

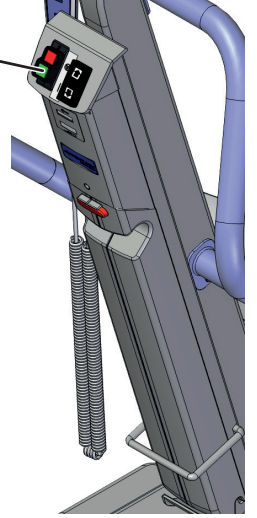

Acil durdurma işlevini sıfırlamak için yeşil güç düğmesine basın veya bataryayı yerine takın.

Frenler


1

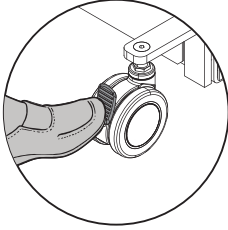

Kilitli

Frenleri etkinleştirmek için pedin arka kısmına ayakla basın.


2

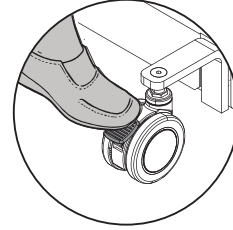

Kilit Açık

Frenleri serbest bırakmak için pedin üst kısmını ileri itin.

Acil durumda alçaltma

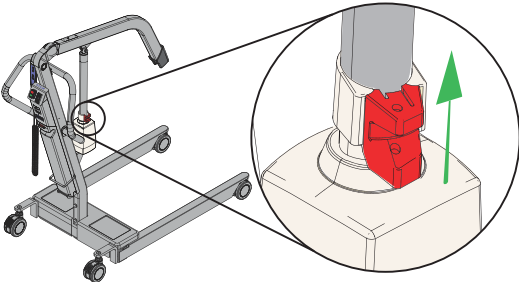

El kontrolü veya kontrol kutusu arızası durumunda aktüatörün üzerindeki kırmızı kolun yerini belirleyin.

Kolu kademeli olarak yukarı çekin ve aktüatör istenen seviyeye inene kadar sabit tutun.

Kaldırma koluna bir kuvvet uygulanmalıdır, kola uygulanan kuvvet ve hasta ağırlığı alçalma hızını etkiler.

Kol yaylıdır; serbest bırakıldığında normal konumuna geri döner ve indirme işlemini durdurur.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsengatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com