

# AtmosAir Fit und AtmosAir Plus



## Installation des Matratzensersatzsystems



Achten Sie darauf, dass Rahmen und Sicherheitsseiten im Verhältnis der Größe der Matratze entsprechen, um Lücken zu minimieren, in denen der Kopf oder Körper des Patienten eingeklemmt werden kann.

**1**

Bett einstellen und Bremsen arretieren.

**2**

Nehmen Sie die vorhandene Matratze heraus.

**3**

Legen Sie das MES mit Logo nach oben und Produktinformationen in Richtung Fußende in den Bettrahmen ein.

**4**


### Erweitertes bariatrisches Bett:

Legen Sie das Polster in den Spalt zwischen den Sicherheitsseiten und der Matratze:

- Reißverschlüsse nach außen.
- Markiertes Fußende am Fußende des Bettes.

**5**


### Erweitertes bariatrisches Bett:

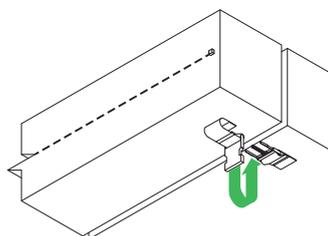

Die vier Buchsen der Verschlüsse an der Unterseite der Einlagen auf der linken und rechten Seite mit den vier Steckern an der Unterseite der Matratze verbinden.

**6**

### Erweitertes bariatrisches Bett:

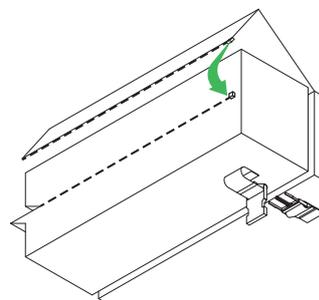

Die Reißverschlüsse zwischen Matratze und Matratzeinlagen schließen.

**7**

Bei Nichtverwendung die Polstertaschen unter die Matratze schieben.

## Platzierung des Patienten

**1**

Betten Sie den Patienten unter Beachtung der geltenden Sicherheitsregeln und Richtlinien der Einrichtung um.

**2**

Lagern Sie den Patienten mit jeweils gleichem Abstand zu den Seiten sowie zum Kopf- und Fußende in der Mitte der Matratze.

**3**

Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche der Matratze den Patienten gleichmäßig stützen.

**Hinweis:** Die Matratzengriffe dienen nur dem Transport der Matratze.

## CPR (kardiopulmonale Reanimation)

**1**

Richten Sie das Bett eben aus.

Sicherheitsseiten nach Bedarf absenken oder entfernen.

**2**

Beginnen Sie mit der CPR (kardiopulmonale Reanimation) gemäß Einrichtungsrichtlinien.

Bei entsprechender Indikation kann die Verwendung eines Reanimationsbretts in Erwägung gezogen werden.

**3**

Nach einer CPR (kardiopulmonale Reanimation):

- Entfernen Sie das Reanimationsbrett, sofern verwendet.
- Sicherheitsseite nach Bedarf hochklappen oder anbringen.
- Bett und Zubehör wieder in den Zustand vor der CPR bringen.