

AtmosAir Fit és AtmosAir Plus



A matracrendszer felhelyezése



A keretet és az oldalrácsokat úgy méretezte a matrachoz képest, hogy minimális legyen a rések nagysága, amelyekbe a beteg feje vagy teste beszorulhat.

1

Állítsa vízszintesre az ágyat, és kapcsolja be a fékeket.

2

Távolítsa el a meglévő matracot.

3

Helyezze a matracot az ágykeretbe úgy, hogy a logó felfelé nézzen, és a termékinformációs címkék az ágy láb felőli végébe kerüljenek.

4


Kihúzott bariatrikus ágy:

Helyezze a támasztópárnát az oldalrácsoz és a matrac közötti hézagba úgy, hogy:

- A cipzárok kifelé nézzenek.
- A lábvégi jelölt rész az ágy lábvégi végébe essen.

5


Kihúzott bariatrikus ágy:

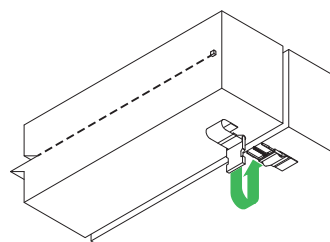

Csatlakoztassa a bal és a jobb oldali támasztópárna alján található a négy anyacsathoz a négy apacsathoz a matrac alján.

6

Kihúzott bariatrikus ágy:

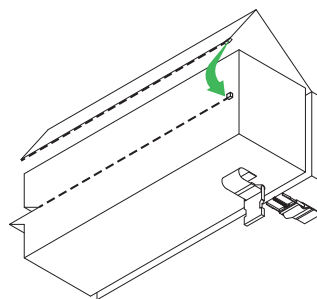

Cipzározza a matracot a matracbetétekhez.

7

A nem használt támasztópárna borítását tűrje be a matrac alá.

A beteg elhelyezése

1

A beteg szállításakor és áthelyezésekor tartson be minden vonatkozó biztonsági szabályt és intézeti protokollt.

2

A beteget a matrac közepére fektesse, annak szélességét és hosszát tekintve egyaránt.

3

Ügyeljen rá, hogy a matrac minden része tökéletesen megtámassza a beteget.

Megjegyzés: A matrac fogantyúi csak a matrac szállítására szolgálnak.

Újraélesztés

1

Állítsa vízszintesre az ágyat.
Szükség esetén eressze le vagy távolítsa el az oldalrácsokat.

2

Kezdje meg az újraélesztést az intézmény protokolljainak megfelelően.

Szükség esetén mérlegelje a kemény lap használatát.

3

Az újraélesztés befejezése után:

- Távolítsa el a kemény lapot, ha használt ilyen.
- Szükség esetén emelje vagy helyezze fel az oldalrácsozt.
- Állítsa be az ágyat és a tartozékokat az első elhelyezésnek megfelelően.