

AtmosAir Fit og AtmosAir Plus



Montering af helmadrassystem



Sørg for, at ramme og sengeheste har en størrelse, der svarer til madrassen, så klemfælder med risiko for fastklemning af plejemodtagerens hoved eller krop forhindres.

1

Indstil sengen, og aktivér bremserne.

2

Fjern eksisterende madras.

3

Anbring madrassen på sengerammen med logoet opad og produktinformationen i fodenden af sengen.

4


Forlænget bariatrisk seng:

Anbring polstringen i mellemrummet mellem sengehestene og madrassen med:

- Lynlåsene på ydersiden.
- Den markerede fodende i sengens fodende.

5


Forlænget bariatrisk seng:

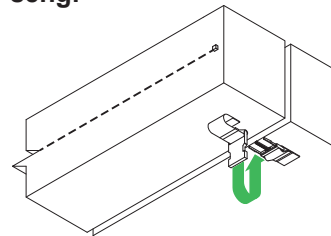

Sæt de fire klikspænder (hun-spænder) på undersiden af polstringerne i højre og venstre side i de fire tilsvarende spænder (han-spænder) på undersiden af madrassen.

6

Forlænget bariatrisk seng:

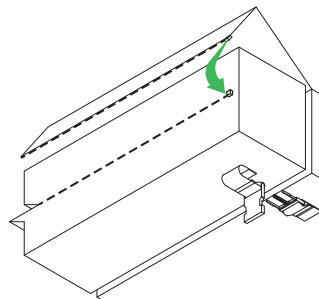

Lyn madrassen på madrasindsætningsstykkerne.

7

Hvis polstringerne ikke er i brug, foldes polstringsbetrækkene ind under madrassen.

Anbring plejemodtageren

1

Anbring plejemodtageren i henhold til alle relevante sikkerhedsregler og institutionens protokoller.

2

Centrer plejemodtageren midt på madrassen.

3

Sørg for, at alle dele af madrassen støtter plejemodtageren helt.

Bemærk: Madrashåndtagene er udelukkende til transport af madrassen.

CPR

1

Indstil sengen, så den er vandret og plan.

Sænk eller fjern sengehestene efter behov.

2

Iværksæt CPR i overensstemmelse med institutionens protokoller.

Overvej brug af backboard, hvis det måtte være indikeret.

3

Efter udførelsen af CPR:

- Fjern backboard-pladen, hvis en sådan har været i brug.
- Hæv eller påsæt sengehest efter behov.
- Indstil sengen og dens udstyr i samme position som før.