
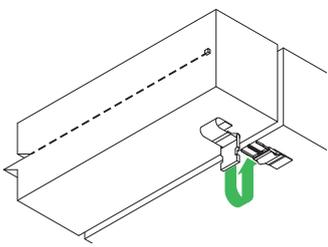


AtmosAir Fit и AtmosAir Plus

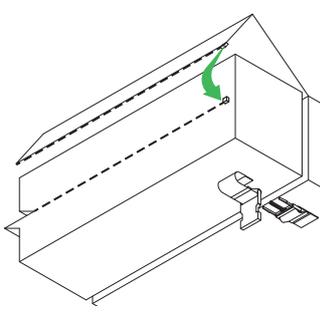

Установка заменителя матраса

 <p>Убедитесь, что кровать и боковые ограждения соответствуют матрасу по размеру, чтобы свести к минимуму образование щелей, в которых возможно защемление головы или тела пациента.</p>	<p>1</p> <p>Выровняйте кровать и установите тормоза.</p>	<p>2</p> <p>Снимите имеющийся матрас.</p>	<p>3</p> <p>Расположите матрас на каркасе кровати так, чтобы логотип находился в изголовье, а бирки с информацией об изделии — в изножье кровати.</p>
<p>4</p> <p>Удлиненная бариатрическая кровать:</p> <p>Поместите опору в щель между боковыми ограждениями и матрасом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Молниями наружу. • Отмеченным ножным концом к изножью кровати. 	<p>5</p> <p>Удлиненная бариатрическая кровать:</p>  <p>Соедините гнездовые части пряжек на нижней стороне левой и правой опоры с четырьмя входящими частями пряжек на нижней стороне матраса.</p>	<p>6</p> <p>Удлиненная бариатрическая кровать:</p>  <p>Присоедините матрас к вставкам матраса с помощью застежки-молнии.</p>	<p>7</p> <p>Когда опоры не используются, заправляйте рукава опор под матрас.</p>

Перемещение пациента

<p>1</p> <p>Перемещайте пациента в соответствии со всеми применимыми правилами безопасности и протоколами медицинского учреждения.</p>	<p>2</p> <p>Расположите пациента в центре матраса.</p>	<p>3</p> <p>Убедитесь, что все секции матраса полностью поддерживают пациента.</p> <p>Примечание. Ручки на матрасе служат только для переноски матраса.</p>
---	---	---

СЛП (CPR)

<p>1</p> <p>Приведите кровать в горизонтальное положение.</p> <p>При необходимости опустите или снимите боковые ограждения.</p>	<p>2</p> <p>Начинайте СЛП (CPR) согласно протоколам учреждения.</p> <p>При необходимости используйте спинную панель.</p>	<p>3</p> <p>После проведения СЛП (CPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снимите спинную панель (если она использовалась). • При необходимости поднимите или установите боковые ограждения. • Отрегулируйте кровать и комплектующие в соответствии с первоначальной установкой.
--	---	---