

AtmosAir Fit และ AtmosAir Plus



ติดตั้งระบบเบาะสำหรับเปลี่ยน



ตรวจสอบว่าโครงเตียงและ
ราวกันข้างเตียงมีขนาดเหมาะสม
กับเบาะเพื่อช่วยลดช่องว่างที่
อาจเกิดอุบัติเหตุหรือตัวผู้ป่วย

1

ปรับระดับเตียงและกดเบาะ

2

ถอดเบาะที่มือยื่นออก

3

จัดวางเบาะบนโครงเตียงโดยให้
โลโก้หงายขึ้นและเท็กข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ส่วนปลายเตียง

4


ขยายเตียงนอนสำหรับ
ผู้ป่วยฉนวน:

วางหมอนเสริมในช่องว่าง
ระหว่างราวกันข้างเตียง
และเบาะ:

- ซิปอยู่ด้านนอก
- ส่วนปลายเท้าที่ทำเครื่องหมาย
ไว้อยู่ที่ส่วนปลายเตียง

5


ขยายเตียงนอนสำหรับ
ผู้ป่วยฉนวน:

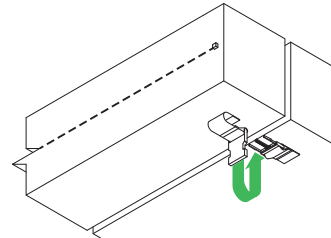

เชื่อมต่อหัวเข็มขัดตัวเมีย
ด้านล่างซ้ายและขวาของหมอน
เสริมกับหัวเข็มขัดตัวผู้
ด้านล่างของเบาะ

6

ขยายเตียงนอนสำหรับ
ผู้ป่วยฉนวน:

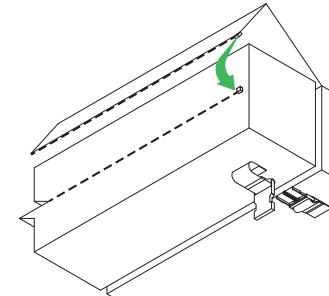

รัดซิปปิดเบาะกับไส้เบาะ

7

ถ้าไม่ได้ใช้หมอนเสริม
สอดปลอกหุ้มหมอนเสริม
ไว้ใต้เบาะ

วางผู้ป่วย

1

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติตาม
กฎความปลอดภัยและมาตรการ
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2

วางผู้ป่วยกึ่งกลางจากด้านข้าง
ทั้งสองด้านและจากศีรษะ
จรดเท้าบนพื้นผิวเบาะ

3

ตรวจสอบว่าทุกส่วนของเบาะรองรับอยู่ใต้ตัวผู้ป่วยอย่างเต็มที่
หมายเหตุ: ที่จับเบาะใช้สำหรับการขนย้ายเบาะเท่านั้น

CPR

1

ปรับระดับเตียง
ลดหรือถอดราวกันข้างเตียงออก
หากจำเป็น

2

เริ่มทำ CPR ตามมาตรการของ
สถานพยาบาลนั้น
ใช้กระดานรองหลังร่วมด้วย หากมีข้อบ่งชี้

3

หลังจากทำ CPR แล้ว:

- นำกระดานรองหลังออก หากใช้
- ยกหรือติดตั้งราวกันข้างเตียง
หากจำเป็น
- ปรับตำแหน่งเตียงและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ กลับสู่สภาพเดิม