


Miranti

Pulsantiera di controllo

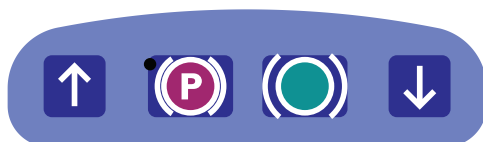

Pannello di controllo



Sollevare la barella.



Abbassare la barella.



Sollevare lo schienale.



Abbassare lo schienale.



Inserire il freno centrale.
Luce lampeggiante = freni inseriti.





Disinserire il freno centrale.


Arresto di emergenza



Sollevamento/discesa di emergenza

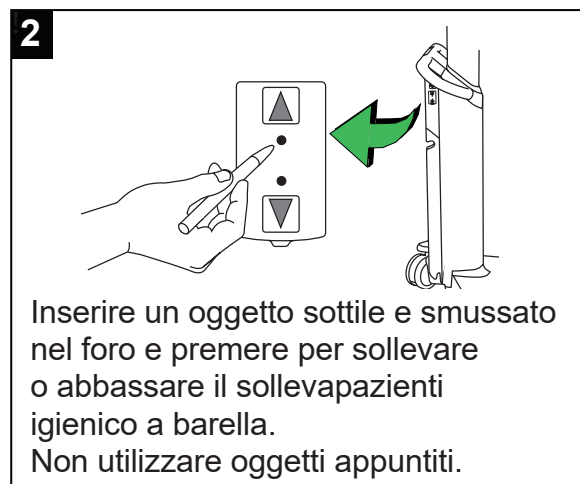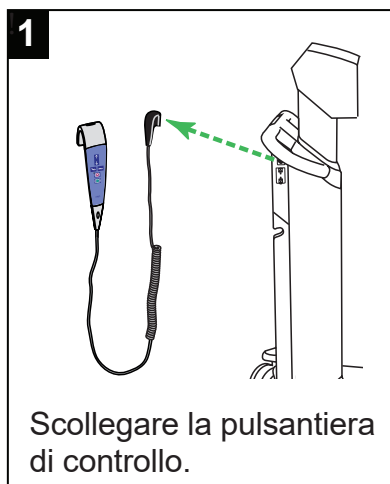


Schienale e fune di sollevamento

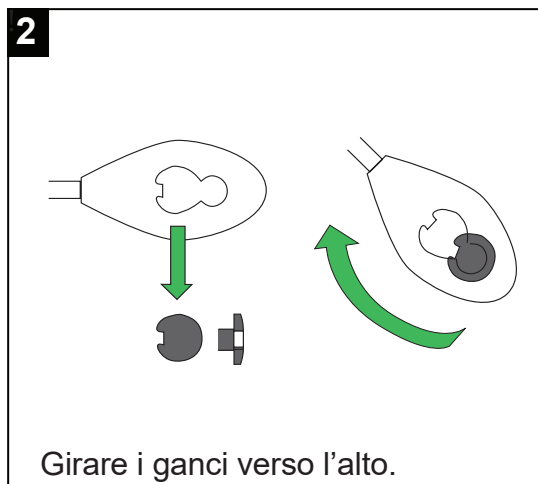


Spondina laterale e impugnatura di sicurezza per il paziente

1

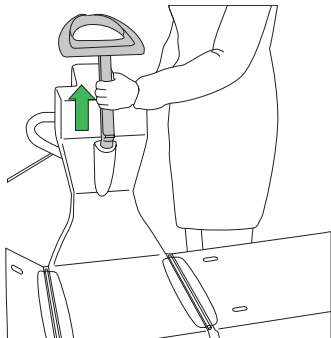


Alzare la maniglia verso l'alto.

2

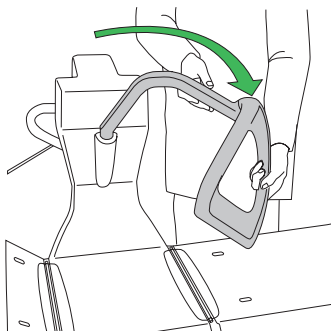




Abbassare la maniglia lontano dalla testa del paziente.

3

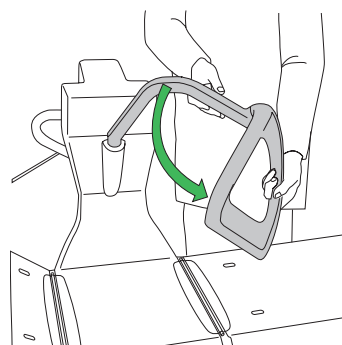

Posizionare la spondina.


Power Drive

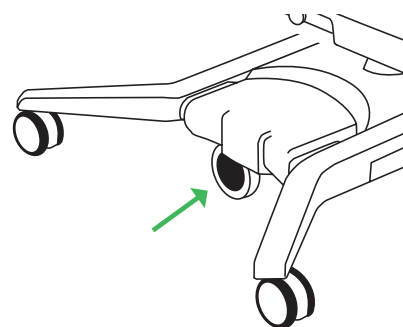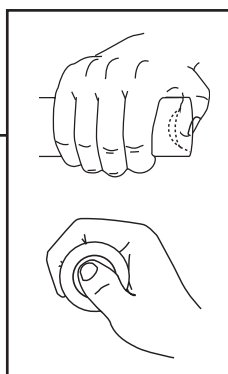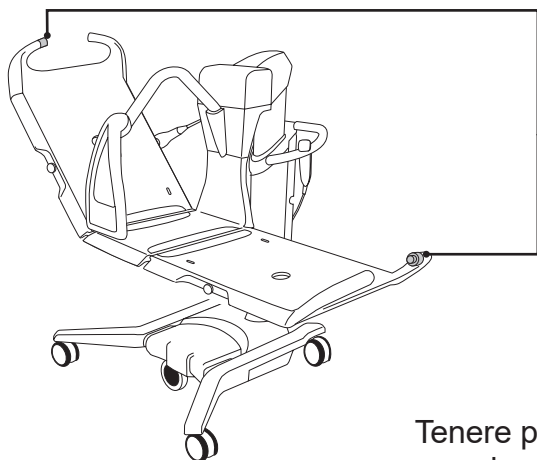

Tenere premuto il pulsante per abbassare la quinta ruota e avviare il motore di trasmissione elettrico.

Cuscino di supporto per le gambe.

Fissaggio

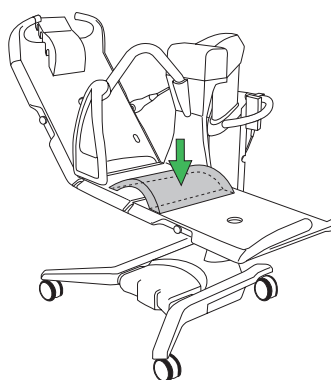

Rimozione

