


Bolero




Apturēšana avārijas situācijā

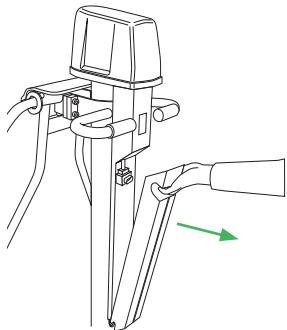


Lai ātri pārtrauktu pacēlāja kustību, atvienojiet akumulatoru un izņemiet to.

Pacelšana un nolaišana avārijas situācijās

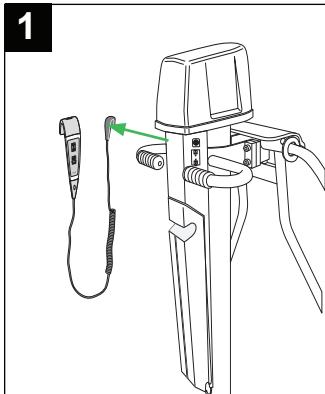


Atvienojiet rokas vadības ierīci.

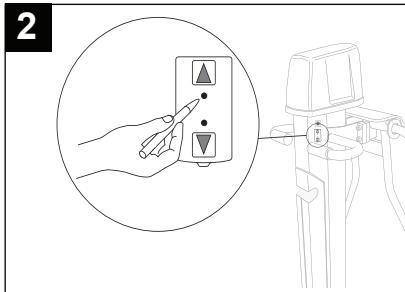


Nospiešanai izmantojiet neusu priekšmetu.
Pacelt: spiediet caurumiņā pie augšupvērstās bultiņas.
Nolaist: spiediet caurumiņā pie lejupvērstās bultiņas.

Manuālā pacelšana un nolaišana

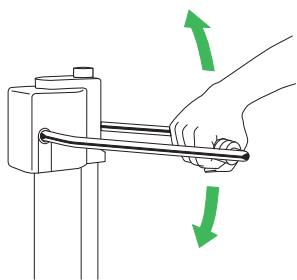


Pacelt: sūkni darbiniet ar pilnu kustību amplitūdu.
Nolaist: nospiediet nolaišanas pogu.

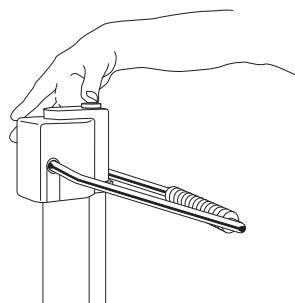


Nolaist: nospiediet nolaišanas pogu.

Elektriska pacelšana un nolaišana

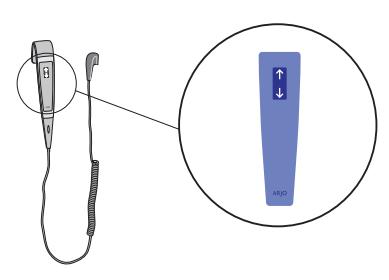


Pacelt: nospiediet augšupvērsto bultiņu.
Nolaist: nospiediet lejupvērsto bultiņu.

Bremzes

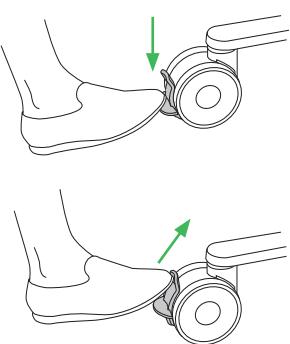


Nofiksēt bremzi: nospiediet uz leju.
Atlaist bremzi: pastumiet uz augšu.

Atzveltnē

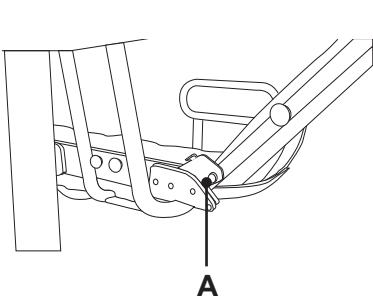

Atlaidiet vienu no aizbīdņiem (A) un izvēlēto pusī paceliet vai nolaidiet kā atzveltni līdz vēlamajam leņķim.

Rokturū stieņi

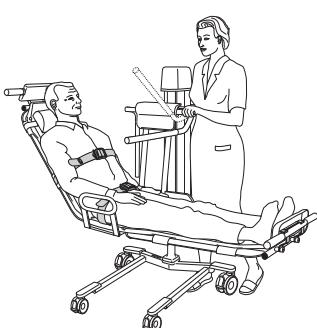

Pārvietojot un mazgājot: nolaidiet to roktura stieni, kas atrodas vistālāk no pacienta jostasvietas.


Matrača uzlikšana

1




Uzliekot vai noņemot matraci, vienmēr sāciet no sānu siksnes gala.

2

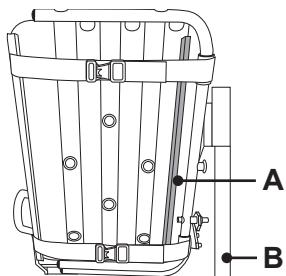

Sānu siksnu (A) piestipriniet apkārt nestuvju sānu daļai blakus hidrauliskajam statnim (B). Lai piesprādzētu matraci, piespiediet un velciet plaukstu gar sānu siksnu.


3

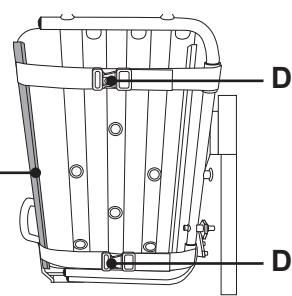

Izklājiet matraci un piesprādzējet otru sānu siksnu (C). Nofiksējet matraci ar ātrās fiksācijas skavām (D).


Nestuvju garuma regulēšana

1

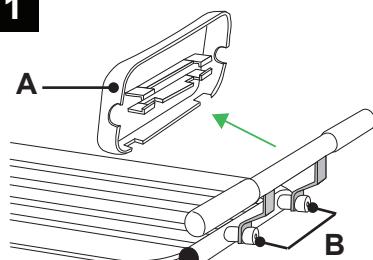

Noņemiet galvas vai kāju atbalstu (A) un izskrūvējiet skrūves (B).

2

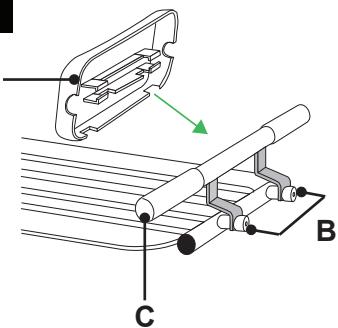

Pārvietošanas rokturis (C) jāpagriež pa 180°. Iestipriniet galvas vai kāju atbalstu (A) un ieskrūvējiet skrūves (B).

