



緊急停止

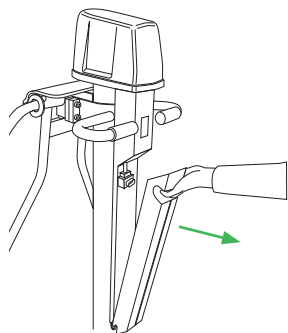

リフトの動きを素早く停止するには、バッテリーを取り外します。


緊急時の上昇、下降

1

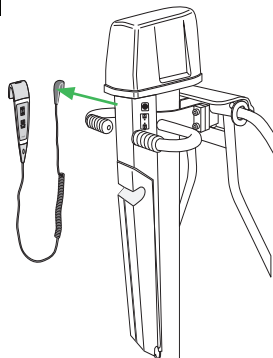


ハンドコントロールのプラグを抜きます。

2

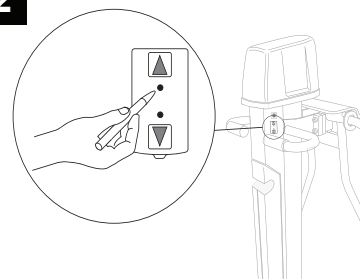


先端が尖っていないもので押します。
上昇：上矢印側の穴を押します。
下降：下矢印側の穴を押します。

上昇と下降 (手動)

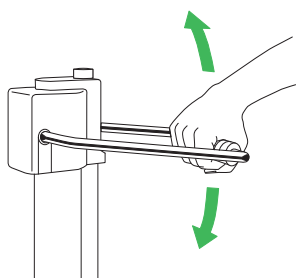


上昇：可動域全体でポンピングします。

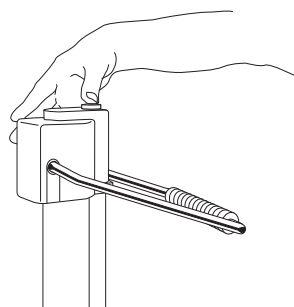


下降：下降ボタンを押します。

上昇と下降 (電動)

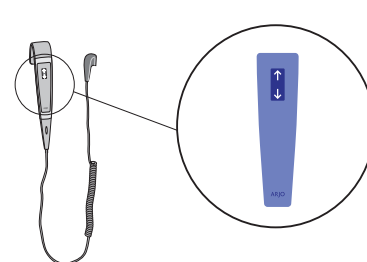


上昇：上矢印を押します。
下降：下矢印を押します。

ブレーキ

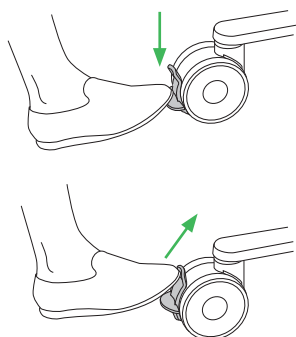


ブレーキをかける：押し下げます
ブレーキを解除する：押し上げます

背もたれ

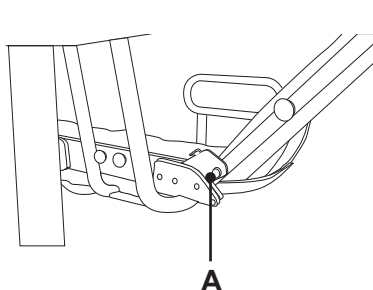

背もたれにする側の留め具 (A) を開放し、背もたれの角度を合わせます。


ハンドルバー

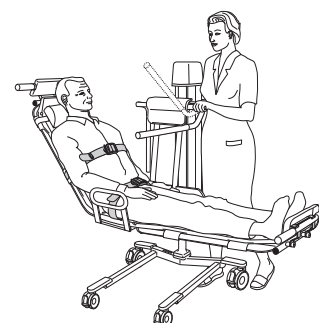

移動、入浴時：
患者様の腰から最も離れた位置までハンドルバーを下げます。


マットレスの取り付け

1

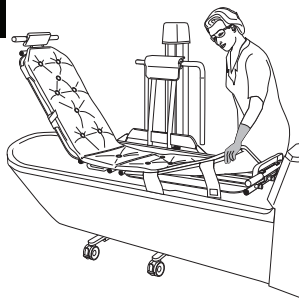


マットレスの着脱は、必ずサイドストリップの端から始めます。

2

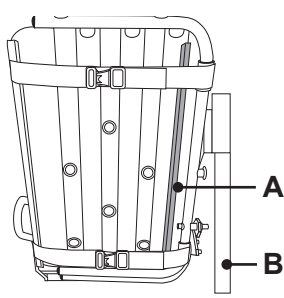

サイドストリップ (A) をストレッチャーの油圧ピラー (B) 側に取り付けます。
サイドストリップ沿いに手のひらで押し込んでいきます。


3

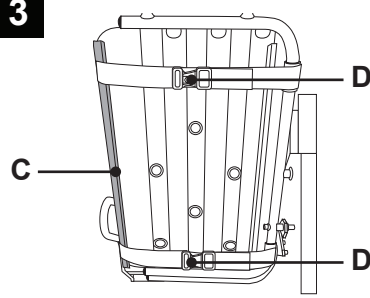

マットレスを延ばし、反対側のストリップ (C) を固定します。
クイックグリップ (D) でマットレスを固定します。


ストレッチャーの長さ調整

1

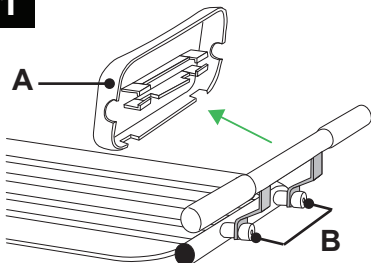

ヘッド/フットサポート (A) を外し、ネジ (B) を緩めます。

2

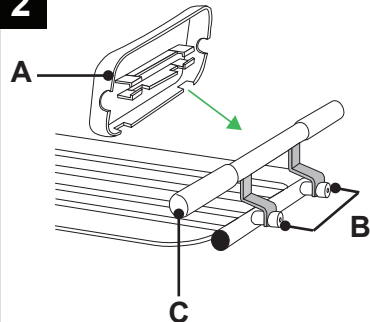

移動ハンドル (C) の向きを反転させます。
ネジ (B) を締め、ヘッド/フットサポート (A) を取り付けます。

