



Acil durdurma

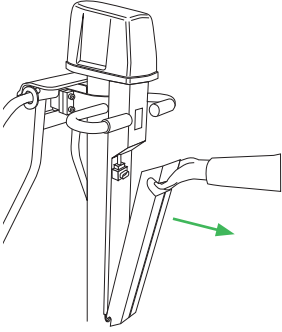


Liftin hareketini çabucak durdurmak için bataryayı ayırın ve çıkarın.

Acil yükseltme ve alçaltma

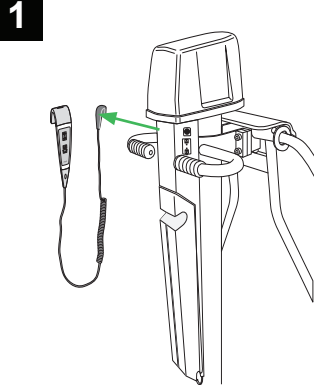


El kontrolünü soketinden çıkarın.

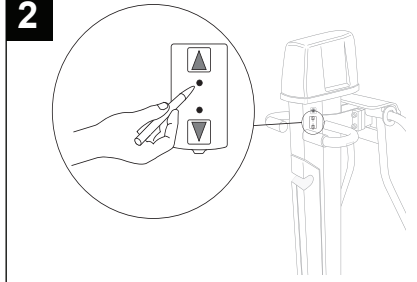


Bastırmak için ucu sivri olmayan bir nesne kullanın.
Yükseltme: Yukarı ok tarafındaki deliğe bastırın.
Alçaltma: Aşağı ok tarafındaki deliğe bastırın.

Elle Yükseltme ve Alçaltma

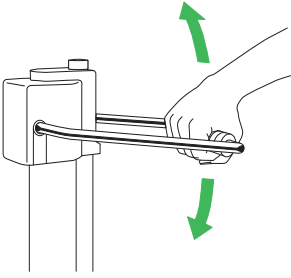


Yükseltme: Tam hareket aralığını kullanarak pompalayın.

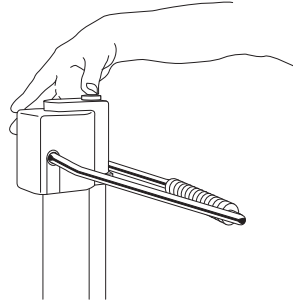


Alçaltma: Alçaltma düğmesine basın.

Elektrikli yükseltme ve alçaltma

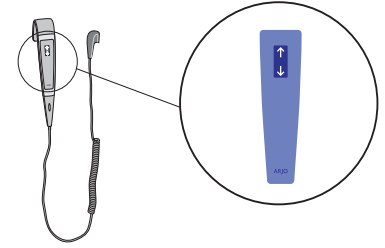


Yükseltme: Yukarı oka basın.
Alçaltma: Aşağı oka basın.

Frenler

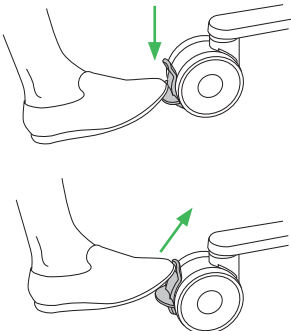


Freni etkinleştirme: Aşağı bastırın.
Freni devre dışı bırakma: Yukarı itin.

Sırt Desteği

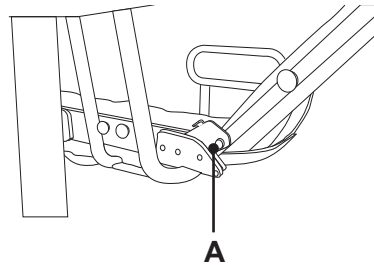

Mandallardan birini (A) açın ve sırt desteği olarak seçilen tarafı istenen açığa yükseltin veya alçaltın.


Tutma kolları

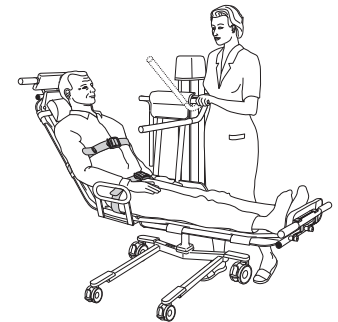

Transfer ve banyo sırasında: Hastanın belinden en uzaktaki tutma kolunu alçaltın.


Şilteyi takma

1

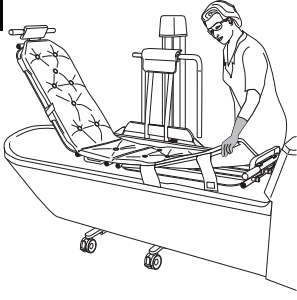


Şilteyi takarken veya sökerken daima yan şeridin kenarından başlayın.

2

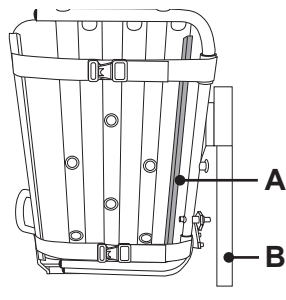

Yan şeridi (A), hidrolik direğin (B) yanındaki sedye kenarının etrafına takın. Yan şeridi oturtmak için bastırın ve yan şerit boyunca çekin.


3

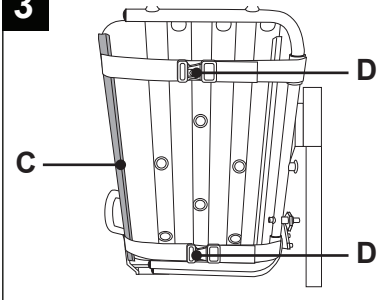

Şilteyi gerin ve diğer yan şeridi (B) sabitleyin. Hızlı kavramalarla (C) şilteyi yerine sabitleyin.


Sedye uzunluk ayarı

1

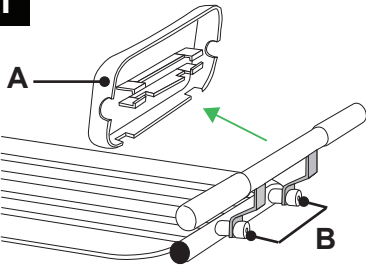

Baş veya ayak desteğini (A) çıkarın ve vidaları (B) sökün.

2

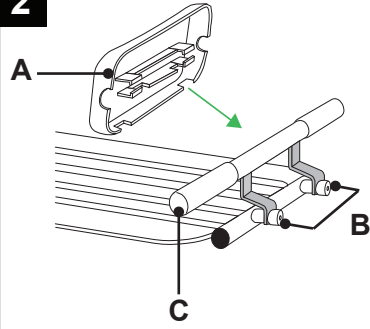

Tutma kolunu (C) 180° döndürün. Baş veya ayak desteğini (A) ve vidaları (B) takın.

