



緊急停止

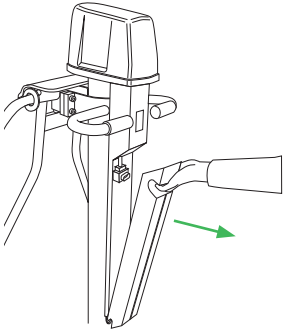


拆下電池，並將其取出可迅速停止抬升動作。

緊急升高與降低

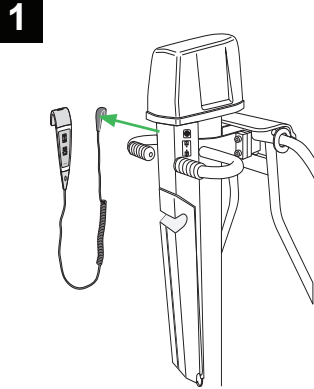


拔除手控器的電源。

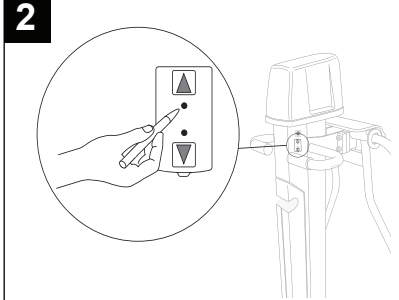


使用鈍物壓入孔洞。
升高：壓入箭頭向上的孔洞。
降低：壓入箭頭向下的孔洞。

手動升高與降低

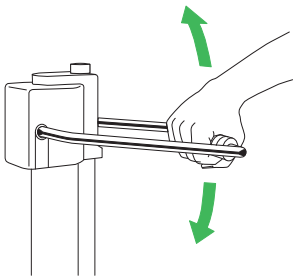


升高：請利用完整移動範圍進行液壓裝置抽吸。

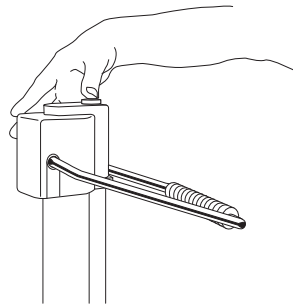


降低：按下降低按鈕。

電動升高與降低

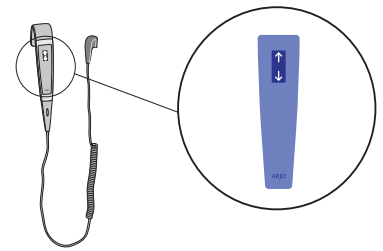


升高：按向上箭頭。
降低：按向下箭頭。

煞車

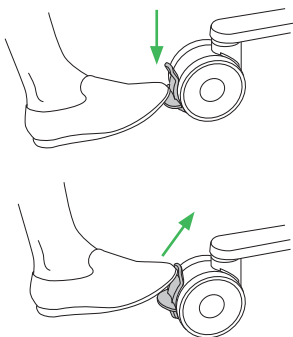


使用制動器：向下壓
釋放制動器：向上推

靠背

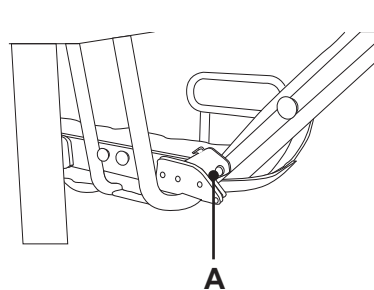

解開其中一個扣件 (A)，並將選為靠背的一端抬升或降低至希望的角度。


手柄

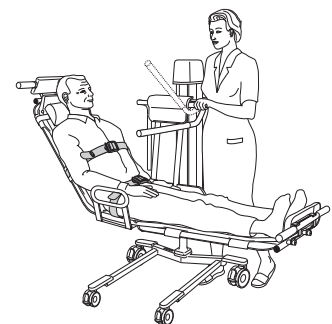

在轉位及沐浴時：
降低距離病患腰部最遠處的手柄。


安裝床墊

1

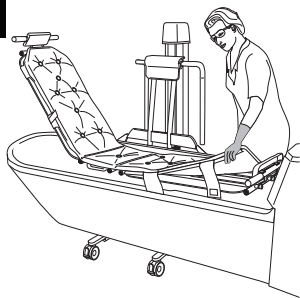


請務必從側條帶邊緣開始裝上或取下床墊。

2

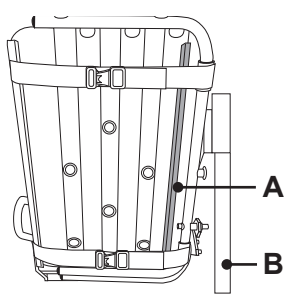

裝上擔架周邊靠近液壓枕頭 (B) 處的側條 (A)。
沿著側條帶用手掌壓住並拉入以裝上。


3

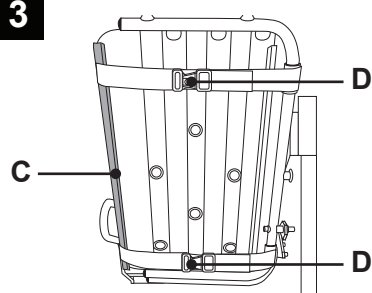

拉動床墊並固定另一邊的側條 (C)。
使用快速握把將床墊固定至定位 (D)。


擔架長度調整

1

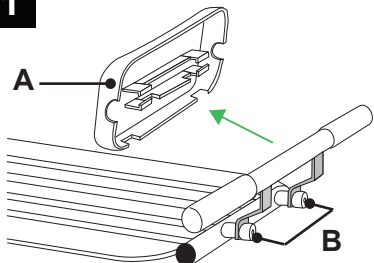

取下頭部或足部支架 (A) 並鬆開螺絲 (B)。

2

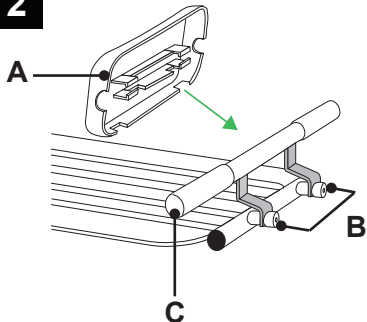

將轉位手把 (C) 旋轉 180 度。
固定頭部或足部支架 (A) 與螺絲 (B)。

