

## ASSISTERAT BAD MED JUSTERBAR HÖJD OCH TILTFUNKTION

# Parker®



Parker®-badkaret med sin karaktäristiska saxdörr är konstruerat för att patienten ska kunna ta sig i och ur badkaret med eller utan hjälp. Parker-badkaret är höj- och sänkbart och kan tiltas mellan sittande och tillbakalutad läge så att både vårdgivare och patient kan hitta lämpliga ställningar för en bättre badupplevelse.

Utformat med tanke på Albert, Barbara och Carl. Passar även Doris vid användning tillsammans med en passiv lyft.



### Förflyttning med eller utan hjälp

Parker kan justeras på höjden och placeras i sittande och bakåtlutad position. Dörren på sidan kan fällas upp för att underlätta åtkomsten för patienter med mobilitetsnivå A till C utan att de behöver använda en badlyft. Parker passar även patienter med mobilitetsnivå D om den används i kombination med en passiv taklyft.

### Flera nivåer av skållningsskydd

Temperaturindikering, blandarventiler för temperatur- och tryckreglering och automatisk avstängning av varmvattnet när temperaturen överstiger en säker nivå.

### Förstärk badets välgörande effekter

I Parker-badkaret kan man ta ett helt vanligt bad eller välja Air Spa™ och Sound and Vision™ som ökar avslappningen och maximerar badets välgörande effekter.

# Viktiga funktioner

## INGÅNG FRÅN SIDAN

Fungerar tillsammans med många olika förflyttningshjälpmedel, vilket underlättar användningen för patienter med nedsatt rörelseförmåga.

## HÖJ- OCH SÄNKBART MED TILTFUNKTION

Vårdpersonalen kan placera kareten på lämplig nivå utan att det blir obekvämt för patienten.

## FLERA OLIKA FUNKTIONER FÖR SKÄLLNINGSSKYDD

## DUSCHHANDTAG MED LÅSBAR AVTRYCKARE

Gör det möjligt för vårdpersonal att aktivera duschen vid patientnära arbete.

## HUVUD- OCH RYGGKUDDAR

För ytterligare komfort.

## INTEGRERAT RENGÖRINGS- OCH DESINFICERINGS-SYSTEM (TILLVAL)

## LUFTSPAFUNKTION (TILLVAL)

Med nio hastighetsreglerade vattenstrålar.

## AUTOMATISK PÅFYLNING

Fyller automatiskt badkaret till förinställd nivå.

## SOUND AND VISION (TILLVAL)

För en starkare upplevelse som stimulerar alla sinnen.



## ALLMÄNT

Säker arbetslast (SWL) (patient + vatten)	300 kg
Maxvikt patient	210 kg
Karets totalvikt	126 kg
Totallängd i upprätt position	1855 mm
Totallängd i bakåtlutad läge	1960 mm
Totalbredd	750 mm
Dörrhöjd med badkaret i det högsta läget och fötterna i det lägsta	2 510 mm
Säteshöjd vid lägsta position	565 mm
Säteshöjd vid högsta position	685 mm
Vattenförbrukning (förpåfyllt fotkar/autofyllningsnivå)	96 liter
Vattenförbrukning upp till bräddnivå	230 liter
Påfyllningstid vid 3bar (43,5 psi) dynamiskt tryck (förpåfyllning)	1,7 min
Tömningstid från nivå för automatisk påfyllning	3 min
IP-klass enligt IEC 60529	IP X4
IP-klass handkontroll och Sound & Vision-handkontroll	IP X7
Maximalt statiskt vattentryck	6 bar (600 kPa)
Minsta arbetstryck (för vissa varianter är detta beroende på land)	1 bar (100 kPa)

## STANDARDFUNKTIONER


- Vattentemperaturdisplay
- Flera olika funktioner för skällningsskydd
- Duschhandtag med låsbar avtryckare
- Automatisk fyllning
- Bräddavlopp
- Låsfunktion för manöverpanel
- Nödsänkning och -tiltning
- Nödstopp
- Huvudstödkudde

## TILLVALSFUNKTIONER

- Integrerat rengörings-/desinficeringsystem
- Air Spa-terapi
- Sound & Vision-terapi
- Varmvattenspolning (sats)
- Fotstöd och rygg-/sittkudde
- Dekorlist i blått eller grått

## UTRYMMESKRAV

Det blå området visar nödvändig arbetsyta för förflyttning och hygienvård av patienter på mobilitetsnivå A till C och som erbjuder tillräckligt med utrymme för patient, utrustning och vårdpersonal. Ytterligare utrymme kan krävas vid förflyttning av patienter på mobilitetsnivå D med en passiv lyft.

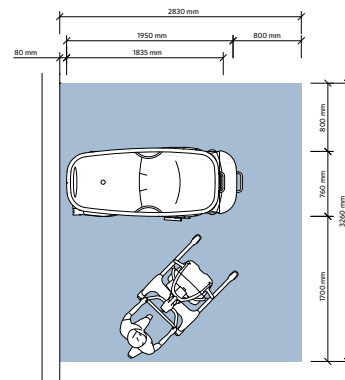

Mer information hittar du på [www.arjo.com](http://www.arjo.com)