


# Carevo

## 침대에서 환자 이송




1

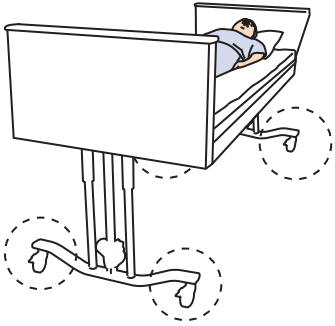


침대 브레이크를 적용합니다.

2

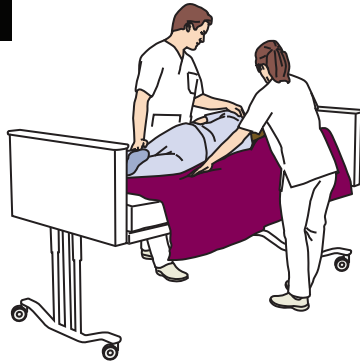


환자 밑에 슬라이딩 도구를 배치합니다.  
베개를 환자의 머리 밑에 배치합니다.  
이동 방향의 침대 레일을 아래로  
접으십시오.

3

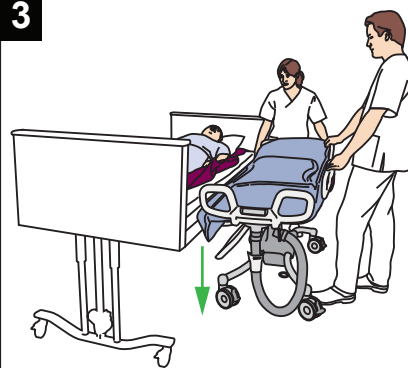


샤워 트롤리를 이동 방향 침대면 옆에  
배치합니다. 이동 방향 측면으로 샤워 트롤리  
매트리스를 아래로 접습니다.

4

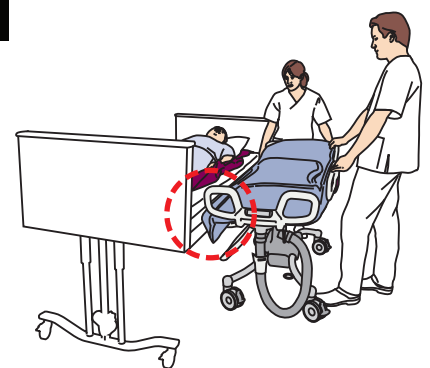

샤워 트롤리 매트리스 모서리를 아래로  
눌러 머리/발 패널과 지지판 사이에  
고정시킵니다.

5

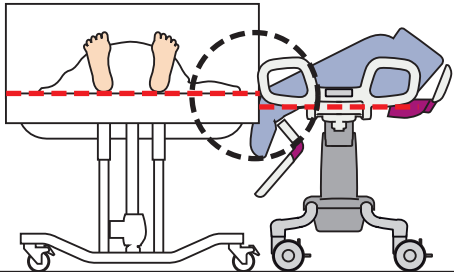


샤워 트롤리 높이를 침대보다 약간 낮게  
조정합니다.

6




기울어질 위험

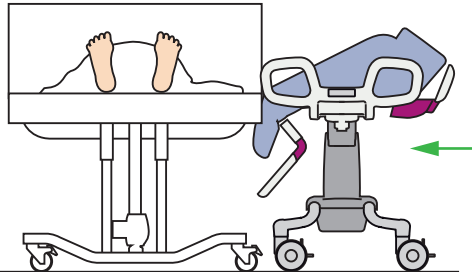

다른 장비를 높이거나 낮추지 마십시오.  
샤워 트롤리를 침대 쪽으로 밀니다.

7

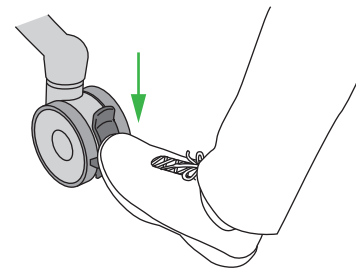


샤워 트롤리의 브레이크를  
적용합니다.

8



기울어질 위험

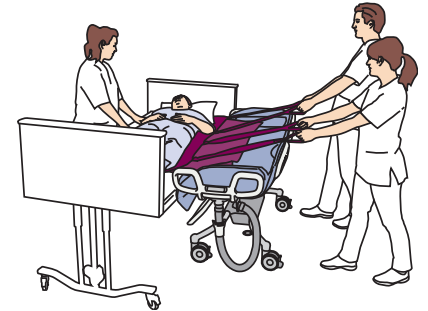

다른 장비를 높이거나 낮추지 마십시오.  
환자를 이송하십시오.  
환자의 머리에 주의하십시오.


다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨

## 침대에서 환자 이송(계속)

9



미끄러질 위험

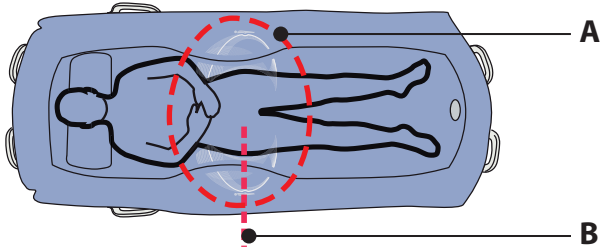


매트리스 측면을 접지 말고 세운 채로 유지하십시오.  
환자를 플렉시 존에 올바르게 배치하십시오.  
환자의 엉덩이가 표시된 그림(A) 안에 오도록 하십시오.  
환자의 엉덩이 관절이 접히는 부분을 인체 형상 그림(B)에 맞추십시오.

10



침대 베개를 샤워 트롤리 머리 베개로 교체합니다.  
슬라이딩 도구를 제거하십시오.

11

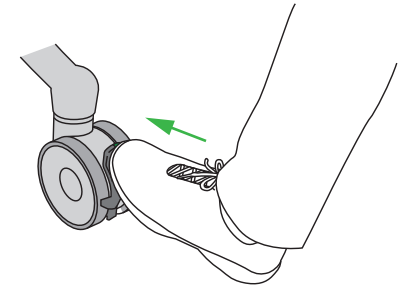


샤워 트롤리의 바퀴 브레이크를 해제합니다.

12



걸릴 위험  
낙상 위험

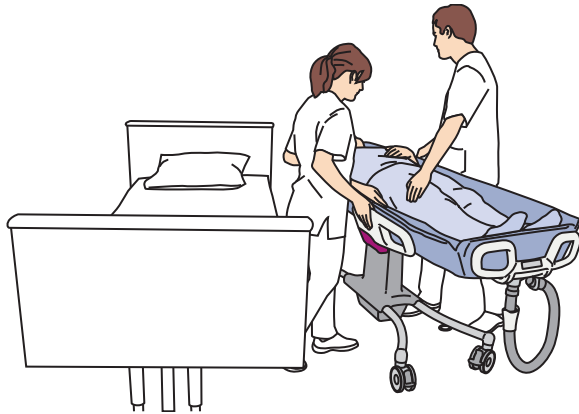

환자의 머리카락, 팔 및 발을 몸과 가깝게 유지합니다.  
샤워 트롤리를 침대로부터 조심스럽게 멀리 이동시켜 샤워 트롤리의 측면 지지대를 접어 올려서 잠글 수 있을 만큼의 공간을 확보합니다.


13



해당하는 경우 샤워 트롤리 조절식 등 지지대를 상승시킵니다.  
환자를 이동합니다.


## 침대로 환자 이송

1

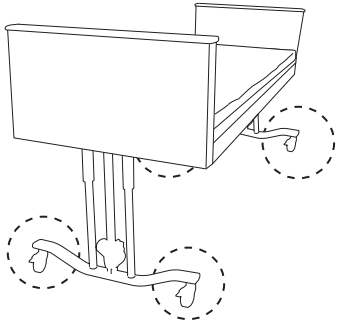

침대 브레이크를 적용합니다.  
이동 방향의 침대 레일을 아래로 접습니다.

2

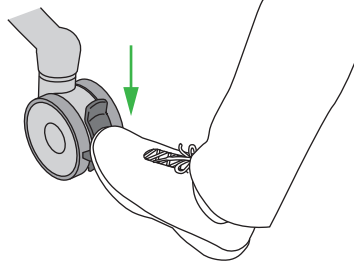


샤워 트롤리의 브레이크를 적용합니다.  
해당하는 경우 샤워 트롤리 조절식 등  
지지대를 하강시킵니다.

3



환자 밑에 슬라이딩 도구를 배치합니다.

4

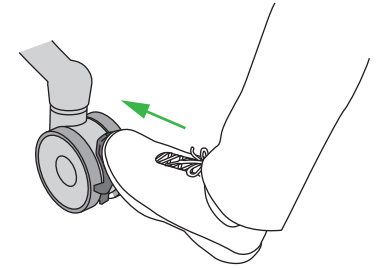

샤워 트롤리의 바퀴 브레이크를  
해제합니다.

5



걸릴 위험



환자의 머리카락, 팔 및 발을 몸과 가깝게 유지합니다.  
샤워 트롤리를 침대와 가깝게 배치합니다.  
이동 방향의 샤워 트롤리 측면 지지대를 아래로 접습니다.

6




기울어질 위험



샤워 트롤리를 침대에 겹치도록 가깝게 배치합니다.  
샤워 트롤리를 침대 위로 하강시켜 이동 시 높이를 동등하게  
조정합니다.

7

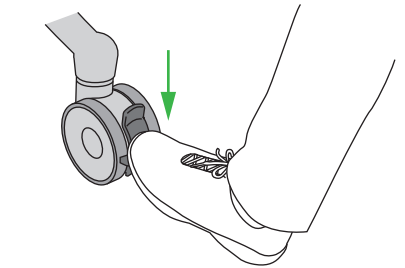


샤워 트롤리의 브레이크를  
적용합니다.

다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨


## 침대로 환자 이송(계속)

8

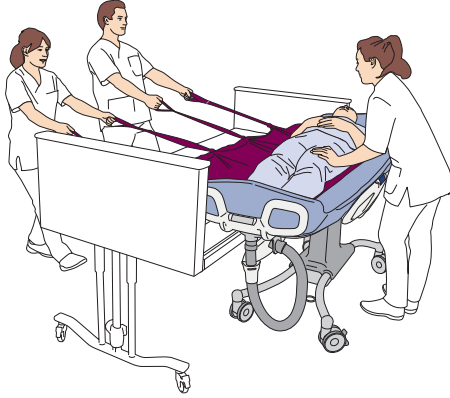


샤워 트롤리 매트리스가 침대 맨 위에 위치하는지 확인하십시오.  
슬라이딩 도구를 사용하여 환자를 이동시키십시오.  
환자의 머리에 주의하십시오.

9

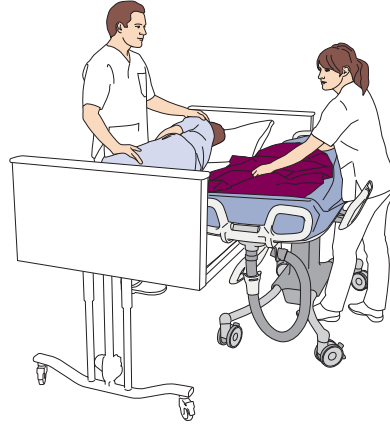

샤워 트롤리 머리 베개를 침대 베개로 교체합니다.  
슬라이딩 도구를 제거하십시오.

10

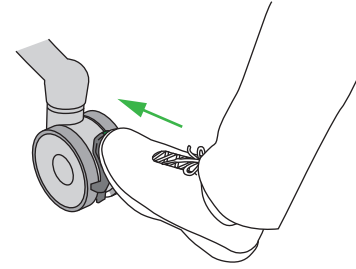

샤워 트롤리의 바퀴 브레이크를 해제합니다.


11



샤워 트롤리를 침대로부터 먼 쪽으로 이동시킵니다.  
샤워 트롤리를 소독합니다.

## 슬링 리프트에서 환자 이송

1

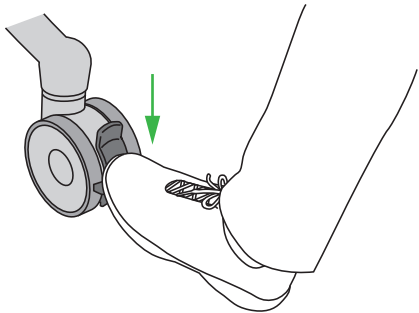

샤워 트롤리:

- 최저 높이로 하강시킵니다.
- 브레이크를 적용합니다.
- 측면 지지대를 접어 올리고 잠급니다.
- 머리 베개를 배치합니다.

2



걸릴 위험  
낙상 위험




환자의 머리카락, 팔 및 발을 몸과 가깝게 유지합니다.  
해당하는 경우 샤워 트롤리 조절식 등 지지대를 앉은 자세로 상승시킵니다. 환자를 샤워 트롤리로 내립니다.

3




미끄러질 위험

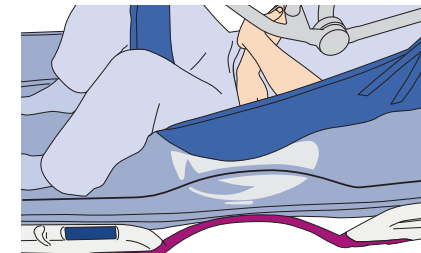


매트리스 측면을 접지 말고 세운 채로 유지하십시오.  
환자를 플렉시 존에 올바르게 배치하십시오.  
환자의 엉덩이가 표시된 그림 안에 오도록 하십시오.  
환자의 엉덩이 관절이 접히는 부분을 인체 형상 그림에 맞추십시오.

4

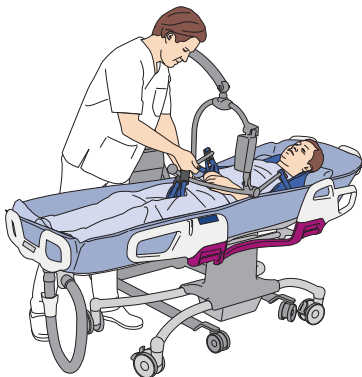

슬링을 스프레더 바에서 분리합니다.  
리프트를 샤워 트롤리로부터 먼 쪽으로 이동시킵니다.

5

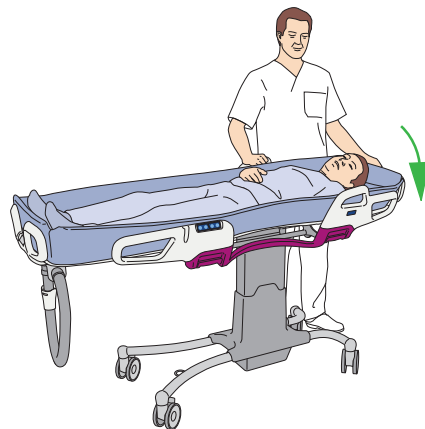


샤워 트롤리를 인체공학적 높이로 조정합니다.  
해당하는 경우 샤워 트롤리 조절식 등 지지대를 하강시킵니다.

6



환자 밑의 슬링을 제거합니다.


7

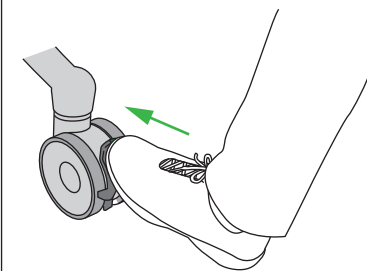

샤워 트롤리의 바퀴 브레이크를 해제합니다.  
환자를 이동합니다.


## 슬링 리프트로 환자 이송

1

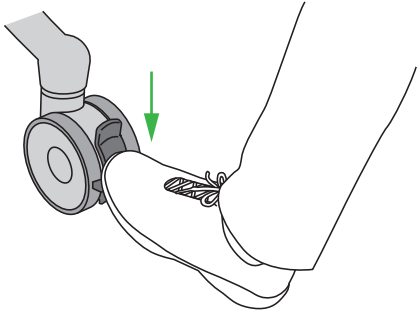


샤워 트롤리의 브레이크를 적용합니다.

2

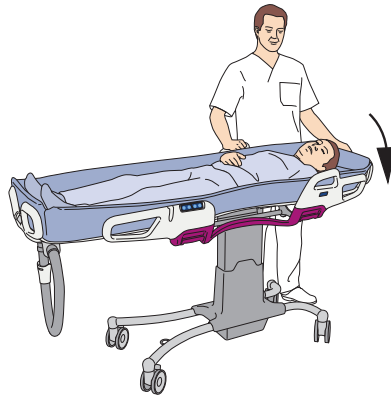

해당하는 경우 샤워 트롤리 조절식 등 지지대를 하강시킵니다.

3

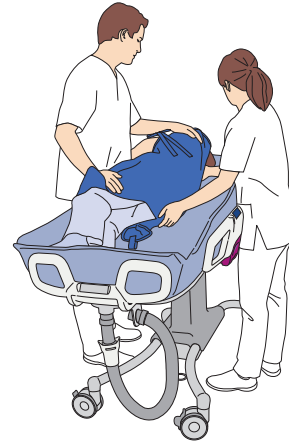

슬링을 환자에게 사용합니다.

4




샤워 트롤리를 최저 높이로 하강시킵니다. 리프트의 스프레더 바를 샤워 트롤리 위로 배치합니다. 슬링을 스프레더 바에 부착합니다.

5




걸릴 위험  
낙상 위험

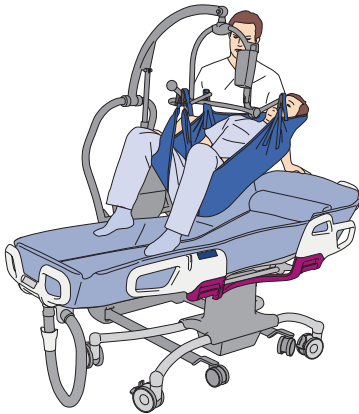

환자의 머리카락, 팔 및 발을 몸과 가깝게 유지합니다.  
측면 지지대를 잠급니다.  
환자를 샤워 트롤리 밖으로 들어 올립니다.


6

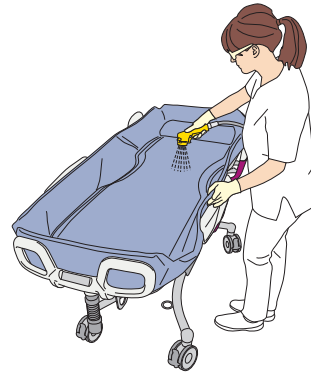

샤워 트롤리를 소독합니다.

## 환자 샤워시키는 방법

1

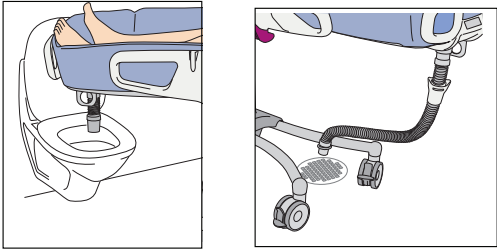


A

B

샤워 트롤리 상부 배수구를 변기/양변기 배수구(A)에 배치하거나 배수 호스 홀더의 하부 배수구를 바닥 배수구 위에(B) 배치하십시오.

2

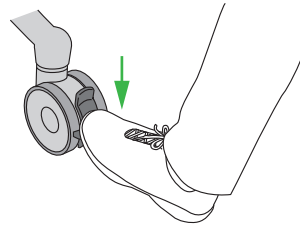


샤워 트롤리의 브레이크를 적용합니다.

3




화상의 위험

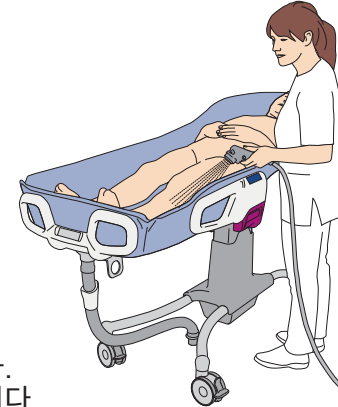


환자의 옷을 벗깁니다.  
물의 온도를 설정합니다.  
샤워기 손잡이가 환자와 **다른 방향**을 향하게 합니다.  
물을 톹니다.  
(귀하의) 맨손으로 온도를 확인합니다.

4

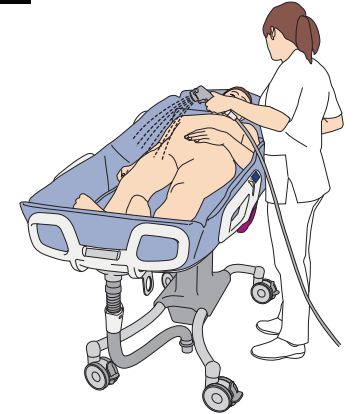


환자를 샤워시킵니다.

5

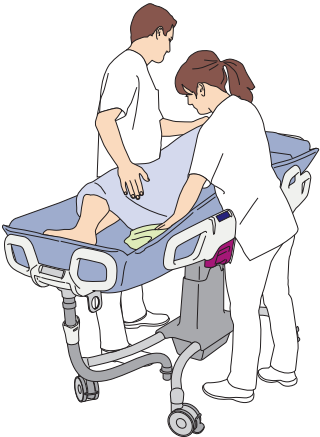


물을 빼내고 환자와 매트리스를 건조시킵니다.

6

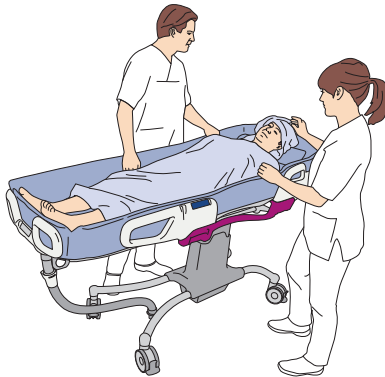


환자의 몸을 덮거나 옷을 입힙니다.

7

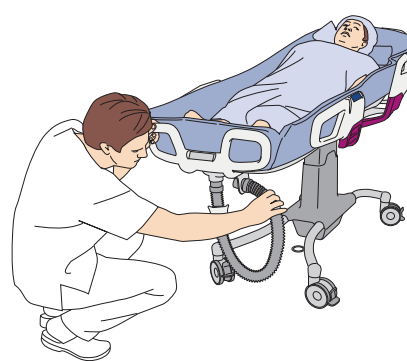


하부 배수구를 다시 홀더 안에 넣거나 하부 배수구를 상부 배수구에 부착합니다.

8

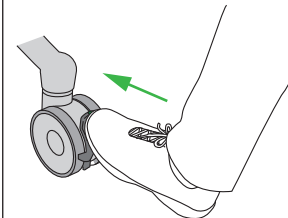

샤워 트롤리의 바퀴 브레이크를 해제합니다.

9

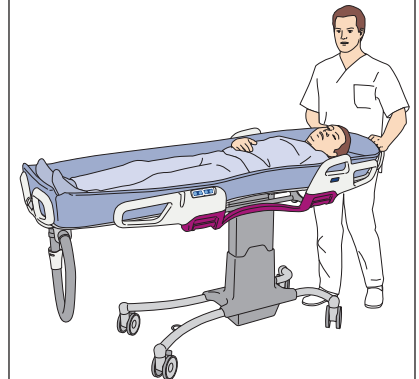

환자를 이동합니다.

