



1

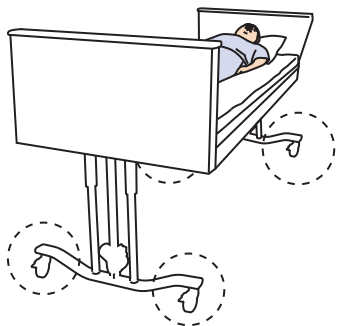


Rakendage voodi pidurid.

2

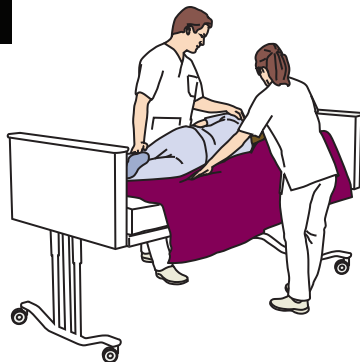


Asetage libistuslina patsiendi alla. Asetage padi patsiendi pea alla. Laske voodi külgsiire ümberpaigutamiseks kasutataval küljel alla.

3

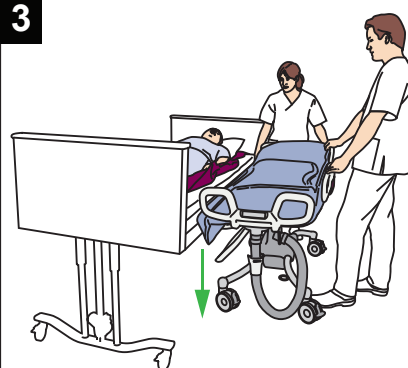


Paigutage dušikäru voodi ümberpaigutamise külje kõrvale. Laske dušikäru madrats ümberpaigutamise küljel alla.

4

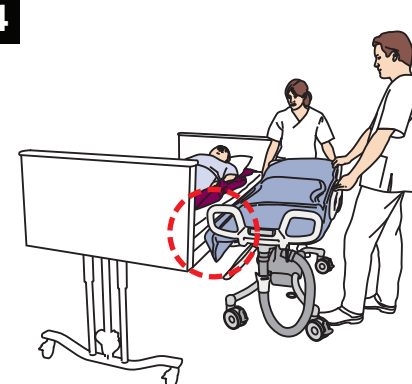

Suruge dušikäru madratsi nurgad alla ja fikseerige need pea-/jalgsaneeli ning tugiplaadi vahele.

5

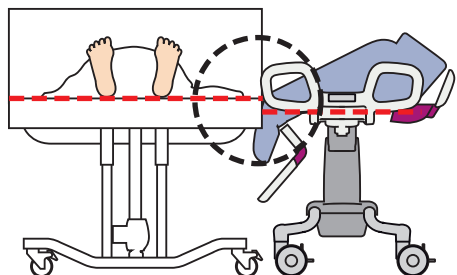


Reguleerige dušikäru kõrgus voodist veidi madalamale.

6




Ümberminemise oht

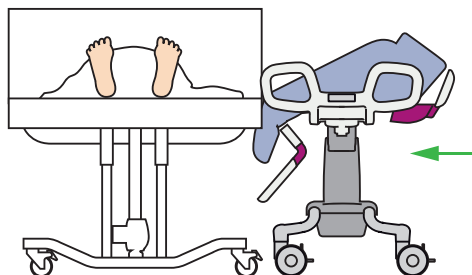

Ärge tõstke ega langetage seadet. Lükake dušikäru vastu voodit.

7

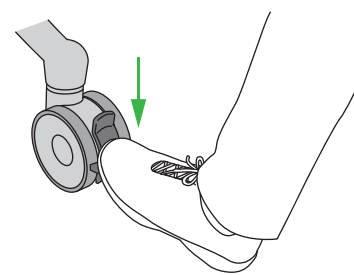


Rakendage dušikäru pidurid.

8



Ümberminemise oht

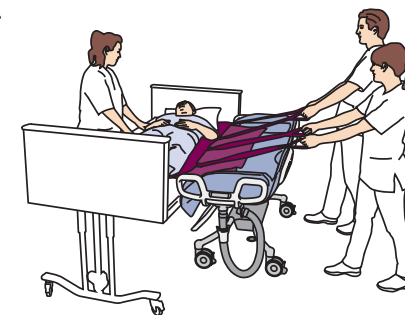

Ärge tõstke ega langetage seadet. Paigutage patsient ümber. Pöörake tähelepanu patsiendi peale.


Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel

## Voodist tõstmine, jätkub

9



Väljalibisemisoht

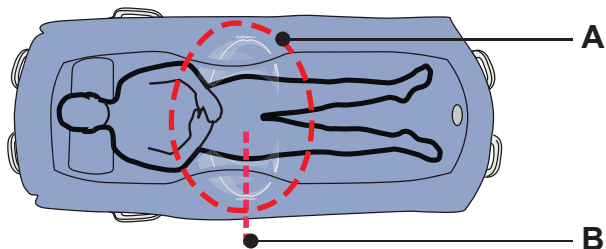


Hoidke madratsi küljed üleval, mitte kokkuvoldituna.  
Paigutage patsient õigesti elastsesse tsooni.  
Patsiendi tuharad koontuurjoonte (A) piires.  
Patsiendi puusanukid inimkeha kujutistega (B) ühel joonel.

10



Asendage voodipadi dušikäru peapadjaga.  
Eemaldage libistuslina.

11

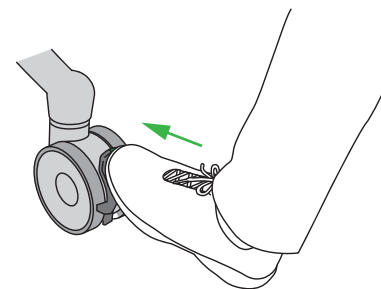

Vabastage dušikäru pidurid.

12




Kinnijäämise oht  
Kukkumise oht



Hoidke patsiendi juuksed, käed ja jalad keha lähedal.  
Liigutage dušikäru voodist ettevaatlikult piisavalt kaugemale,  
et saaksite dušikäru külgtoe üles tõsta ja lukustada.


13

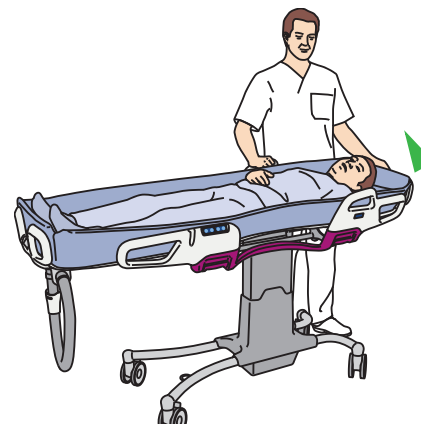

Tõstke dušikäru reguleeritavat seljatuge, kui see on olemas.  
Transportige patsient.


## Voodisse tõstmine

1

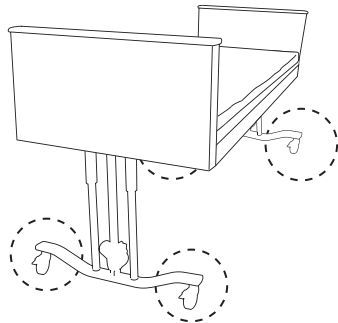

Rakendage voodi pidurid.  
Laske voodi külgi ümberpaigutamiseks kasutataval küljel alla.

2

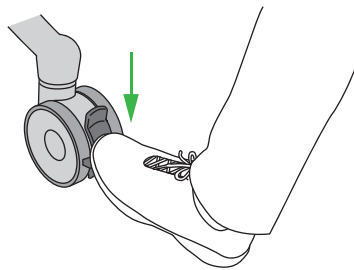


Rakendage dušikäru pidurid.  
Langetage dušikäru reguleeritavat seljatuge, kui see on olemas.

3



Asetage libistustlina patsiendi alla.

4

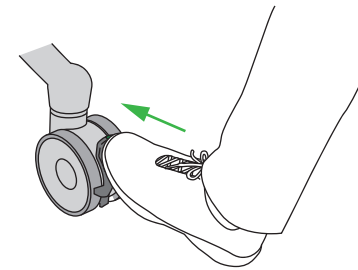


Vabastage dušikäru pidurid.

5



Kinnijäämise oht

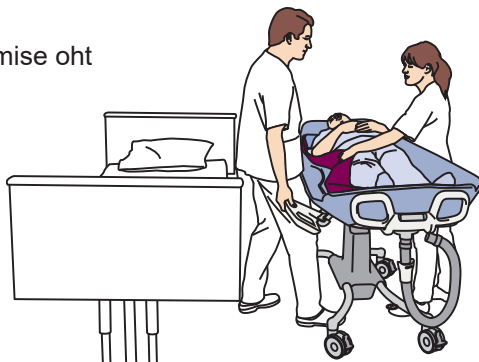


Hoidke patsiendi juuksed, käed ja jalad keha lähedal.  
Viige dušikäru voodi lähedale.  
Laske dušikäru ümberpaigutamise poolel asuv külgtugi alla.

6




Ümberminemise oht

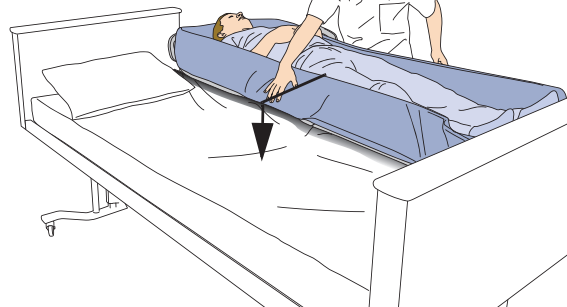

Paigutage dušikäru viivitamatult nii, et see ulatuks üle voodi.  
Ühtlaseks ümberpaigutamiseks langetage dušikäru voodile.

7

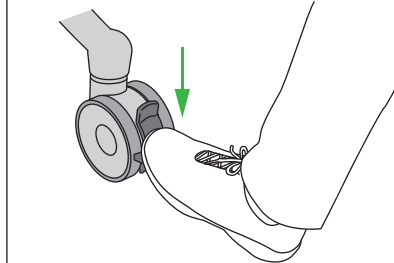


Rakendage dušikäru pidurid.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel


## Voodisse tõstmine, jätkub

8

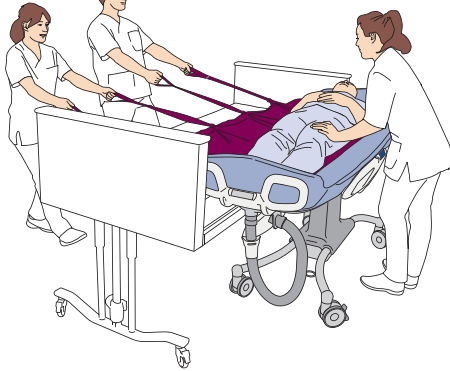


Kontrollige, kas dušikäru madrats on voodi peal. Paigutage patsient libistuspinnale abil ümber. Pöörake tähelepanu patsiendi peale.

9

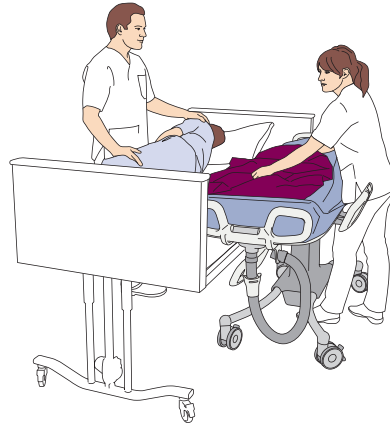


Asendage dušikäru peapadi voodipadjaga. Eemaldage libistuspinnal.

10

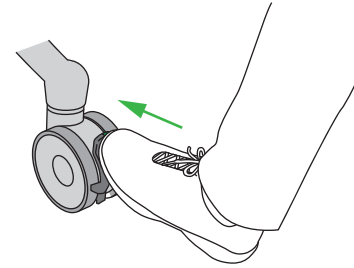

Vabastage dušikäru pidurit.


11

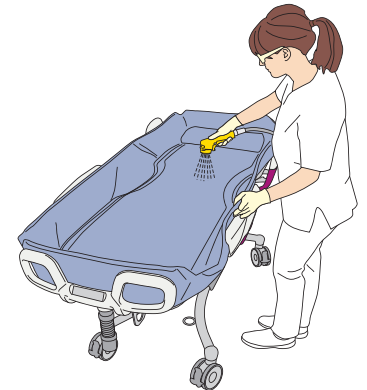

Liigutage dušikäru voodist eemale. Desinfitseerige dušikäru.

## Lingtõstukist tõstmine

1

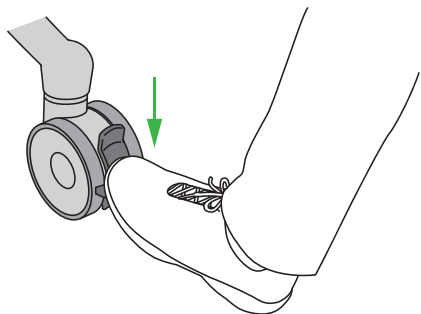

Dušikäru:

- Langetage väikseimale kõrgusele
- Rakendage pidurid
- Keerake külgtööd üles ja lukustage need
- Asetage peapadi

2



Kinnijäämise oht  
Kukkumisoht




Hoidke patsiendi juuksed, käed ja jalad keha lähedal.  
Tõstke dušikäru reguleeritav seljatugi istumise asendisse, kui see on olemas. Langetage patsient dušikärule.

3




Väljalibisemisoht

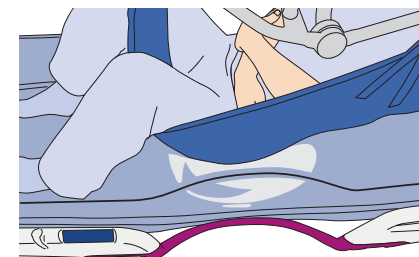


Hoidke madratsi küljed üleval, mitte kokkuvoldituna, Paigutage patsient õigesti elastsesse tsooni. Patsiendi tuharad peavad olema koontuurjoonte piires. Patsiendi puusanukid peavad olema inimkeha kujutistega ühel joonel.

4

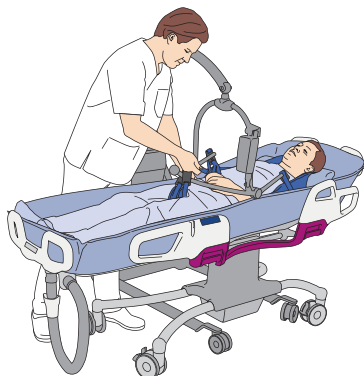

Eemaldage tõstelina tõsteraami küljest.  
Liigutage tõstuk dušikärust eemale.

5

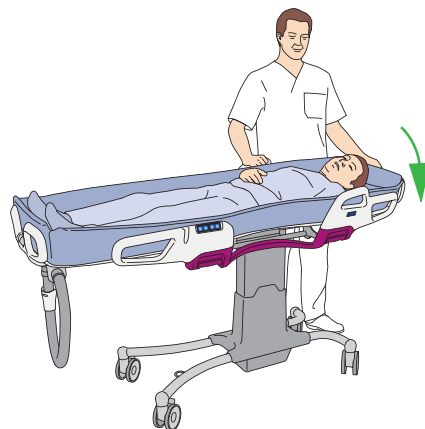


Reguleerige dušikäru ergonoomilisele kõrgusele.  
Langetage dušikäru reguleeritavat seljatuge, kui see on olemas.

6



Eemaldage tõstelina patsiendi alt.


7

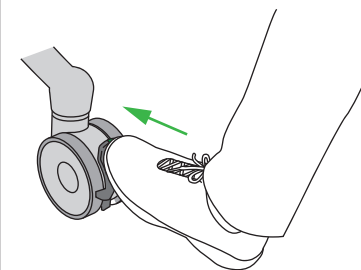

Vabastage dušikäru pidurid.  
Transportige patsient.


## Lingtõstukisse tõstmine

1

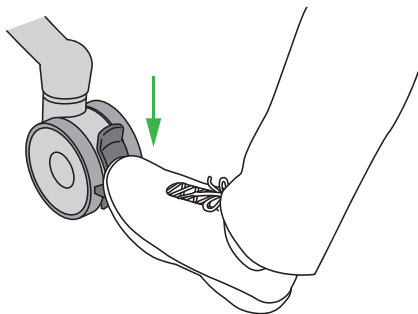

Rakendage dušikäru pidurid.

2

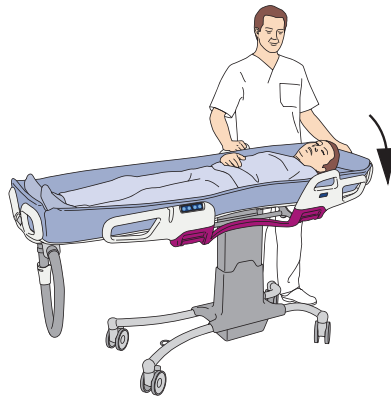

Langetage dušikäru reguleeritavat seljatuge, kui see on olemas.

3



Paigutage patsient tõstelinale.

4



Langetage dušikäru väikseimale kõrgusele. Seadke tõstuki tõsteraam dušikäru kohale. Kinnitage tõstelina tõsteraami külge.

5




Kinnijäämise oht  
Kukkumise oht



Hoidke patsiendi juuksed, käed ja jalad keha lähedal.  
Lukustage külgtööd.  
Tõstke patsient dušikärust välja.


6

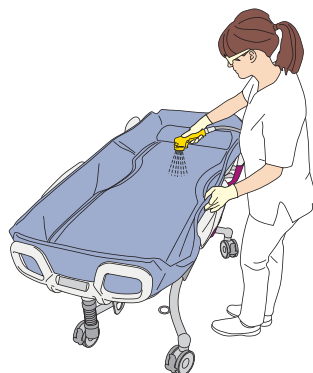

Desinfitseerige dušikäru.

## Patsiendi dušitamine

1

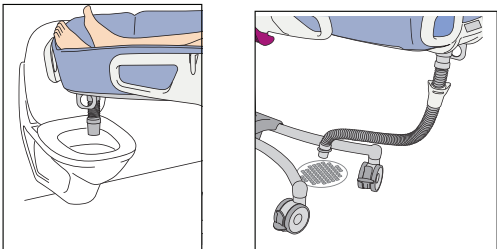


A

B

Paigutage dušikäru ülemine äravool tualetipoti/ süvisvalamu (A) kohale või paigutage alumine äravoolu väljalaskeava äravoolutoru hoidikusse, põranda äravoolu (B) kohale.

2

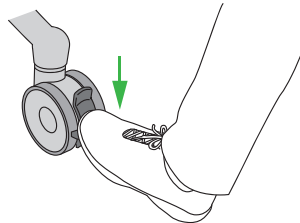


Rakendage dušikäru pidurid.

3




Põletusohv

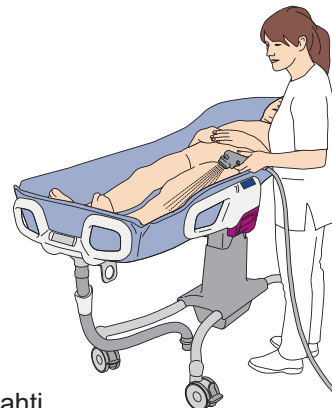


Võtke patsient riidest lahti.  
Seadke vesi sobivale temperatuurile.  
Suunake dušikäepide patsiendist **eemale**.  
Keerake vesi jooksmas.  
Kontrollige temperatuuri **oma** palja käega.

4

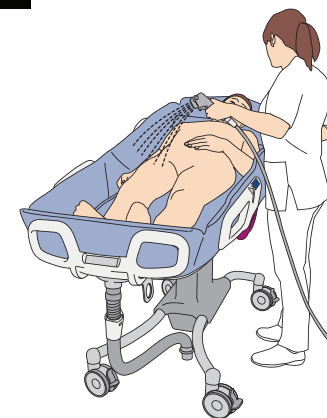


Dušitage patsienti.

5

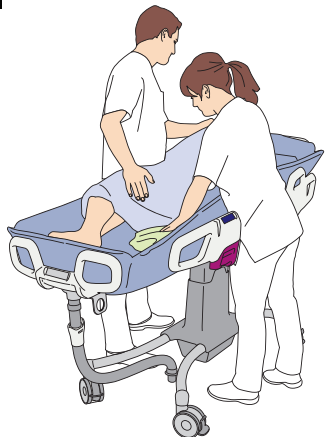


Laske veel välja voolata ning kuivatage patsient ja madrats.

6

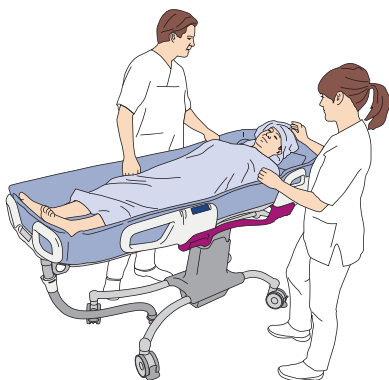


Katke patsient või pange ta riidesse.

7

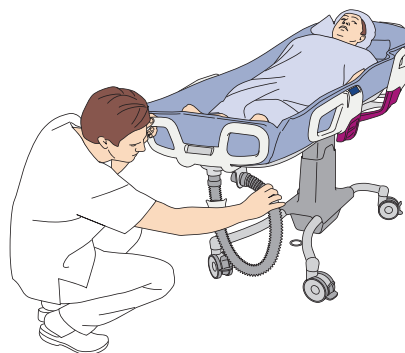


Paigutage alumine äravoolu väljalaskeava tagasi hoidikusse või kinnitage alumine äravool ülemise äravoolu külge.

8

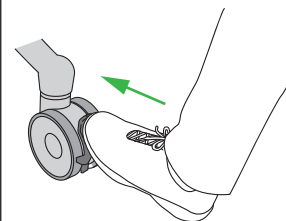

Vabastage dušikäru pidurid.

9

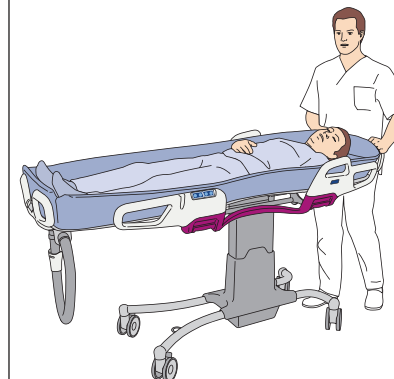

Transportige patsient.

