
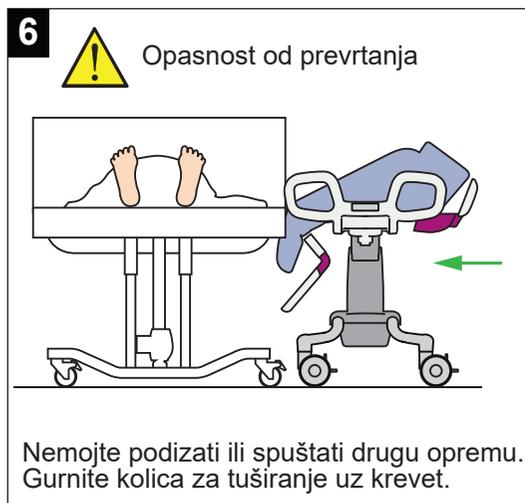
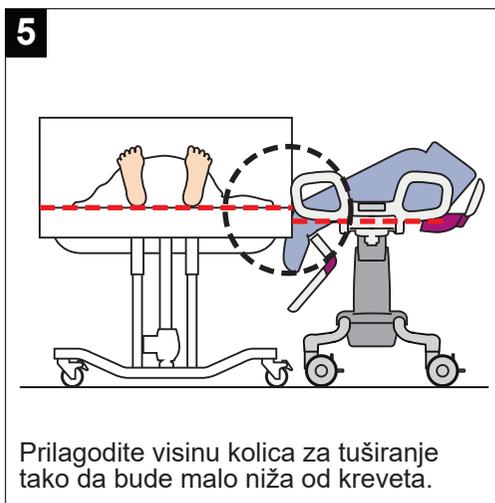


# Carevo

## Prijenos s kreveta

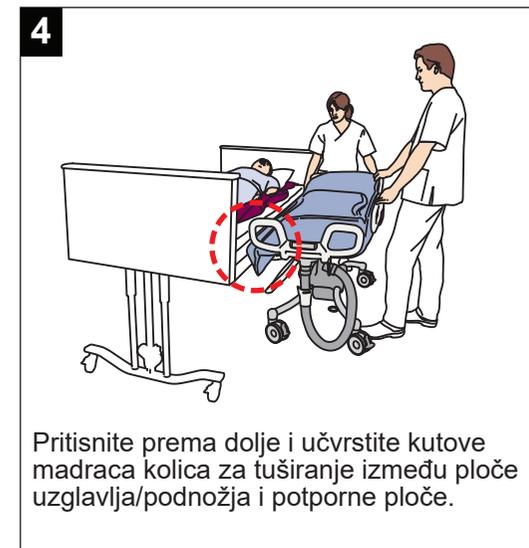


*Nastavite s koracima na sljedećoj stranici*

## Prijenos s kreveta – nastavak

9



Opasnost od iskliznuća

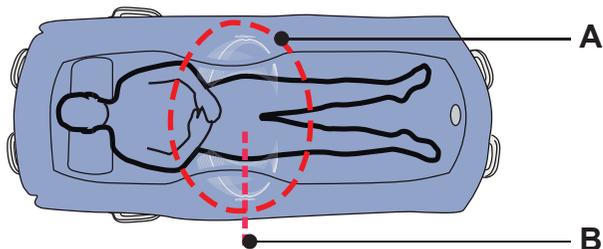


Stranice madraca držite prema gore, ne preklopljene.  
Pacijenta namjestite ispravno u područje Flexi Zone.  
Pacijentova stražnjica unutar grafičkog prikaza (A).  
Konture pacijentovih kukova poravnate s ljudskim tijelom (B).

10



Jastuk za krevet zamijenite jastukom za glavu kolica za tuširanje.  
Uklonite pomoćni klizač.

11

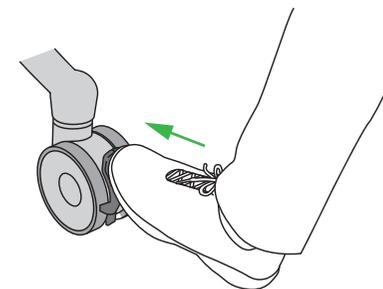


Otpustite kočnice na kolicima za tuširanje.

12



Opasnost od priklještjenja  
Opasnost od pada

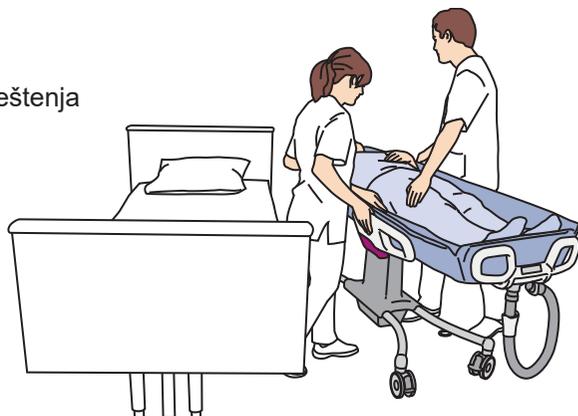

Pacijentovu kosu, ruke i stopala držite uz tijelo.  
Pažljivo odmaknite kolica za tuširanje od kreveta kako biste mogli otklopiti  
i blokirati bočnu potporu na kolicima za tuširanje .


13



Podignite prilagodljivi naslon za leđa kolica za tuširanje  
ako je dostupan.  
Prenesite pacijenta.


## Prijenos na krevet

1

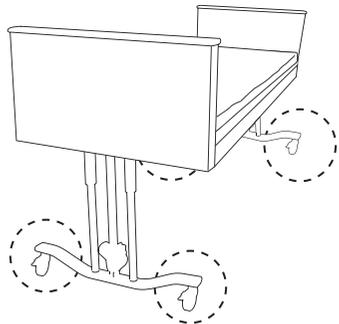

Primijenite kočnice na krevetu.  
Spustite ogradu kreveta na strani prenošenja.

2

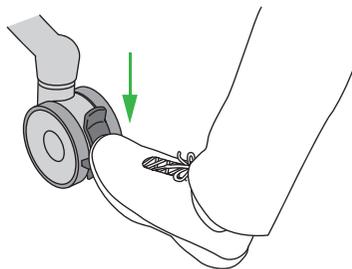


Primijenite kočnice na kolicima  
za tuširanje.  
Spustite prilagodljivi naslon za leđa  
kolica za tuširanje ako je dostupan.

3



Postavite pomoćni klizač ispod pacijenta.

4

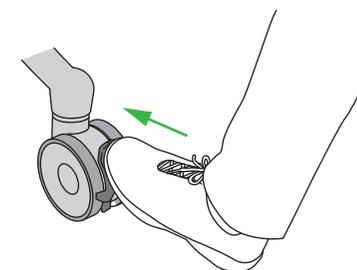

Otpustite kočnice na kolicima  
za tuširanje.

5



Opasnost od priklještenja



Pacijentovu kosu, ruke i stopala držite uz tijelo.  
Kolica za tuširanje namjestite blizu kreveta.  
Preklopite bočnu potporu kolica za tuširanje na strani prenošenja.

6




Opasnost od prevrtanja



Odmah postavite kolica za tuširanje tako da se preklapaju s krevetom.  
Kako biste omogućili ravno prenošenje, spustite kolica za tuširanje na krevet.

7

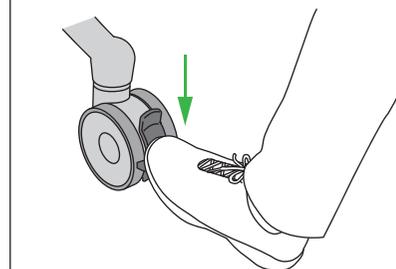


Primijenite kočnice na kolicima  
za tuširanje.

*Nastavite s koracima na sljedećoj stranici*

## Prijenos na krevet – nastavak

8

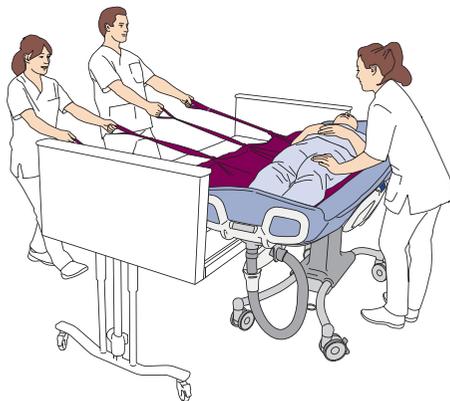


Provjerite je li madrac kolica za tuširanje iznad razine kreveta. Pomoćnim klizačem prenesite pacijenta. Pripazite na pacijentovu glavu.

9



Jastuk za glavu kolica za tuširanje zamijenite jastukom za krevet. Uklonite pomoćni klizač.

10

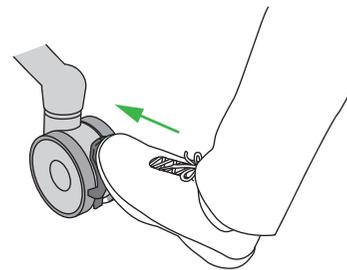

Otpustite kočnice na kolicima za tuširanje.


11



Odmaknite kolica za tuširanje od kreveta. Dezinficirajte kolica za tuširanje.

## Prijenos s dizala za nosiljku

1

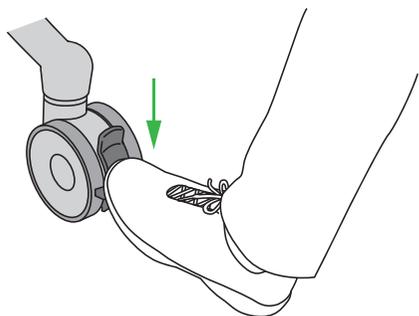

Kolica za tuširanje:

- Spustite na najnižu visinu
- Primijenite kočnice
- Sklopite i blokirajte bočne potpore
- Postavite jastuk za glavu

2



Opasnost od priklještjenja  
Opasnost od pada




Pacijentovu kosu, ruke i stopala držite uz tijelo.  
Podignite prilagodljivi naslon za leđa kolica za tuširanje u sjedeći položaj ako je dostupan. Spustite pacijenta na kolica za tuširanje.

3



Opasnost od iskliznuća

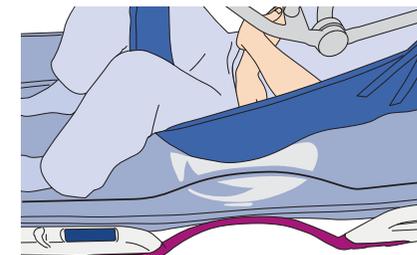


Stranice madraca držite prema gore, ne preklopljene.  
Pacijenta namjestite ispravno u područje Flexi Zone.  
Pacijentova stražnjica unutar grafičkog prikaza.  
Konture pacijentovih kukova poravnate s ljudskim tijelom.

4



Odvojite nosiljku od proširivača.  
Odmaknite dizalo od kolica za tuširanje.

5

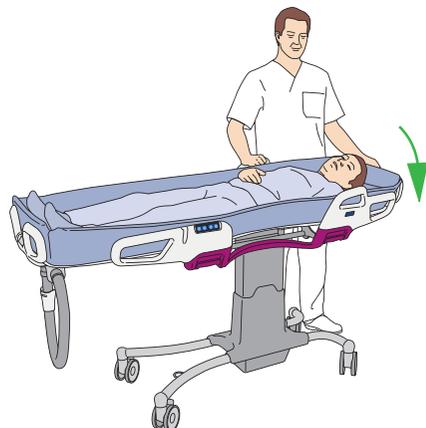


Prilagodite visinu kolica za tuširanje na ergonomsku visinu.  
Spustite prilagodljivi naslon za leđa kolica za tuširanje ako je dostupan.

6



Uklonite nosiljku ispod pacijenta.


7

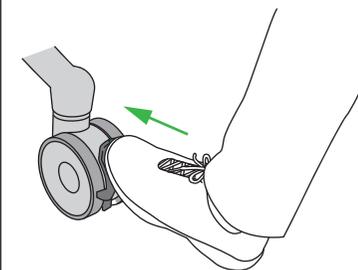

Otpustite kočnice na kolicima za tuširanje.  
Prenesite pacijenta.


## Prijenos na dizalo za nosiljku

1

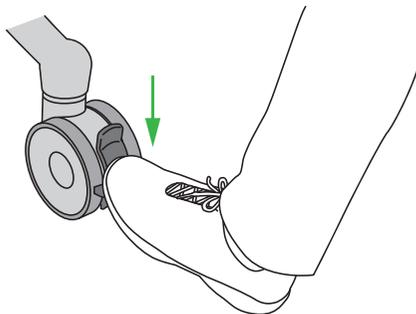

Primijenite kočnice na kolicima za tuširanje.

2

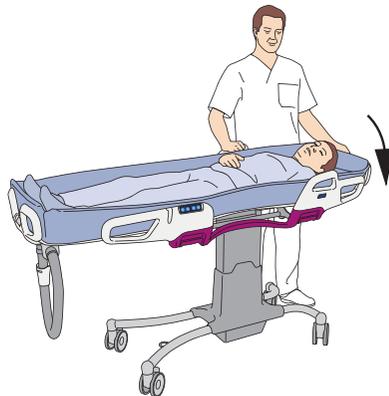

Spustite prilagodljivi naslon za leđa kolica za tuširanje ako je dostupan.

3



Stavite nosiljku na pacijenta.

4



Spustite kolica za tuširanje na najnižu visinu. Postavite proširivač dizala preko kolica za tuširanje. Pričvrstite nosiljku na proširivač.

5



Opasnost od priklještenja  
Opasnost od pada



Pacijentovu kosu, ruke i stopala držite uz tijelo.  
Blokirajte bočne potpore.  
Podignite pacijenta iz kolica za tuširanje.


6



Dezinficirajte kolica za tuširanje .

## Tuširanje pacijenta

1

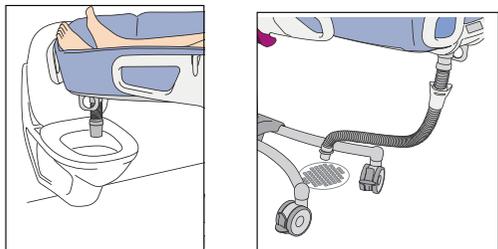


A

B

Postavite gornji odvod kolicica za tuširanje preko wc-školjke/umivaonika (A) ili postavite izlaz donjeg odvoda u držač crijeva za odvod iznad podnog odvoda (B).

2

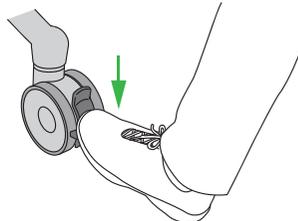


Primijenite kočnice na kolicima za tuširanje.

3




Opasnost od opekline

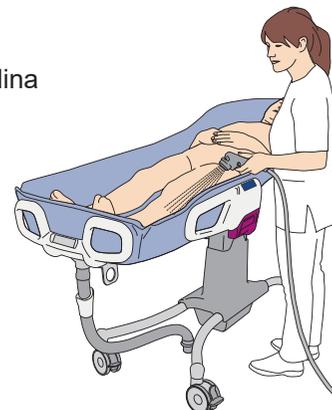

Razodjenite bolesnika.  
Podesite temperaturu vode.  
Okrenite ručku za tuširanje od pacijenta.  
Pustite vodu.  
**Svojom** rukom provjerite temperaturu.

4

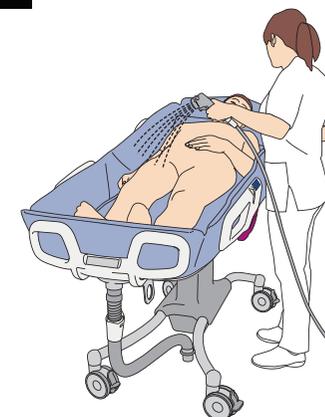


Tuširajte pacijenta.

5




Ocijedite vodu i osušite pacijenta i madrac.

6

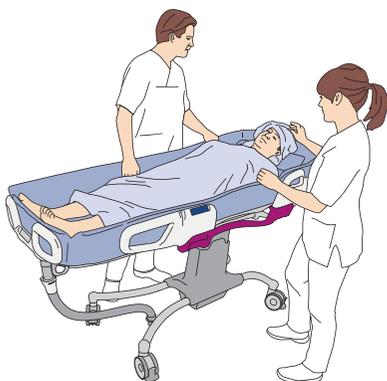


Pokrijte ili odjenite pacijenta.

7

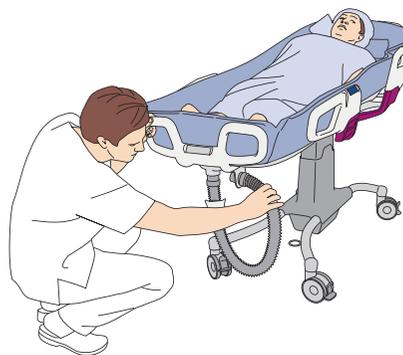


Izlaz donjeg odvoda postavite natrag u držač ili donji odvod pričvrstite na gornji odvod.

8

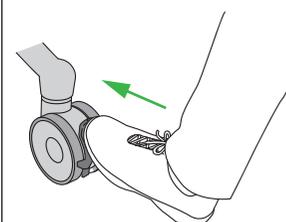

Otpustite kočnice na kolicima za tuširanje.

9

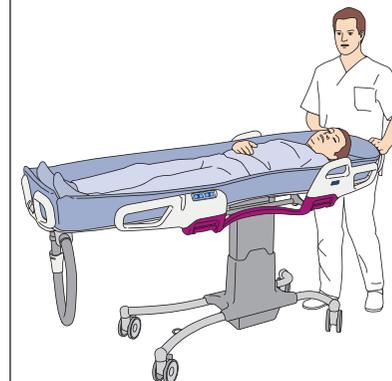

Prenesite pacijenta.

