
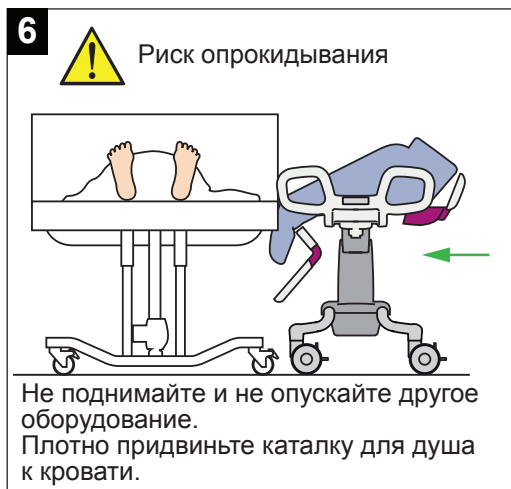
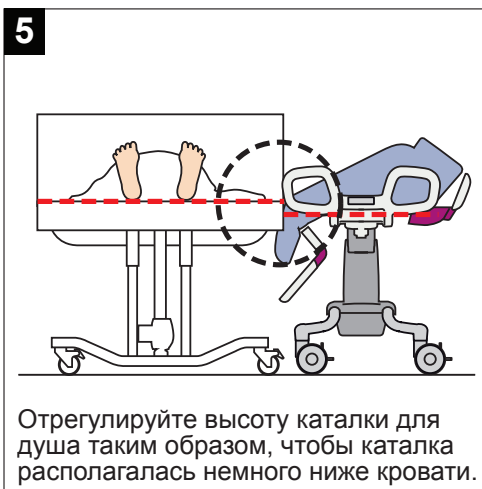


Перемещение пациента с кровати

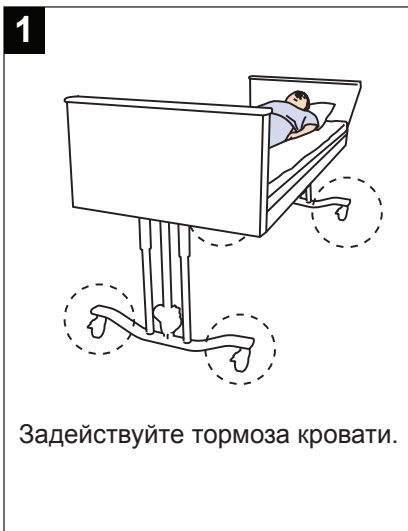


Продолжение на следующей странице

Перемещение пациента с кровати (продолжение)

9



Риск выскальзывания

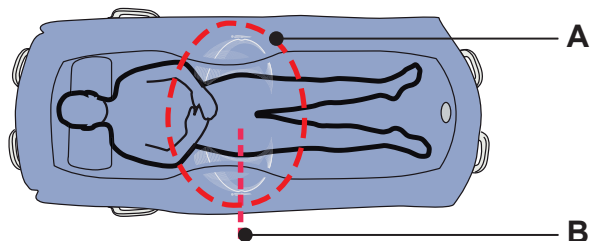


Края матраса должны оставаться поднятыми, не сложенными.
Правильно разместите пациента в гибкой зоне. Ягодицы пациента должны располагаться в пределах, обозначенных контуром (А). Сгибы бедер пациента должны совпадать с обозначенным контуром фигуры человека (В).

10



Замените подушку с кровати подушкой для головы с каталки для душа.
Уберите скользящую простыню.

11

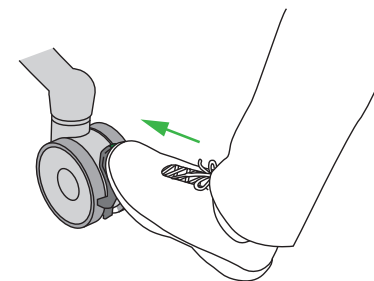


Снимите каталку для душа с тормозов.

12



Риск защемления
Риск падения

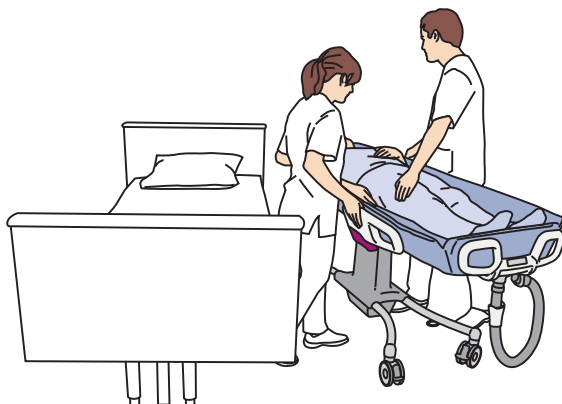

Следите за тем, чтобы волосы, руки и ноги пациента располагались близко к телу. Аккуратно отодвиньте каталку для душа от кровати на достаточное расстояние, чтобы поднять и зафиксировать боковое ограждение каталки для душа со стороны перемещения пациента.


13



Поднимите регулируемую опору для спины на каталке для душа при ее наличии. Перевезите пациента.


Перемещение пациента на кровать

1

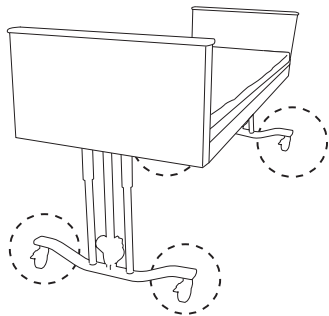

Зафиксируйте тормоза на колесах кровати.
Опустите ограждение кровати со стороны перемещения пациента.

2

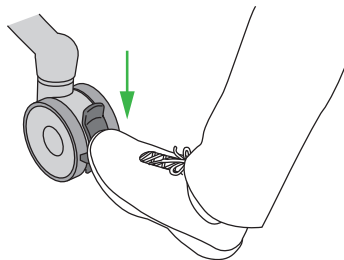


Зафиксируйте тормоза на каталке для душа.
Опустите регулирующую опору для спины на каталке для душа при ее наличии.

3



Подложите под пациента скользящую простыню.

4

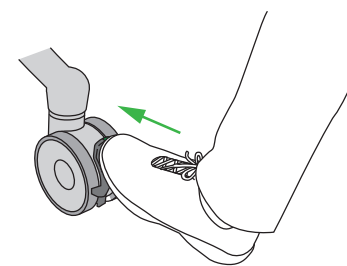

Снимите каталку для душа с тормозов.

5



Риск защемления




Следите за тем, чтобы волосы, руки и ноги пациента располагались близко к телу.
Расположите каталку для душа рядом с кроватью.
Опустите боковое ограждение каталки для душа со стороны перемещения пациента.

6




Риск опрокидывания

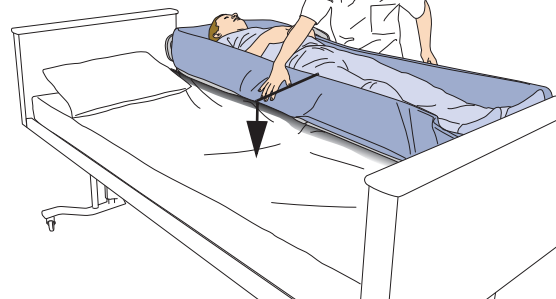

Немедленно установите каталку для душа так, чтобы она перекрывала край кровати.
Опустите каталку для душа на кровать, чтобы обеспечить ровную поверхность перемещения.

7

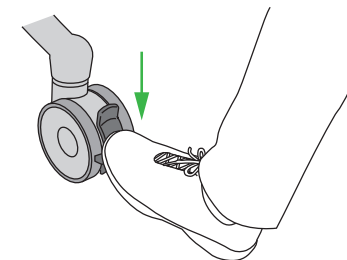


Зафиксируйте тормоза на каталке для душа.

Продолжение на следующей странице


Перемещение пациента на кровать (продолжение)

8

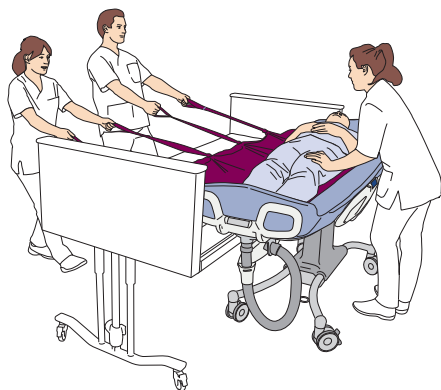


Убедитесь, что матрас каталки для душа располагается поверх кровати. Переместите пациента с помощью скользящей простыни. Следите за головой пациента.

9

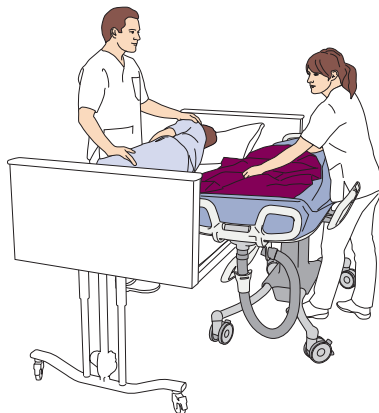


Замените подушку для головы с каталки для душа подушкой с кровати. Уберите скользящую простыню.

10

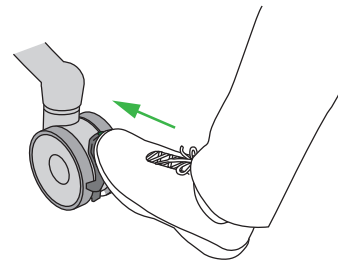

Снимите каталку для душа с тормозов.


11

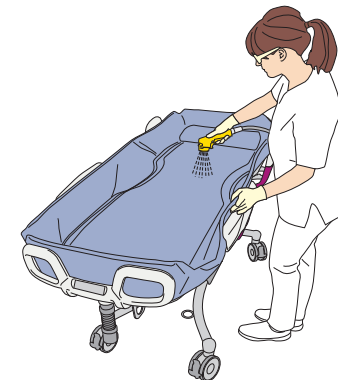

Отодвиньте каталку для душа от кровати. Прозеинфицируйте каталку для душа.

Перемещение пациента с подвешного подъемника

1

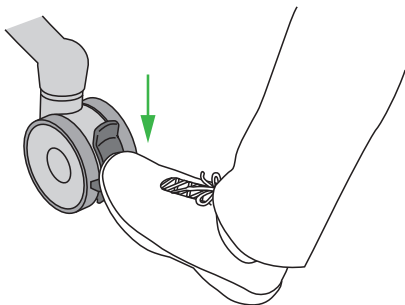

Каталка для душа:

- Опустите каталку в самое низкое положение.
- Задействуйте тормоза.
- Поднимите и зафиксируйте боковые ограждения.
- Положите подушку для головы.

2



Риск защемления
Риск падения




Следите за тем, чтобы волосы, руки и ноги пациента располагались близко к телу. Поднимите регулируемую опору для спины на каталке для душа при ее наличии в сидячее положение. Опустите пациента на каталку для душа.

3



Риск выскальзывания

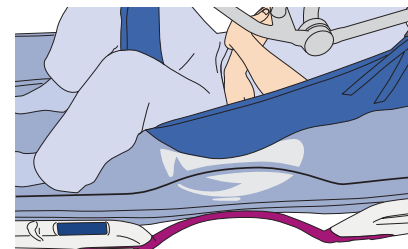


Края матраса должны оставаться поднятыми, не сложенными. Правильно разместите пациента в гибкой зоне. Ягодицы пациента должны располагаться в пределах, обозначенных контуром. Сгибы бедер пациента должны совпадать с обозначенным контуром фигуры человека.

4




Отсоедините стропу от крановой балки. Отведите подъемник в сторону от каталки для душа.

5

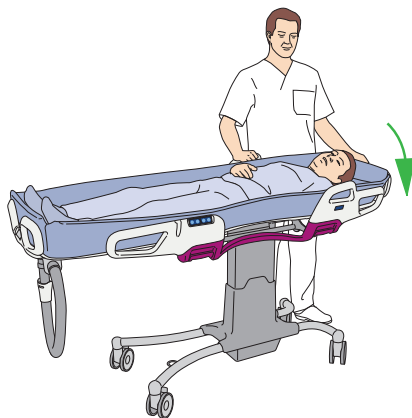


Установите каталку для душа на удобном уровне. Опустите регулируемую опору для спины на каталке для душа при ее наличии.

6

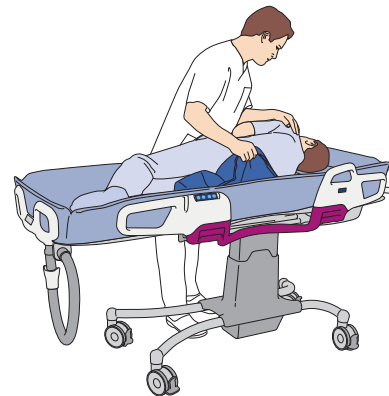

Извлеките стропу из-под пациента.


7

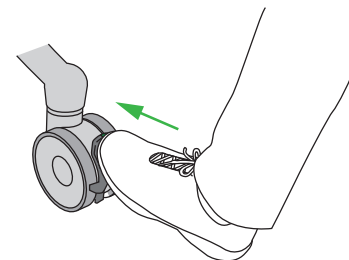

Снимите каталку для душа с тормозов. Перевезите пациента.


Перемещение пациента на подвесной подъемник

1

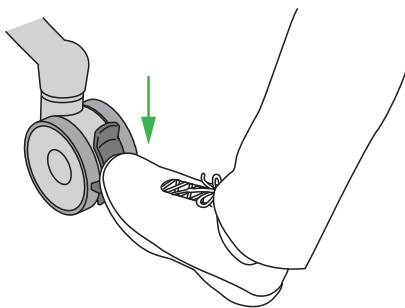


Зафиксируйте тормоза на каталке для душа.

2

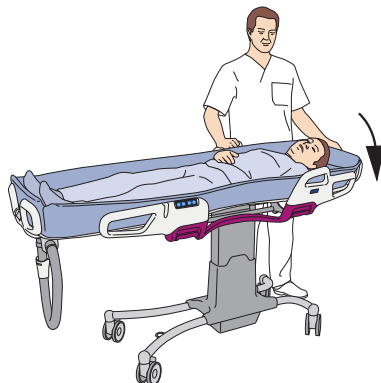

Опустите регулируемую опору для спины на каталке для душа при ее наличии.

3

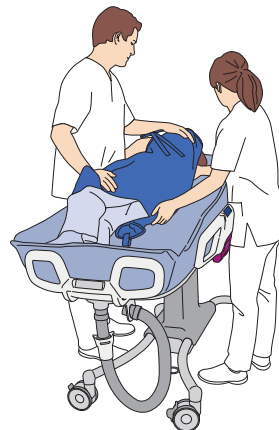

Закрепите стропу на пациенте.

4




Опустите каталку для душа в самое низкое положение. Установите кантовую балку подъемника над каталкой для душа. Закрепите стропу на кантовой балке.

5




Риск защемления
Риск падения

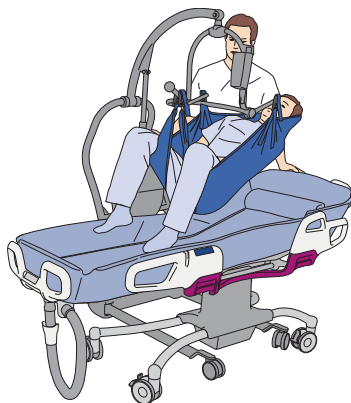

Следите за тем, чтобы волосы, руки и ноги пациента располагались близко к телу. Зафиксируйте боковые ограждения. Поднимите пациента с каталки для душа.


6

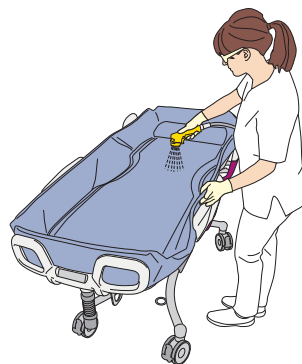

Продезинфицируйте каталку для душа.

Мытье пациента под душем

1

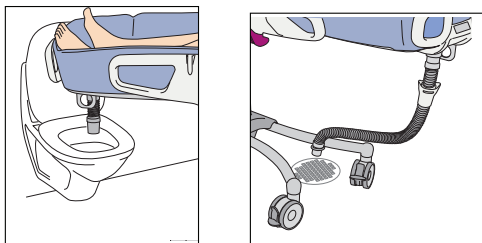


A

B

Разместите верхний сливной патрубок каталки для душа над унитазом / промывочной раковиной (A) или поместите нижний сливной патрубок в держатель сливного шланга над дренажным отверстием (B) в полу.

2

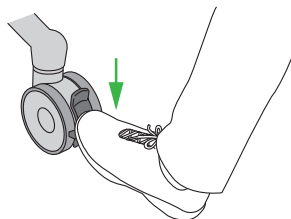


Зафиксируйте тормоза на каталке для душа.

3




Риск ожога

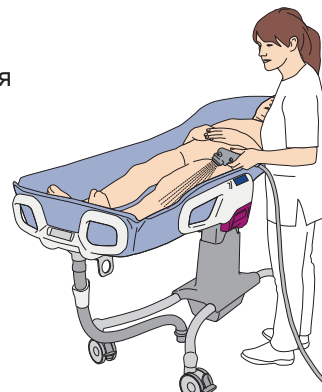


Разденьте пациента. Отрегулируйте температуру воды. Направьте лейку душа в сторону от пациента. Включите воду. Проверьте температуру рукой без перчатки.

4

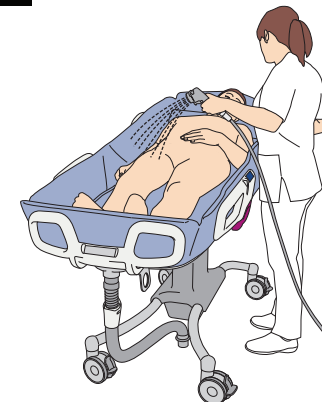


Ополосните пациента под душем.

5

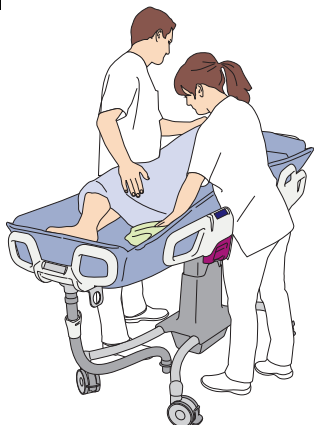

Слейте воду и насухо вытрите пациента и матрас.

6

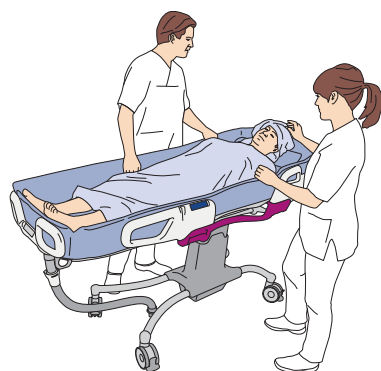


Укройте или оденьте пациента.

7




Снова установите нижний сливной патрубок в держатель или подсоедините нижний сливной патрубок к верхнему сливному патрубку.

8

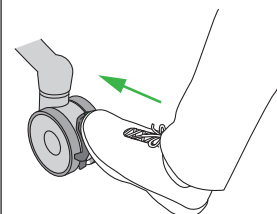

Снимите каталку для душа с тормозов.

9

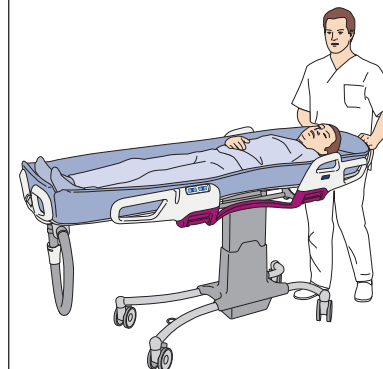

Перевезите пациента.

