

Carevo

Transferir da cama



1

Acione os travões da cama.

2

Coloque o auxiliar de deslizamento por baixo do paciente. Coloque uma almofada por baixo da cabeça do paciente. Dobre a guarda da cama no lado da transferência.

3

Posicione a maca de duche junto da cama, do lado da transferência. Baixe o colchão da maca de duche no lado da transferência.

4

Empurre para baixo e fixe os cantos do colchão da maca de duche entre os painéis de cabeceira/pés e a placa de suporte.

5

Ajuste a altura da maca de duche de modo a ficar um pouco mais baixa do que a cama.

6

⚠ Risco de tombar

Não suba nem desça outros equipamentos. Empurre a maca de duche contra a cama.

7

⚠

Acione os travões da maca de duche.

8

⚠ Risco de tombar

Não suba nem desça outros equipamentos. Transfira o paciente. Preste atenção à cabeça do paciente.


Continue com os passos na página seguinte

Transferir da cama (continuação)

9



Risco de escorregar

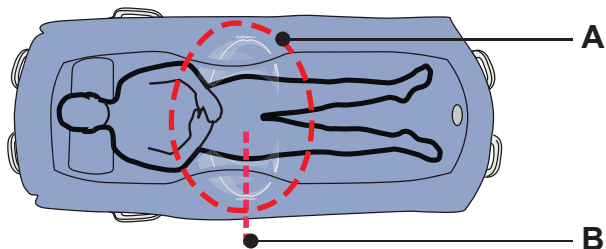


Mantenha as laterais do colchão para cima, não dobradas. Posicione o paciente corretamente na Flexi Zone. Nádegas do paciente dentro do contorno desenhado (A). A linha das ancas do paciente deve ficar alinhada com a figura humana (B).

10



Substitua a almofada da cama pela almofada para a cabeça da maca de duche. Retire o auxiliar de deslizamento.

11

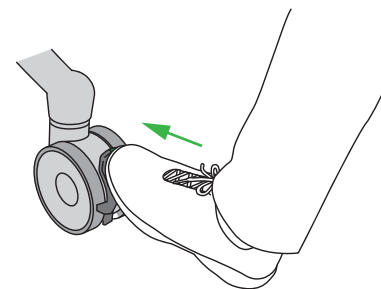


Solte os travões da maca de duche.

12




Risco de aprisionamento
Risco de queda

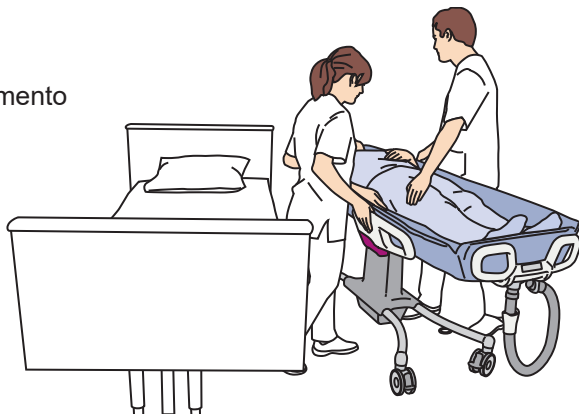

Mantenha os cabelos, braços e pés do paciente perto do corpo. Afaste a maca de duche da cama com cuidado, até ter espaço suficiente para levantar e bloquear a barra lateral da maca de duche.


13

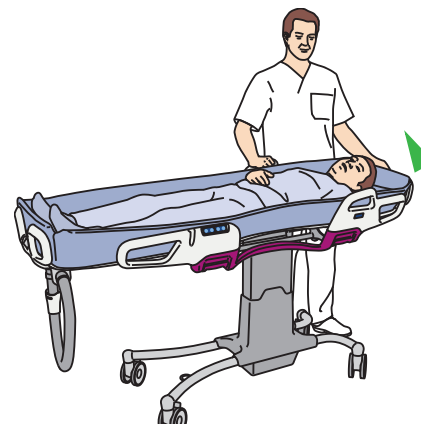

Se existir, suba o apoio para as costas ajustável da maca de duche. Transporte o paciente.


Transferir para a cama

1

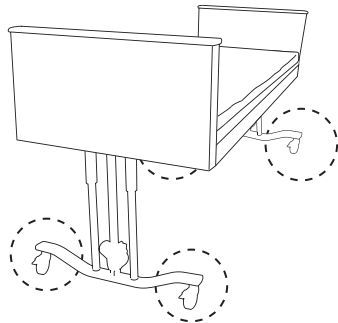

Acione os travões da cama.
Baixe a guarda da cama do
lado da transferência.

2

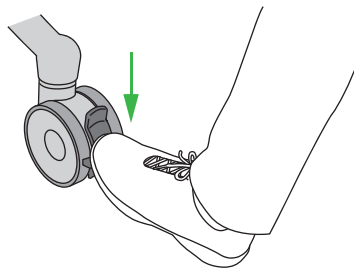


Acione os travões da maca de duche.
Se existir, baixe o apoio para as costas
ajustável da maca de duche.

3



Coloque o auxiliar de deslizamento
por baixo do paciente.

4

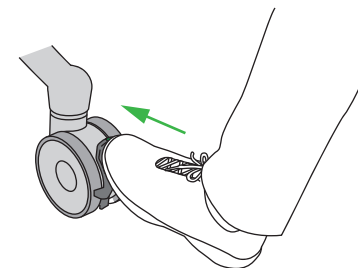

Solte os travões da maca
de duche.

5



Risco de aprisionamento




Mantenha os cabelos, braços e pés do paciente perto do corpo.
Coloque a maca de duche perto da cama.
Dobre a barra lateral da maca de duche para baixo no lado da
transferência.

6




Risco de tombar

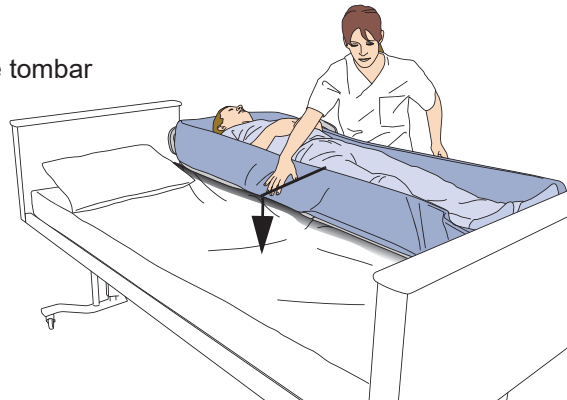

Posicione imediatamente a maca de duche de modo a ficar
parcialmente sobreposta à cama.
Baixe a maca de duche sobre a cama para uma transferência
uniforme.

7

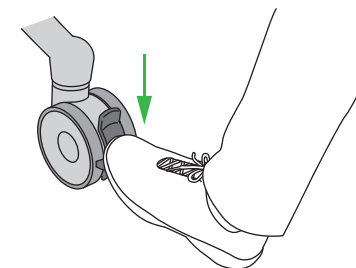


Acione os travões da maca
de duche.

Continue com os passos na página seguinte


Transferir para a cama (continuação)

8

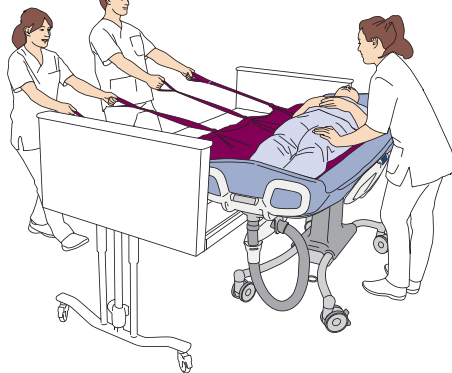


Certifique-se de que o colchão da maca de duche está por cima da cama. Transfira o paciente com o auxiliar de deslizamento. Preste atenção à cabeça do paciente.

9

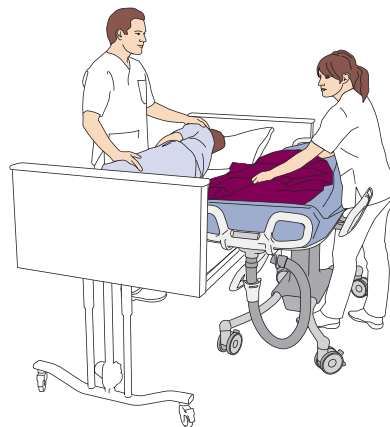


Substitua a almofada da maca de duche pela almofada da cama. Retire o auxiliar de deslizamento.

10

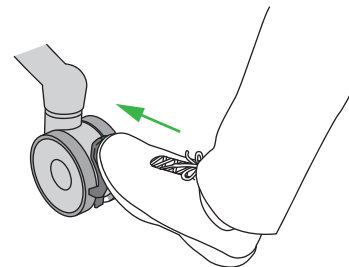

Solte os travões da maca de duche.


11

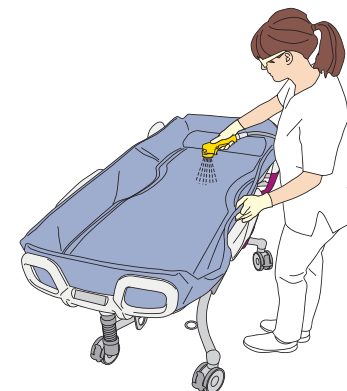

Afaste a maca de duche da cama. Desinfete a maca de duche.

Transferir do elevador de funda

1

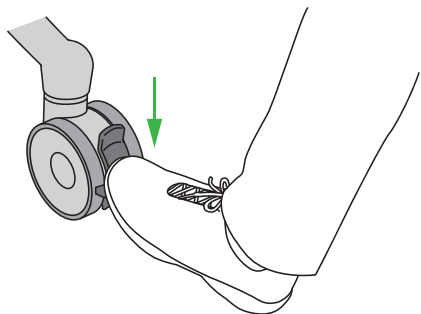

Maca de ducha:

- Desça até ao ponto mais baixo
- Acione os travões
- Levante e bloqueie as barras laterais
- Coloque a almofada para a cabeça

2



Risco de aprisionamento
Risco de queda




Mantenha os cabelos, braços e pés do paciente perto do corpo.
Se existir, suba o apoio para as costas ajustável da maca de ducha para uma posição sentada. Baixe o paciente para a maca de ducha.

3




Risco de escorregar

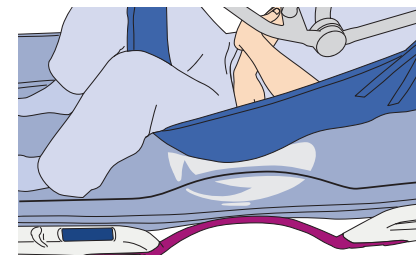


Mantenha as laterais do colchão para cima, não dobradas.
Posicione o paciente corretamente na Flexi Zone.
Nádegas do paciente dentro do contorno desenhado.
A linha das ancas do paciente deve ficar alinhada com a figura humana.

4

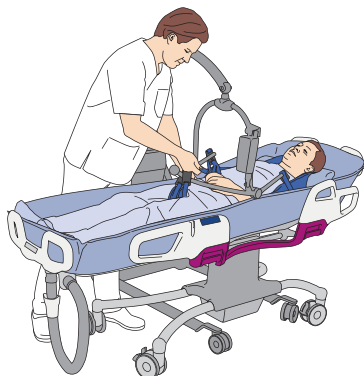

Solte a funda da barra de suporte.
Afasto o elevador da maca de ducha.

5

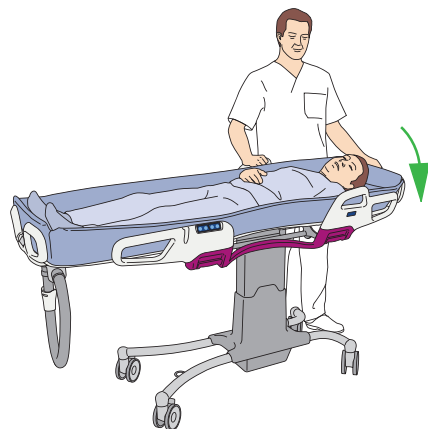


Ajuste a maca de ducha para uma altura ergonómica.
Se existir, baixe o apoio para as costas ajustável da maca de ducha.

6



Retire a funda de debaixo do paciente.


7

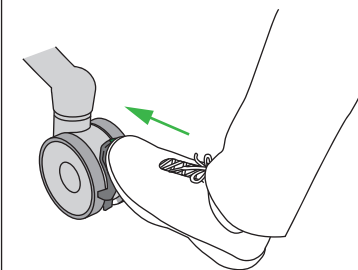

Solte os travões da maca de ducha.
Transporte o paciente.


Transferir para o elevador de funda

1

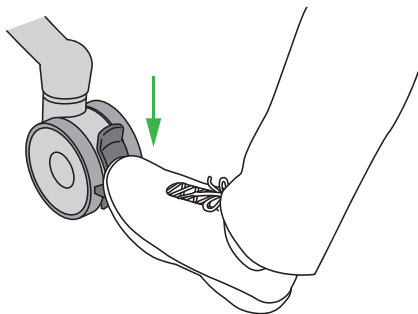

Acione os travões da maca de duche.

2

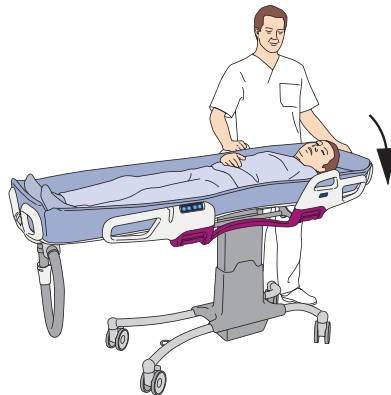

Se existir, baixe o apoio para as costas ajustável da maca de duche.

3



Coloque a funda no paciente.

4



Desça a maca de duche para a posição mais baixa.
Posicione a barra de suporte do elevador por cima da maca de duche. Prenda a funda à barra de suporte.

5




Risco de aprisionamento
Risco de queda



Mantenha os cabelos, braços e pés do paciente perto do corpo.
Bloqueie as barras laterais.
Eleve o paciente para fora da maca de duche.


6

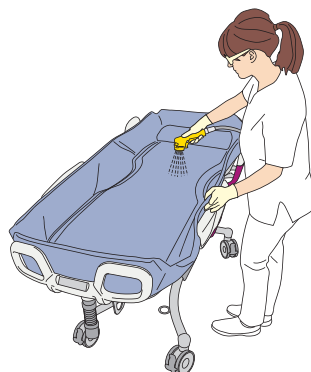

Desinfete a maca de duche.

Dê duche ao paciente

1

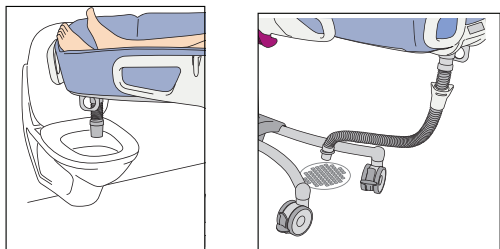


A

B

Posicione o escoamento superior da maca de duche por cima da sanita/pia (A) ou posicione a saída do escoamento inferior no suporte da mangueira de drenagem, por cima do ralo de esgoto no chão.

2

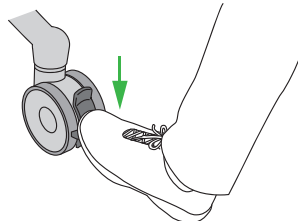


Acione os travões da maca de duche.

3




Risco de escaldão

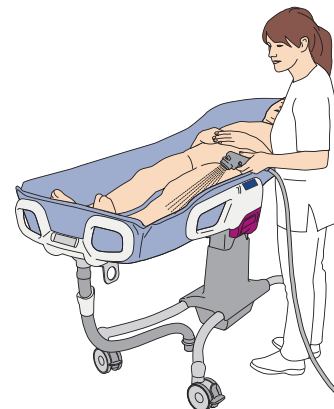


Dispa o paciente.
Regule a temperatura da água.
Vire o manípulo de chuveiro para **longe** do paciente.
Ligue a água.
Verifique a temperatura com a **sua** mão nua.

4

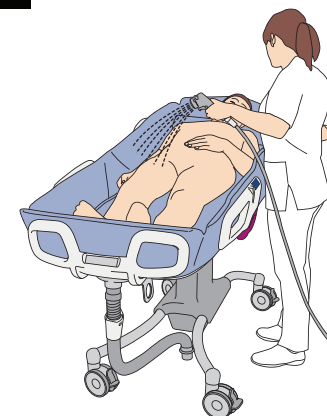


Dê duche ao paciente.

5

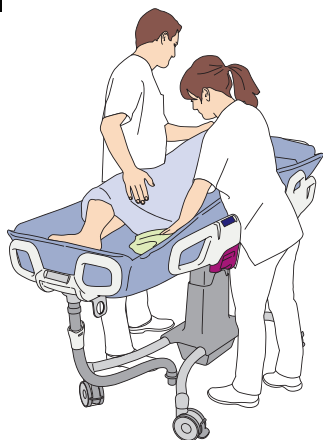


Escoe a água e seque o paciente e o colchão.

6

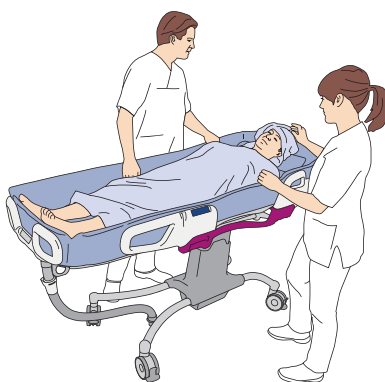


Cubra ou vista o paciente.

7

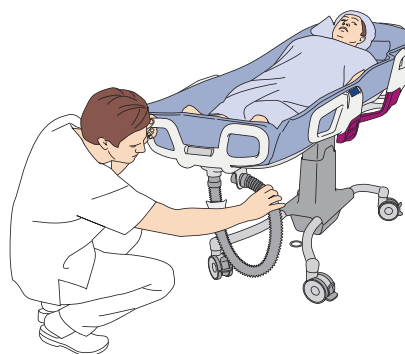


Coloque a parte traseira da saída do escoamento inferior no suporte ou fixe o escoamento inferior ao escoamento superior.

8

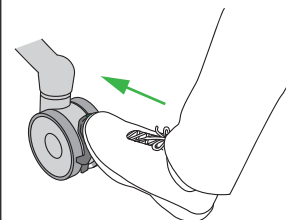

Solte os travões da maca de duche.

9

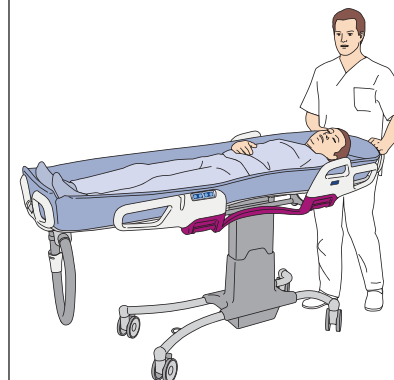

Transporte o paciente.

