



## Przenoszenie z łóżka

1

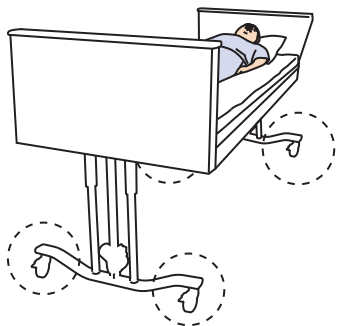


Zablokować hamulce łóżka.

2

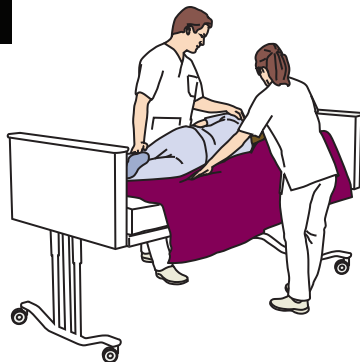


Umieścić matę ślizgową pod pacjentem.  
Umieścić poduszkę pod głową pacjenta.  
Opuścić poręcz łóżka po stronie przenoszenia.

3

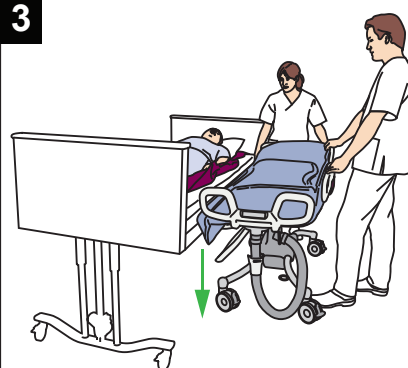


Ustawić wózek prysznicowy obok łóżka po stronie przenoszenia. Opuścić materac wózka prysznicowego po stronie przenoszenia.

4

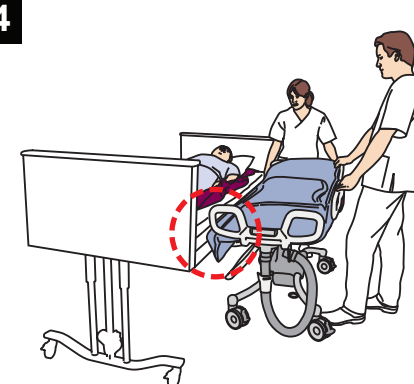

Docisnąć w dół i zamocować rogi materaca wózka prysznicowego pomiędzy panelem po stronie głowy/stóp a płytą wsporczą.

5

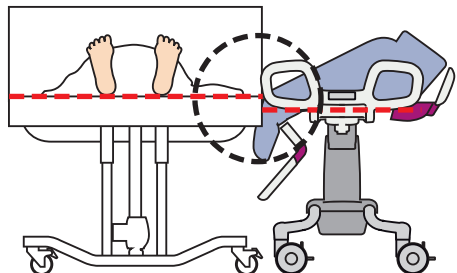


Dostosować wysokość wózka prysznicowego, tak aby był nieznacznie niższy od łóżka.

6




Ryzyko przewrócenia się

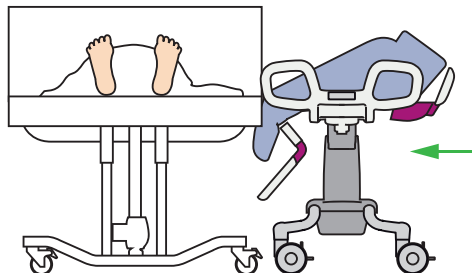

Nie podnosić, ani nie opuszczać innego wyposażenia.  
Docisnąć wózek prysznicowy do łóżka.

7

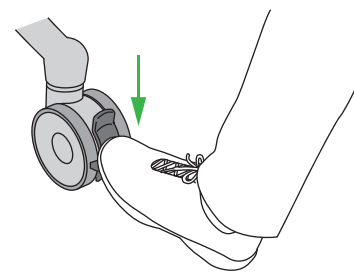


Zablokować hamulce wózka prysznicowego.

8



Ryzyko przewrócenia się

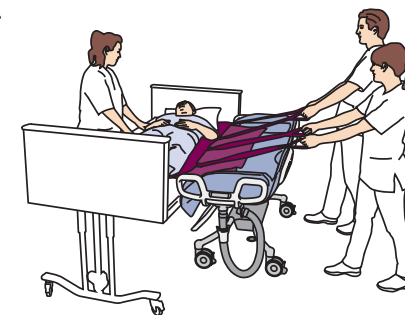

Nie podnosić, ani nie opuszczać innego wyposażenia. Przewieźć pacjenta.  
Uważać na głowę pacjenta.


*Dalsze kroki na następnej stronie.*

## Przenoszenie z łóżka — ciąg dalszy

9



Ryzyko wysunięcia się

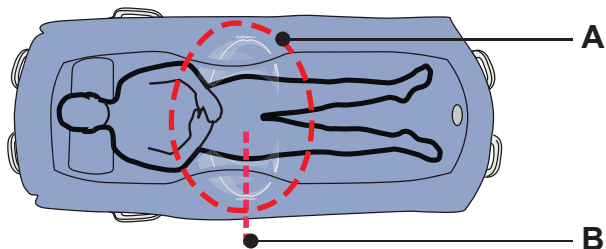


Materac ustawić bokami do góry, nie składać.  
Ustawić pacjenta prawidłowo w strefie flexi.  
Umieścić pośladki pacjenta zgodnie z graficznym obrysem (A).  
Zagięcia bioder pacjenta powinny być wyrównane z rysunkiem człowieka (B).

10



Wymienić poduszkę z łóżka na poduszkę pod głowę z wózka prysznicowego.  
Usunąć matę ślizgową.

11

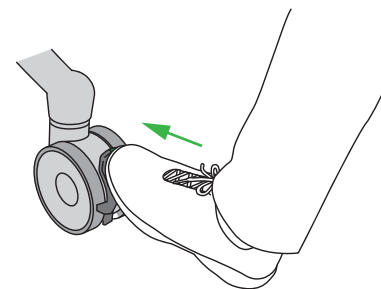

Zwolnić hamulce wózka prysznicowego.

12




Ryzyko uwięzienia  
Ryzyko upadku



Trzymać włosy, ręce i stopy blisko ciała pacjenta.  
Ostrożnie odjechać wózkiem prysznicowym na odległość wystarczającą do podniesienia i zablokowania poręczy bocznej.


13

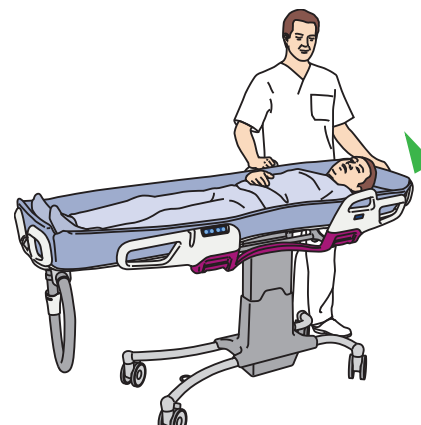

Podnieść regulowane oparcie pleców wózka prysznicowego, jeśli jest dostępne.  
Przetransportować pacjenta.


## Przenoszenie na łóżko

1

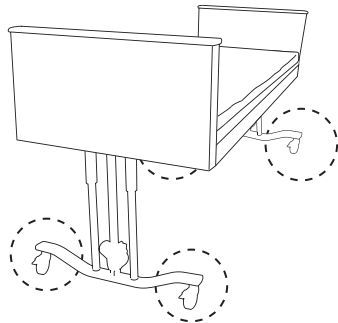

Zablokować hamulce łóżka.  
Opuścić poręcz łóżka po stronie przenoszenia.

2

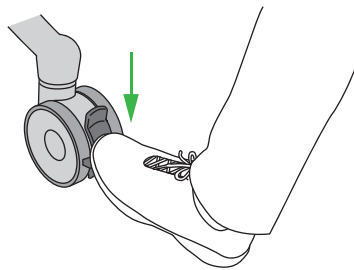


Zablokować hamulce wózka prysznicowego.  
Opuścić regulowane oparcie pleców wózka prysznicowego, jeśli jest dostępne.

3



Umieścić matę ślizgową pod pacjentem.

4

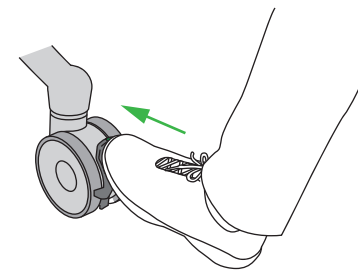


Zwolnić hamulce wózka prysznicowego.

5



Ryzyko uwięzienia

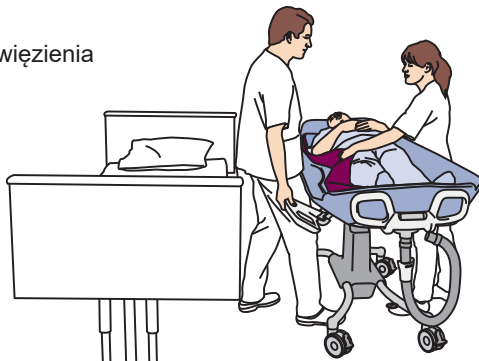


Trzymać włosy, ręce i stopy blisko ciała pacjenta.  
Ustawić wózek prysznicowy blisko łóżka.  
Opuścić poręcz boczną wózka prysznicowego po stronie przenoszenia.

6




Ryzyko przewrócenia się

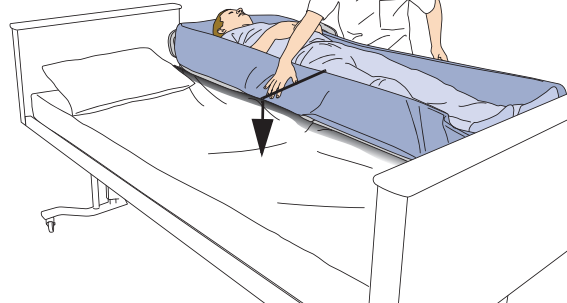

Natychmiast ustawić wózek prysznicowy tak, aby zachodził na łóżko.  
Opuścić wózek prysznicowy na łóżko dla wyrównania powierzchni przenoszenia.

7

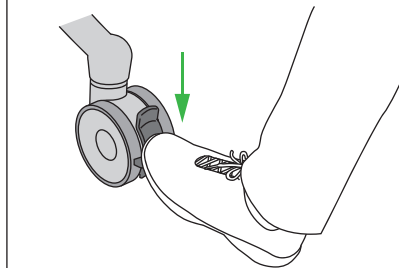


Zablokować hamulce wózka prysznicowego.

*Dalsze kroki na następnej stronie.*


## Przenoszenie na łóżko — ciąg dalszy

8

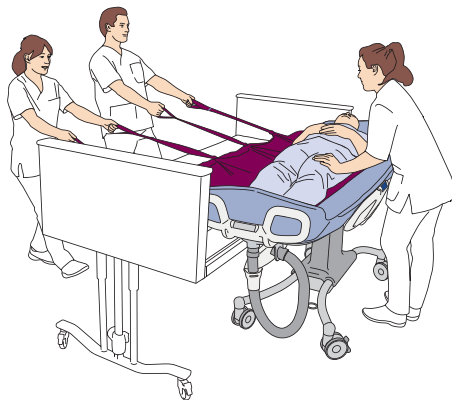


Upewnić się, że materac wózka prysznicowego spoczywa na łóżku.  
Przenieść pacjenta za pomocą maty ślizgowej.  
Uważać na głowę pacjenta.

9

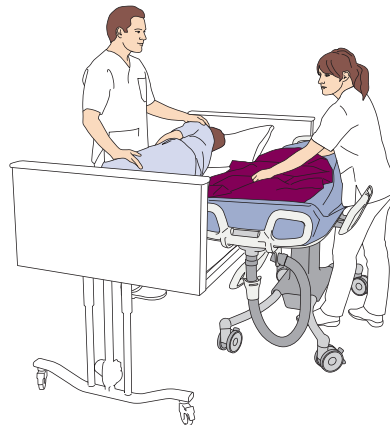


Wymienić poduszkę pod głowę z wózka prysznicowego na poduszkę z łóżka.  
Usunąć matę ślizgową.

10

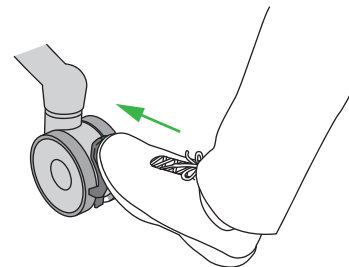

Zwolnić hamulce wózka prysznicowego.


11

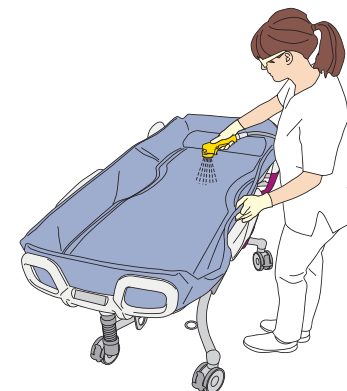

Odsunąć wózek prysznicowy od łóżka.  
Zdezynfekować wózek prysznicowy.

## Przenoszenie z podnośnika nosidłowego

1

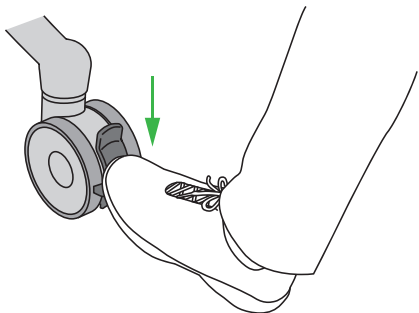

Wózek prysznicowy:

- obniżyć do najniższego położenia.
- zablokować hamulce
- podnieść oraz zablokować poręcz boczne
- umieścić poduszkę pod głowę

2



Ryzyko uwięzienia  
Ryzyko upadku




Trzymać włosy, ręce i stopy blisko ciała pacjenta.  
Podnieść regulowane oparcie pleców wózka prysznicowego do pozycji siedzącej, jeśli jest dostępne. Opuścić pacjenta na wózek prysznicowy.

3



Ryzyko wysunięcia się

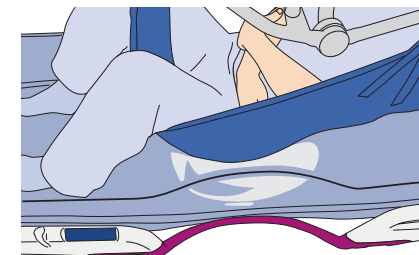


Materac ustawić bokami do góry, nie składać.  
Ustawić pacjenta prawidłowo w strefie flexi.  
Umieścić pośladki pacjenta zgodnie z graficznym obrysem.  
Zagięcia bioder pacjenta powinny być wyrównane z rysunkiem człowieka.

4



Odłączyć nosidło od ramy.  
Odsunąć podnośnik od wózka prysznicowego.

5

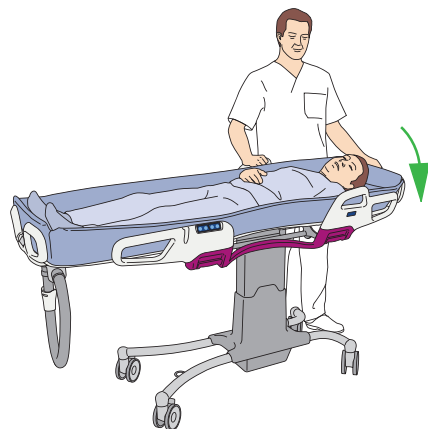


Ustawić wózek prysznicowy na ergonomiczną wysokość.  
Opuścić regulowane oparcie pleców wózka prysznicowego, jeśli jest dostępne.

6



Wyjąć nosidło spod pacjenta.


7

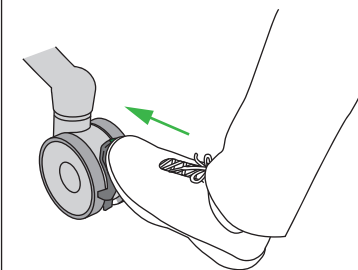

Zwolnić hamulce wózka prysznicowego.  
Przetransportować pacjenta.


## Przenoszenie na podnośnik nosidłowy

1

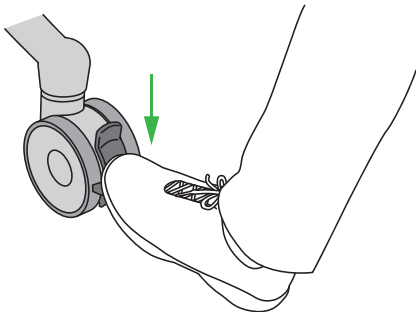

Zablokować hamulce wózka prysznicowego.

2

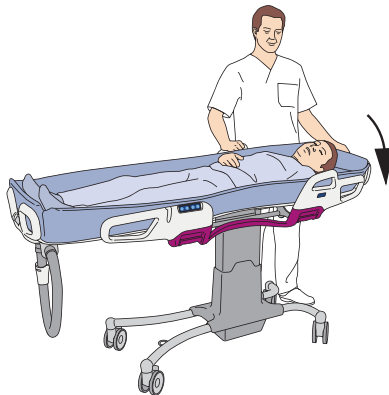

Opuścić regulowane oparcie pleców wózka prysznicowego, jeśli jest dostępne.

3



Założyć nosidło na pacjenta.

4



Opuścić wózek prysznicowy do najniższego położenia. Ustawić ramę podnośnika nad wózkiem prysznicowym. Przymocować nosidło do ramy.

5




Ryzyko uwięzienia  
Ryzyko upadku



Trzymać włosy, ręce i stopy blisko ciała pacjenta.  
Zablokować poręcz boczne.  
Podnieść pacjenta, zdejmując go z wózka prysznicowego.


6

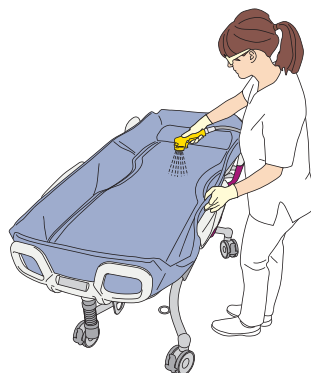

Zdezynfekować wózek prysznicowy.

## Mycie pacjenta pod prysznicem

1

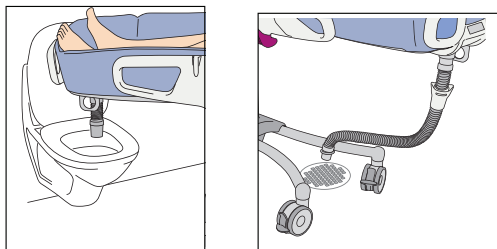


A

B

Ustawić górny odpływ wózka prysznicowego nad toaletą/zlewem (A) lub umieścić dolny odpływ w uchwycie węża nad odpływem podłogowym (B).

2

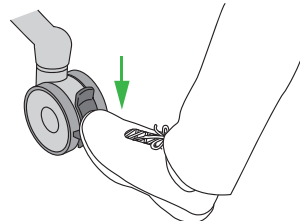


Zablokować hamulce wózka prysznicowego.

3




Ryzyko oparzenia

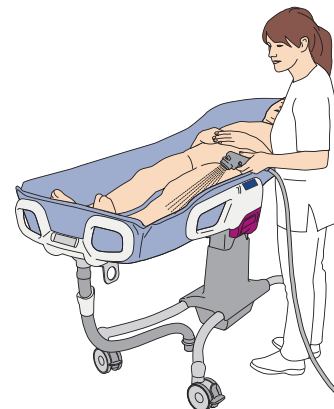


Rozebrać pacjenta.  
Ustawić temperaturę wody.  
Chwycić słuchawkę prysznicową i skierować ją **z dala** od pacjenta.  
Odkręcić wodę.  
Sprawdzić temperaturę wody gołą ręką.

4

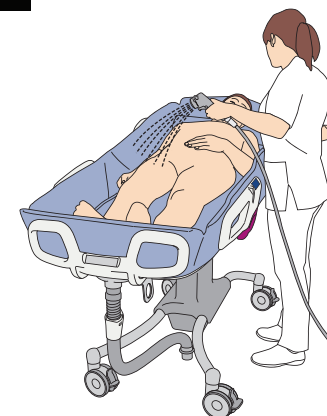


Umyć pacjenta pod prysznicem

5

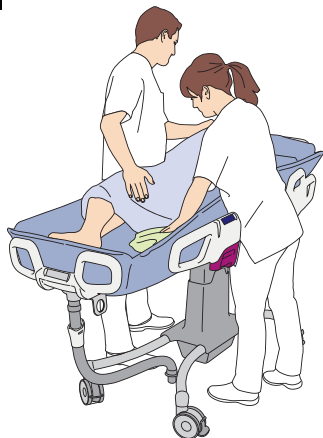


Spuścić wodę i osuszyć pacjenta i materac.

6

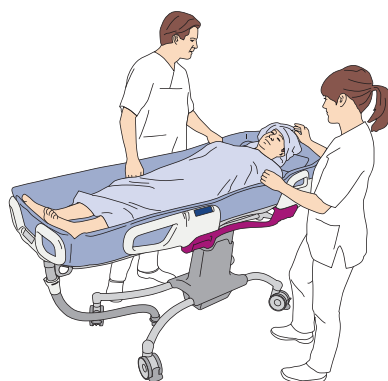


Okryć lub ubrać pacjenta.

7

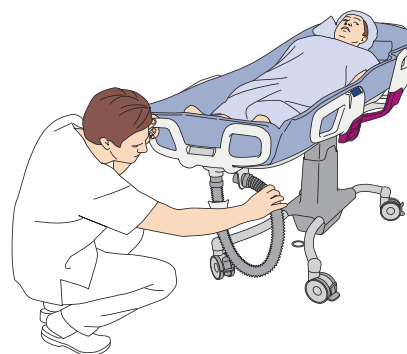

Umieścić dolny odpływ z powrotem w uchwycie lub przymocować dolny odpływ do górnego odpływu.

8

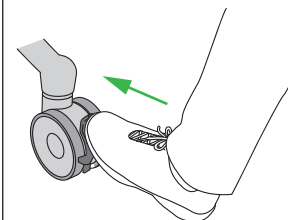

Zwolnić hamulce wózka prysznicowego.

9



Przetransportować pacjenta.

