



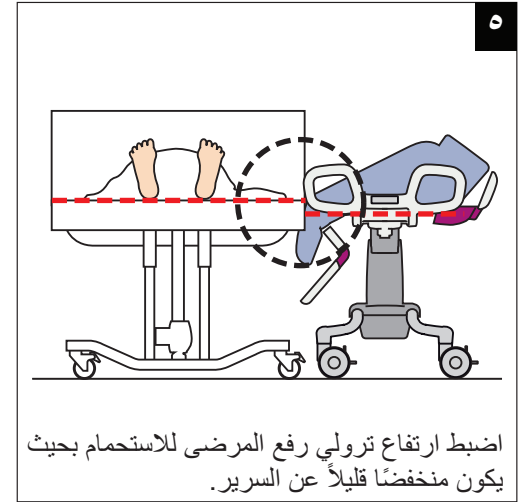


تابع الخطوات في الصفحة التالية

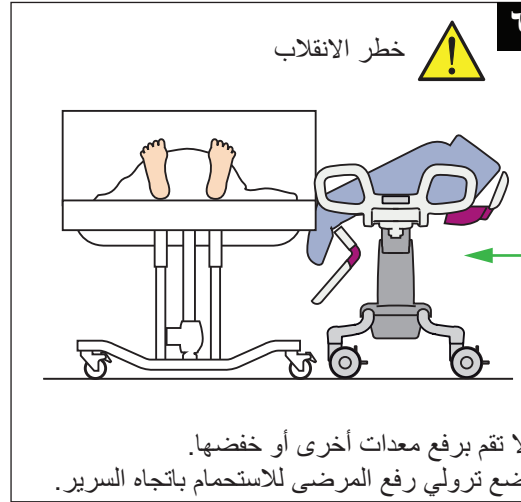

٩



خطر الانزلاق

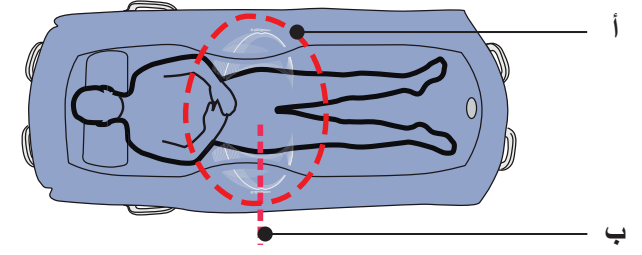


تأكد من أن جوانب المرتبة متجهة لأعلى وأنها غير مطوية.
ضع المريض بشكل صحيح فوق المنطقة المرنة.
تأكد من أن أرداف المريض داخل المنطقة الموضحة في الرسم (أ).
يجب محاذاة ثنيات ورك المريض مع الشكل البشري في الرسم (ب).

١٠



استبدل وسادة السرير بوسادة الرأس الخاصة بترولي رفع المرضى للاستحمام.
أزل أداة الانزلاق المساعدة.

١١

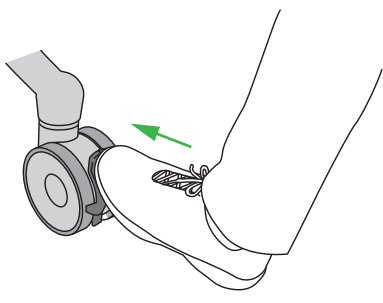

حرر الفرامل الموجودة على ترولي رفع المرضى للاستحمام.

١٢




خطر الاحتجاز
خطر السقوط




تأكد أن شعر المريض وذراعيه وقدميه بالقرب من جسمه.
حرك ترولي رفع المرضى للاستحمام بحذر بعيداً عن السرير بشكل كافٍ لطي الدعامة الجانبية الموجودة على ترولي رفع المرضى للاستحمام وقلعها.

١٣

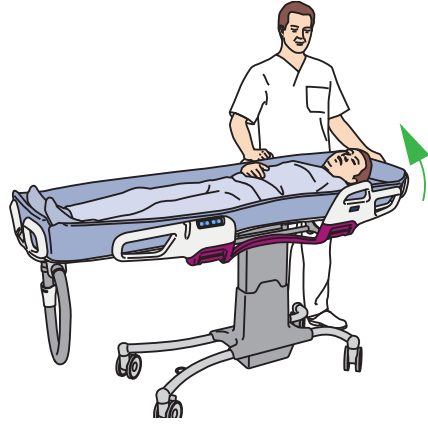


ارفع دعامة الظهر القابلة للضبط على ترولي رفع المرضى للاستحمام، في حالة توفرها.

١

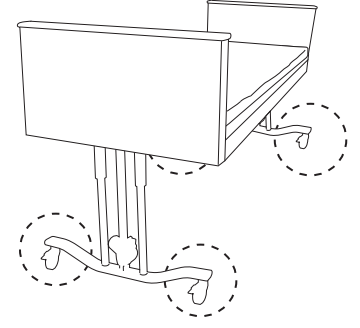

استخدم الفرامل الموجودة بالسرير.
قم بطي قضيب السرير على جانب النقل.

٢

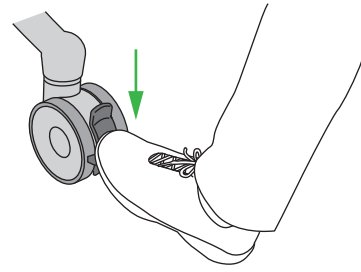


استخدم الفرامل الموجودة على ترولي رفع
المرضى للاستحمام. اخفض دعامة الظهر القابلة
للضبط على ترولي رفع المرضى للاستحمام، في
حالة توفرها.

٣



ضع أداة انزلاق مساعدة أسفل المريض.

٤

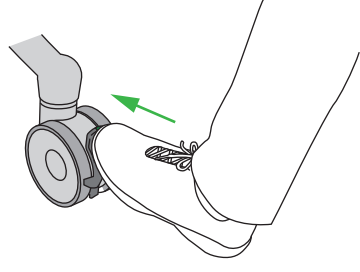

حرر الفرامل الموجودة على ترولي رفع
المرضى للاستحمام.

٥



خطر الاحتجاز

تأكد أن شعر المريض وذراعيه وقدميه بالقرب من جسمه.
ضع ترولي رفع المرضى للاستحمام بالقرب من السرير.
قم بطي دعامة ترولي رفع المرضى للاستحمام الجانبية على جانب النقل.


٦



خطر الانقلاب


قم على الفور بوضع ترولي رفع المرضى للاستحمام بحيث يتداخل مع السرير.
اخفض ترولي رفع المرضى للاستحمام فوق السرير لعملية نقل سلسلة.

٧

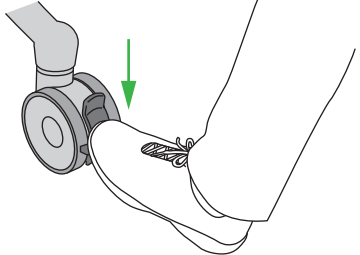


استخدم الفرامل الموجودة على ترولي رفع
المرضى للاستحمام.

تابع الخطوات في الصفحة التالية

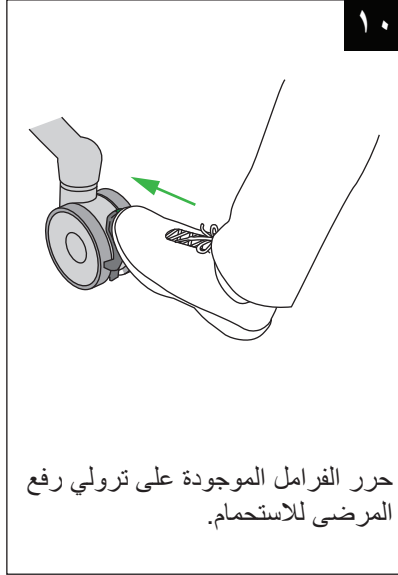

١

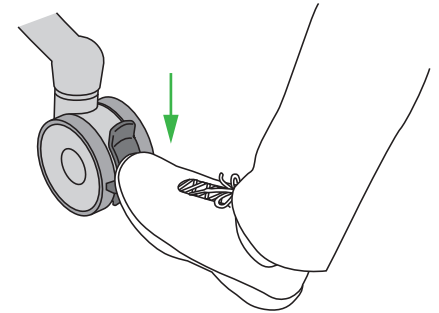

ترولي رفع المرضى للاستحمام:
- قم بالخفض إلى أدنى مستوى ارتفاع
- استخدم الفرامل
- قم بطي الدعامات الجانبية لأعلى وقفلها
- ضع وسادة الرأس

٢



خطر الاحتجاز
خطر السقوط




تأكد أن شعر المريض وذراعيه وقدميه بالقرب من جسمه.
ارفع دعامة الظهر القابلة للضبط على ترولي رفع المرضى للاستحمام إلى وضعية الجلوس، في حالة توفرها. اخفض المريض على ترولي رفع المرضى للاستحمام.

٣



خطر الانزلاق

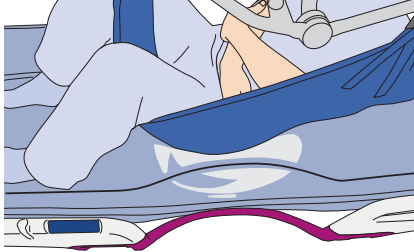


تأكد من أن جوانب المرتبة متجهة لأعلى وأنها غير مطوية.
ضع المريض بشكل صحيح فوق المنطقة المرنة.
تأكد من أن أرداف المريض داخل المنطقة الموضحة في الرسم.
يجب محاذاة ثنيات ورك المريض مع الشكل البشري في الرسم.

٤



قم بفك الحمالة من عارضة المبادعة.
حرك الرافعة بعيداً عن ترولي رفع المرضى للاستحمام.

٥

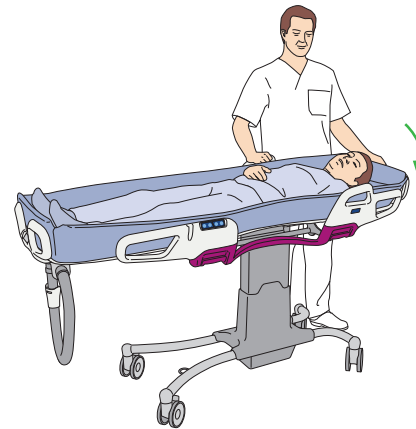


اضبط ترولي رفع المرضى للاستحمام على الارتفاع المريح للعمل.
اخفض دعامة الظهر القابلة للضبط على ترولي رفع المرضى للاستحمام، في حالة توفرها.

٦



قم بإزالة الحمالة من أسفل المريض.

٧

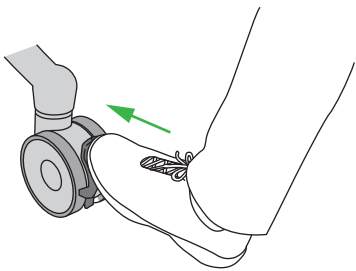

حرر الفرامل الموجودة على ترولي رفع المرضى للاستحمام. انقل المريض.

