

Carevo**Прехвърляне от леглото**

Активирайте спирачките на леглото.




Продължете със стъпките на следващата страница

Прехвърляне от леглото (продължение)

9



Риск от изпълзване

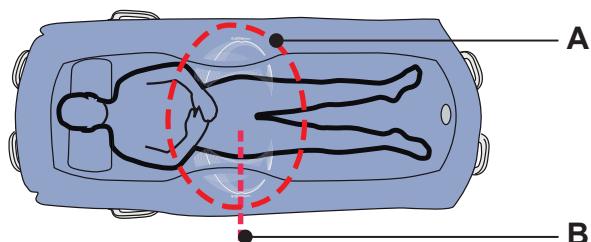


Преградите на матрака трябва да бъдат вдигнати, а не сгънати.
Поставете пациента правилно върху Flexi Zone.
Седалището на пациента е в графичния контур (A).
Гънките на бедрото на пациента са подравнени
с човешката фигура (B).

10



Сменете възглавницата на леглото с възглавницата на душ количката.
Отстранете плъзгащото помощно средство.

11

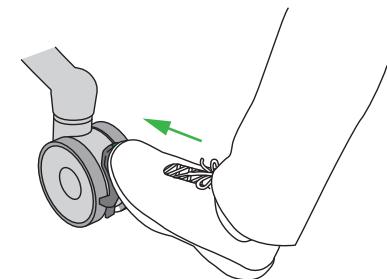


Освободете спирачките на душ
количката.

12




Риск от заклещване
Риск от падане

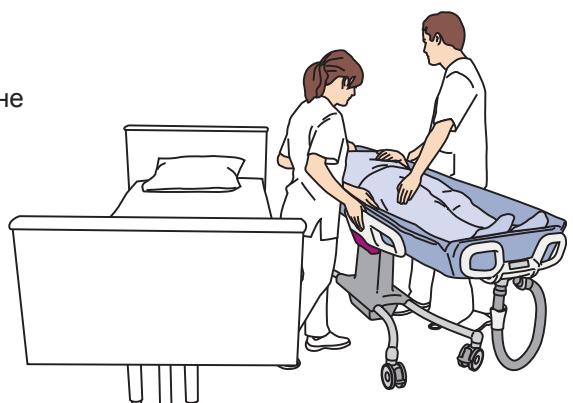




Дръжте косата, ръцете и краката на пациента в близост до тялото му.
Внимателно преместете душ количката достатъчно далеч от леглото,
за да можете да разгънете нагоре страничната опора на душ количката.

13

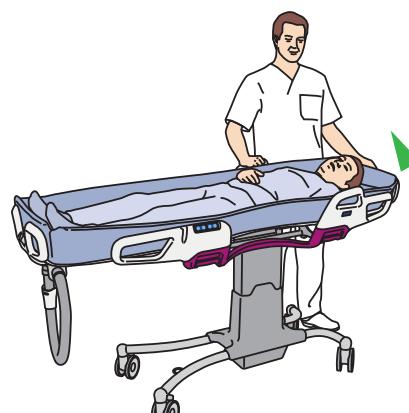

Повдигнете регулируемата опора за гърба на душ количката,
ако има такава.
Транспортирайте пациента.


Прехвърляне към леглото

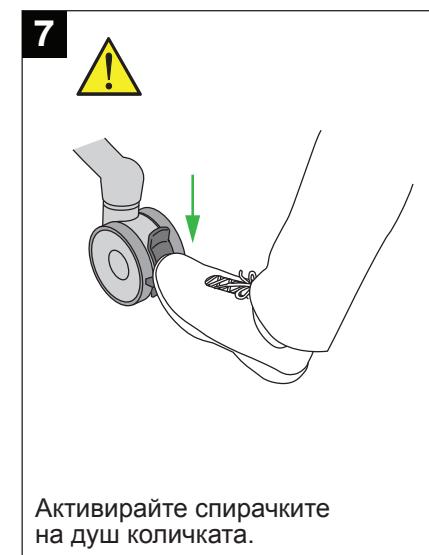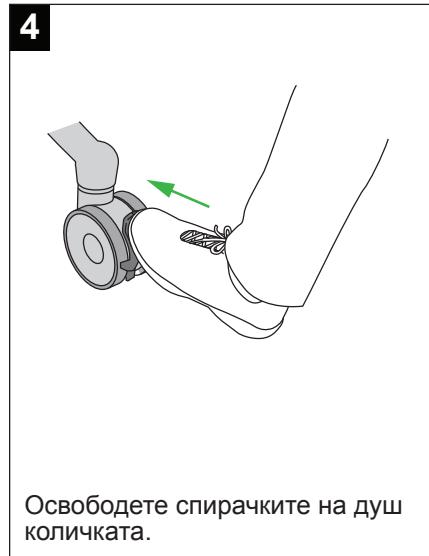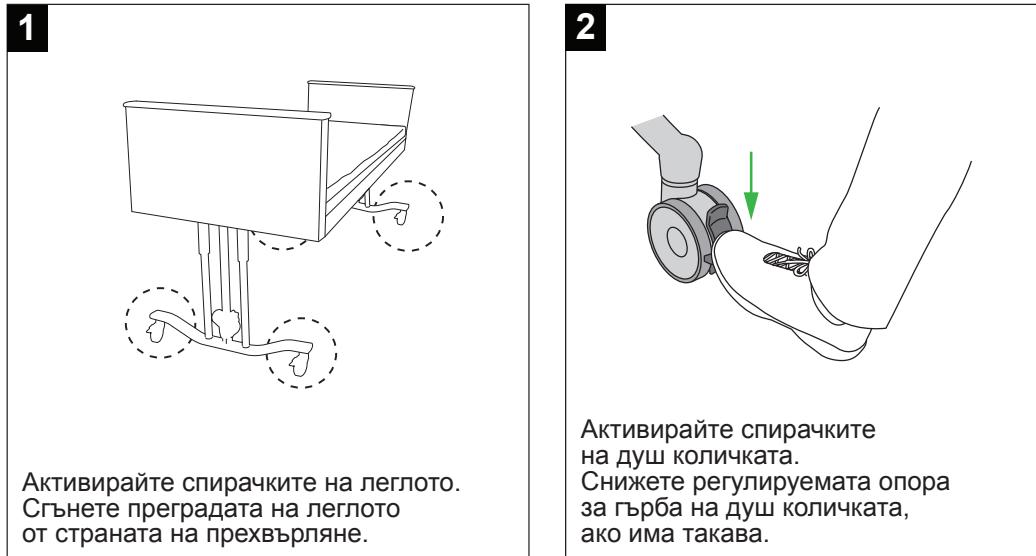

Продължете със стъпките на следващата страница

Прехвърляне към леглото (продължение)

8

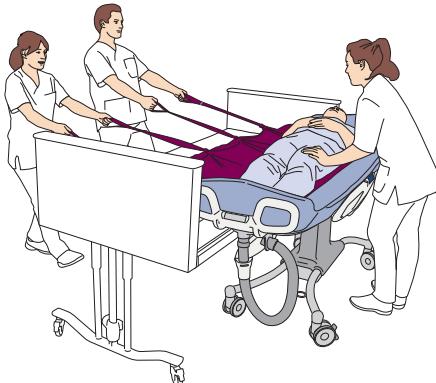


Проверете дали матракът на душ количката е отгоре на леглото.
Прехвърлете пациента с помощта на плъзгащо помошно средство.
Наблюдавайте главата на пациента.

9



Сменете възглавницата за глава на душ количката с възглавницата на леглото.
Отстранете плъзгащото помошно средство.

10

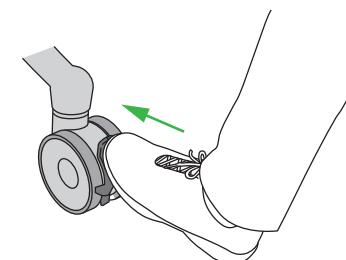

Освободете спирачките на душ количката.


11



Преместете душ количката далеч от леглото.
Дезинфекцирайте душ количката.

Прехвърляне от подемник за слинг

1

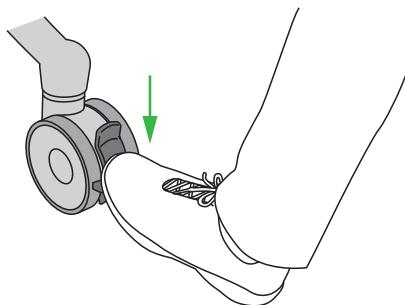

Душ количка:

- Снижете до най-ниска позиция
- Активирайте спирачките
- Сънете нагоре и заключете страничните опори
- Поставете възглавницата за глава

2



Риск от заклещване
Риск от падане




Дръжте косата, ръцете и краката на пациента в близост до тялото му.
Повдигнете регулируемата опора за гърба на душ количката в седнало положение, ако има такава.
Снижете пациента върху душ количката.

3



Риск от изпълзване

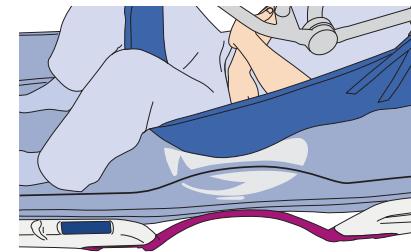

Преградите на матрака трябва да бъдат вдигнати, а не сънъти.


Поставете пациента правилно върху Flexi Zone.
Седалището на пациента е в графичния контур.
Гънките на бедрото на пациента са подравнени с човешката фигура.

4



Откачете слинга от спредера.
Преместете подемника далеч от душ количката.

5

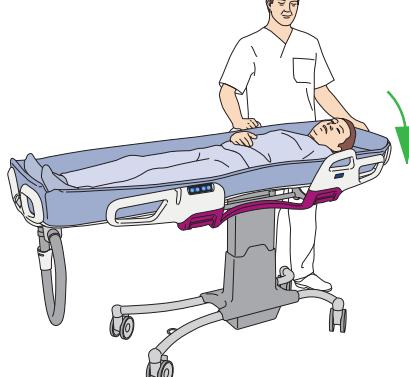


Регулирайте душ количката до ергономична височина.
Снижете регулируемата опора за гърба на душ количката, ако има такава.

6



Отстранете слинга изпод пациента.

7

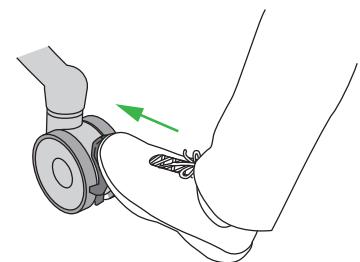

Освободете спирачките на душ количката.
Транспортирайте пациента.

Прехвърляне към подемник за слинг



Активирайте спирачките на душ количката.



Снижете регулируемата опора за гърба на душ количката, ако има такава.



Поставете слинга на пациента.



Снижете душ количката до най-ниска позиция. Позиционирайте спредера на подемника над душ количката. Прикрепете слинга към спредера.



Дръжте косата, ръцете и краката на пациента в близост до тялото му.
Заключете страничните опори.
Повдигнете пациента извън душ количката.



Дезинфекцирайте душ количката.

Измиване на пациента

