

# Maxi Twin

## Пульт ручного керування



Підіймання



Опускання



Положення нахилу



Сидяче положення




Зведення ніжок шасі




Розведення ніжок шасі

## Аварійна зупинка

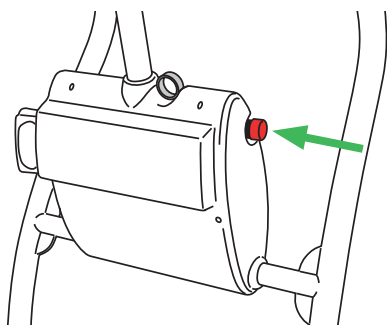


Натисніть кнопку на бічній стінці кришки привода.

## Аварійне опускання

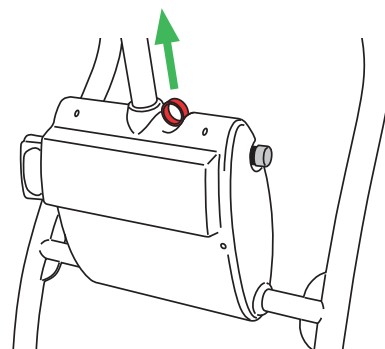


Потягніть догори кільце у верхній частині кришки привода.

## Гальма

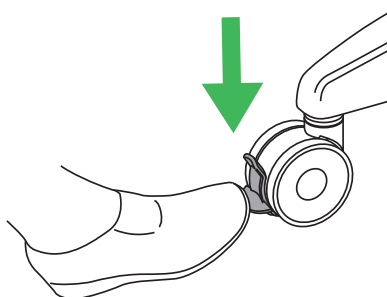


Застосуйте гальма.

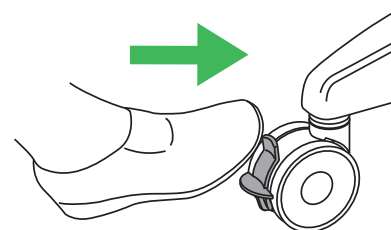


Вимкніть гальма.

## Регулювання ширини ніжок шасі

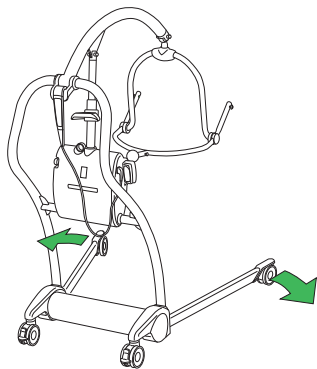



Натисніть кнопку, щоб розвести ніжки шасі.

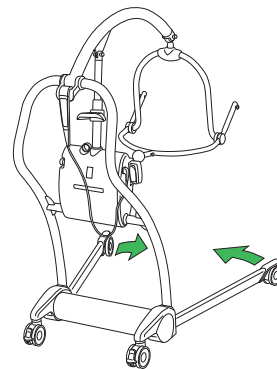



Натисніть кнопку, щоб звести ніжки шасі.

## Прикріплення стропа

Охопіть петлею стропа

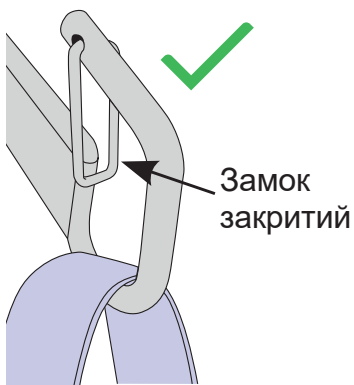
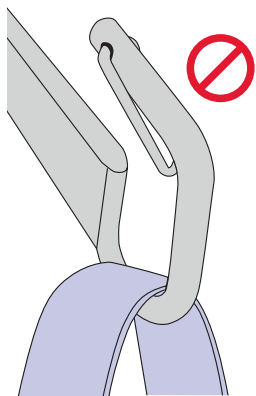


Затисніть стропа

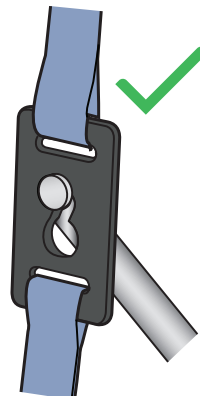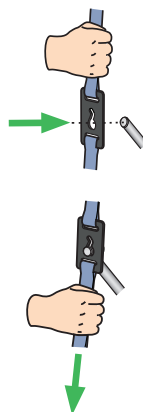



## Від'єднання стропа

Охопіть петлею стропа

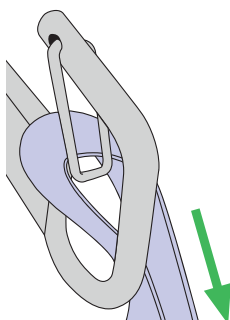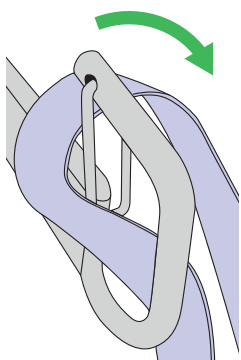

Перетягніть один бік петлі через гачок і потягніть донизу.

Затисніть стропа

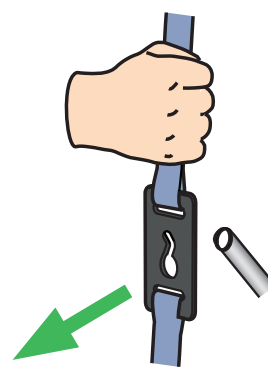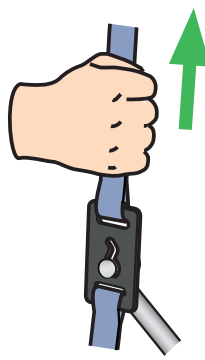

Потягніть ремінець догори й зніміть кріплення.

